



MANUEL D'UTILISATION

Netti III XHD

ALU_REHABTM

Thinking ahead - moving forward



Ce produit répond à la norme 93/42/CEE relative aux produits médicaux.

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION	4
1.1 Domaines d'utilisation / indications	5
1.2 Qualité et durée de vie	5
1.3 Environnement et élimination	5
1.4 Informations relatives à la réutilisation	6
1.5 À propos du présent guide	6
1.6 Dimensions de base	7
2. GUIDE SUCCINCT	8
3. DESCRIPTION	9
4. CARACTÉRISTIQUES DU NETTI III XHD	10
5. ACCESSOIRES	11
5.1 Assemblage de la ceinture ventrale	14
5.2 Assemblage du harnais	14
6. ASSEMBLAGE ET RÉGLAGE	15
6.1 Déballage	15
6.2 Roues motrices	15
6.3 Fourches avant	15
6.4 Roues directrices	16
6.5 Hauteur sol siège à l'avant	16
6.6 Hauteur sol siège à l'arrière	16
6.7 Dossier	17
6.8 Réglage de la profondeur d'assise arrière	17
6.9 Réglage de la profondeur d'assise avant	18
6.10 Dispositifs anti-basculé	18
6.11 Réglage des accoudoirs	19
6.12 Coussins	19
6.13 Réglage du dossier réglable en tension	20
6.14 Relève-jambes	20

6.15 Appui-tête	22
6.16 Poignées de poussée	24
6.17 Réglage du frein	24
6.18 Inclinaison/basculement de l'assise	26
6.19 Inclinaison du dossier	26
7. MANIPULATION	26
7.1 Conduite - Techniques générales	26
7.2 Conduite - Monter une marche	26
7.3 Conduite - Descendre une marche	27
7.4 Conduite - Pente	28
7.5 Conduite - Monter un escalier	28
7.6 Conduite - Descendre un escalier	29
7.7 Transfert	29
7.8 Point d'équilibre	30
7.9 Soulèvement du fauteuil	31
8. ENTRETIEN	32
8.1 Entretien	32
8.2 Nettoyage et lavage	32
9. GUIDE DE DÉPANNAGE	33
10. TESTS ET GARANTIE	34
10.1 Tests	34
10.2 Garantie	34
10.3 Réclamation	35
10.4 Garantie de fourniture des pièces de rechange	35
10.5 Réglages spéciaux/adaptations	35
10.6 Combinaison à d'autres produits	35
10.7 Entretien et réparation	35
11. DIMENSIONS ET POIDS	36

1. INTRODUCTION

Le Netti III XHD est un fauteuil roulant de confort conçu pour être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Chez Alu Rehab, nous pensons que le choix d'un fauteuil roulant doit être le fruit d'une évaluation minutieuse des besoins de l'utilisateur et des contraintes liées à l'environnement.

C'est pourquoi il est important de connaître les possibilités offertes et les restrictions imposées par le fauteuil roulant. Le Netti III XHD est un fauteuil roulant conçu pour les utilisateurs qui requièrent confort et réduction des pressions. L'association du système d'assise et des solutions ergonomiques utilisées dans la construction du châssis offre de nombreuses possibilités d'adaptation et de réglage.

Le fauteuil roulant est conçu pour être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur et permet de varier la position d'assise (activité vers repos) à l'aide des fonctions de basculement et d'inclinaison.

Charge maximale autorisée : 200 kg.

⚠ Lors du montage d'accessoires tels que le dispositif de motorisation etc. le poids des accessoires doit être déduit de la charge maximale autorisée.

i Les spécifications varient selon les pays.



1.1 Domaines d'utilisation, indications concernant le Netti III XHD

Le Netti III XHD est un fauteuil roulant multifonctionnel destiné aux personnes à mobilité réduite ou immobilisées souffrant d'une incapacité physique et/ou mentale. Les raisons d'une telle incapacité peuvent être multiples. Grâce à la fonction de réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier, le Netti III XHD permet de modifier aisément la position de l'utilisateur, d'assurer sa mobilisation ou de corriger sa posture (stabilisation) en présence de l'un des troubles fonctionnels suivants, et ce quelle qu'en soit la cause :

- mobilité réduite ou immobilité
- force musculaire réduite ou défaillante
- capacité réduite
- stabilité réduite ou défaillante au niveau du tronc et du corps
- hémiplégie
- troubles rhumatismaux
- blessures cranio-cérébrales
- amputations
- autres troubles neurologiques ou gériatriques

1.2 Qualité et durée de vie

La durée de vie du fauteuil roulant est avant tout déterminée par le type d'incapacité dont souffre l'utilisateur et le niveau d'entretien. Elle varie donc en fonction de ces deux facteurs.

1.3 Environnement et élimination

Alu Rehab et ses fournisseurs souhaitent protéger l'environnement.

Autrement dit :

- Dans la mesure du possible, nous évitons de mettre en œuvre des substances et des processus nuisibles à l'environnement.
- Les produits Alu Rehab possèdent une longue durée de vie et offrent un haut niveau de flexibilité, ce qui présente un avantage tant en termes environnementaux qu'économiques.
- Les emballages peuvent être entièrement recyclés.
- Le fauteuil roulant a été conçu pour pouvoir être démonté en fonction des différents matériaux qui le composent afin de faciliter le recyclage.



-  Contactez votre agent de recyclage local pour connaître la marche à suivre dans votre région.

1.4 Informations relatives à la réutilisation

Tous les produits Alu Rehab sont conçus pour fonctionner sans entretien pendant de nombreuses années. Ils peuvent être adaptés par un revendeur agréé en vue de leur réutilisation. Afin de garantir les performances et la sécurité, Alu Rehab recommande de procéder aux essais mentionnés ci-après avant toute réutilisation.

Veillez contrôler le fonctionnement, l'intégrité, etc. des composants ci-après et les remplacer selon les besoins :

- Roues (bande de roulement)
- Châssis du fauteuil roulant
- Coussins
- Moyeux
- Fonctionnement des freins
- Stabilité directionnelle des roues
- Axes de roues et roues directrices

Veillez également lire les informations contenues au point 9.2 Entretien.

Dispositifs anti-bascule

Correctement monté, les dispositifs anti-basculer empêchent le fauteuil de basculer vers l'arrière. Nous recommandons vivement l'utilisation des dispositifs anti-basculer.

1.5 À propos du présent guide

Afin de ne pas endommager le fauteuil roulant Netti III XHD lors de son utilisation, veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer à utiliser le fauteuil.



Symbole indiquant des actions interdites. Aucune réclamation en garantie n'est acceptée en cas d'exécution de telles actions.



Symbole indiquant un avertissement. L'utilisation de ce symbole indique que la prudence est requise.



Symbole indiquant une information importante.



Symbole indiquant des conseils utiles.



Symbole indiquant l'utilisation d'outils.

1.6 Dimensions de base

Le Netti III XHD est un fauteuil roulant de confort conçu pour être utilisé à l'extérieur comme à l'intérieur.

i Les spécifications varient selon les pays.

Poids total : 35 kg

(fauteuil d'une largeur de 450 mm)



Largeur d'assise :

500, 550, 600, 650, 700, 750 mm

Profondeur d'assise :

(du coussin de dossier à l'avant de la plaque d'assise)



400, 425, 450, 475, 500 mm

Hauteur d'assise :

(du sol jusqu'à la partie supérieure de la plaque d'assise en utilisant des roues motrices de 24" dans la position du trou supérieur)



450 mm*

* En changeant la position des roues motrices, il est possible d'obtenir une hauteur d'assise de 480 mm.

Spécification	min.	max.
Longueur totale avec relève-jambes	1 000 mm	-
Largeur totale	790 mm	-
Longueur fauteuil plié	760 mm	-
Largeur fauteuil plié	710 mm	-
Hauteur fauteuil plié	510 mm	-
Poids total	36,2 kg	-
Poids de l'élément le plus lourd	3,8 kg	-
Stabilité statique en montée	0°	15°
Inclinaison de l'assise	-9°	16°
Profondeur réelle de l'assise	400 mm	500 mm
Largeur réelle de l'assise	460 mm	710 mm
Hauteur de la surface d'assise à l'avant	450 mm	480 mm
Inclinaison du dossier	86°	133°
Hauteur du dossier	480 mm	-
Distance des palettes à l'assise	280 mm	770 mm
Inclinaison des relève-jambes	105°	182°
Distance de l'accoudoir à l'assise	185 mm	325 mm
Emplacement avant de la structure de l'accoudoir	295 mm	455 mm
Diamètre de la main courante	525 mm	-
Règlage horizontal de l'axe de roue	-10 mm	95 mm

Largeur du modèle : 55 cm
Mesure sans coussins.

Hauteur du dossier :

480 mm*



* L'utilisation de l'extension de dossier permet une hauteur de 600 mm

2. GUIDE SUCCINCT

Cette page propose un résumé de l'intégralité du guide. Vous y trouverez une description brève de l'utilisation et de l'entretien du fauteuil roulant Netti III XHD.

⚠ Le guide succinct ne remplace pas le mode d'emploi. Il s'agit d'une simple liste de rappel/contrôle.


- Déballez le fauteuil roulant (voir point 6.1).
- Montez les roues motrices (voir point 6.2).
- Montez les roues directrices (voir point 6.4).
- Redressez le dossier, montez le vérin d'inclinaison du dossier sur le dossier à l'aide de la goupille (voir point 6.7).
- Montez les accoudoirs (voir point 6.11).
- Montez les coussins (voir point 6.12).
- Montez les relève-jambes (voir point 6.14).
- Réglez les poignées de poussée (voir point 6.16).
- Montez l'appui-tête (voir point 6.15).
- Montez les accessoires. (voir point 5 pour de plus amples informations. Les instructions de montage sont fournies avec les accessoires).

i Pour consulter le guide de dépannage, se reporter au point 8.
Pour le réglage, se reporter au point 6.

- ⚠** Conduisez le fauteuil avec prudence !
- ⚠** Tenez compte du fait que le frottement exercé sur les mains courantes peut échauffer la surface.
- ⚠** L'eau salée peut augmenter le risque de corrosion. Aucune autre précaution relative aux conditions environnementales n'est requise.
- ⚠** Lorsque le fauteuil est basculé vers l'arrière, il faut toujours utiliser les dispositifs anti-bascule et les freins.
- ⚠** Veillez à verrouiller les poignées correctement.
- ⚠** Le dispositif anti-bascule doit toujours être utilisé afin de garantir la sécurité de l'utilisateur.
- ⚠** La température de surface des éléments métalliques de la structure du châssis peut augmenter lors d'une exposition directe au soleil.
- ⚠** Ne vous tenez jamais debout sur les relève-jambes à cause du risque de basculement.
- ⚠** Ne soulevez jamais le fauteuil roulant par les relève-jambes ou les accoudoirs.
- i** La configuration du produit peut varier selon les pays.
- i** Pour les personnes malvoyantes, les guides et les catalogues sont disponibles au téléchargement à l'adresse www.alurehab.com.
- 👍** En cas de doutes, contactez votre revendeur !

3. DESCRIPTION*

1. Appui-tête
2. Coussin de dossier
3. Accoudoir avec manchette
4. Coussin d'assise
5. Protège genou
6. Fixation de l'appui-mollet
7. Appui-mollet
8. Démontage rapide de la fourche avant
9. Fourche avant
10. Roues directrices
11. Relève-jambes
12. Palette
13. Vis de réglage de la hauteur
14. Goupille des palettes
15. Vis de réglage de l'inclinaison
16. Fixation de la fourche avant
17. Frein
19. Roue motrice avec main courante
20. Axe à démontage rapide
21. Dispositif anti-bascule
22. Poignée de poussée
23. Poignée de déverrouillage des poignées de poussée

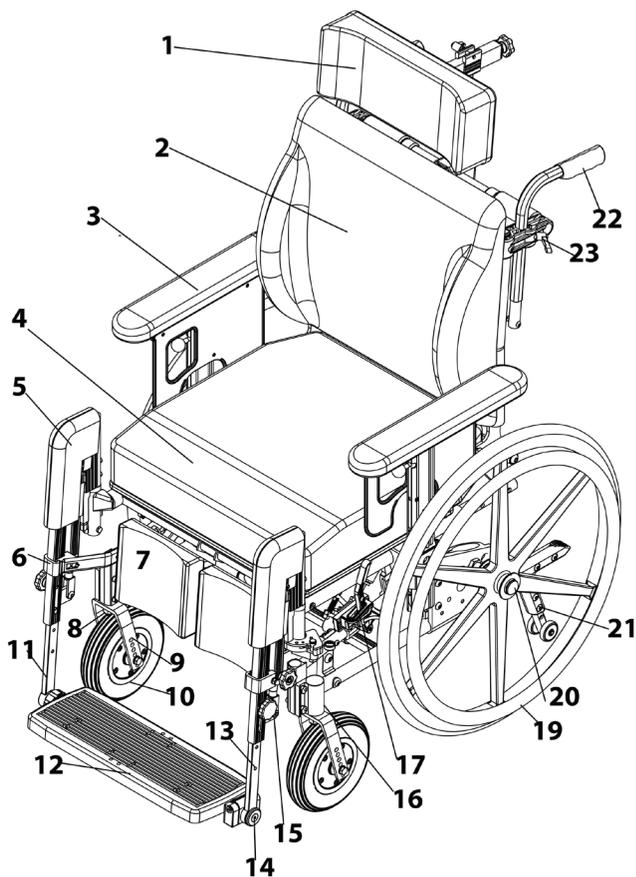

* Il est à noter que les spécifications peuvent varier selon les pays.



Si l'une de ces pièces est manquante, contactez votre revendeur.



Pour de plus amples informations, adressez-vous à votre revendeur.

4. CARACTÉRISTIQUES DU NETTI III XHD

Equipement standard

Assise

- Coussin d'assise de prévention d'escarres
- Basculement de -11° à +14°
- Hauteur réglable de 40 cm à 48,5 cm
- Profondeur réglable de 10 cm

Roues*

- Roues motrices 24 x 1 3/8" avec frein tambour, à bandage avec axe à démontage rapide
- Main courante : aluminium
- Roues directrices de 7" large. À bandage flexel avec axe à démontage rapide.

Dossier

- Inclinaison : 88° - 130°
- Hauteur : 50 cm
- Le coussin de dossier comprend un support lombaire intégré et est réglable en hauteur.
- Poignées de poussée réglables en hauteur et amovibles.

Relève-jambes

- Relève-jambes inclinable
- Palettes réglables en hauteur et inclinables

Accoudoir

- Réglable en hauteur et amovible
- Manchettes réglables en profondeur

Appui-tête

- Réglable en hauteur, en profondeur et en rotation
- Amovible

Accessoires/Options

Assise

- Table de thérapie et table de lecture pour tablettes (voir point 5)
- Ceintures ventrales et harnais et ceinture 2 points (voir point 5)

Roues

- Protège-rayons (voir point 5)

Dossier

- Extension de dossier (voir point 5)
- Support lombaire et biseau dorso lombaire (voir point 5)
- Différents coussins de dossier

Relève-jambes

- Support amputation (voir point 5)
- Repose-genou/cuisse (voir point 5)

Accoudoir

- Différentes manchettes (voir point 5)
- Accoudoir pour personnes hémiplégiques et coussin rondin pour personnes hémiplégiques (voir point 5)

Appui-tête

- Différents modèles (voir point 5)

5. ACCESSOIRES

Ceintures

Plusieurs modèles :
Ceintures ventrales
et harnais avec ou
sans rembourrage et
avec attache plastique
ou « auto » (pour le
montage, se reporter
aux points 5.1 et 5.2).



Barre de fixation harnais

A monter sur les poignées
de poussée. Disponibles
en deux tailles avec barre
télescopique. (voir point 5.2)



Tablettes de thérapie

3 modèles :
escamotables, verrouillables
et standard à « coulisser »



Table de lecture



Coin rembourré pour tablette.

Offre un appui souple
pour le bras reposant sur
la tablette ou la table de
thérapie.



Demi-tablette

Demi-tablette rembourrée
escamotable. La tablette ou table
de thérapie remplace l'accoudeur
standard existant.



Biseau dorso lombaire

Renforce le maintien
du tronc.



Support lombaire

Renforce la courbure
lombaire.



Rallonge de frein

90 mm
120 mm
250 mm



Vital Base Integral

Plaque pelvienne avec
décharge ischiatique.



Coussins d'assise

Différents modèles.
Veuillez contacter votre
revendeur.



Coussins de dossier

Différents modèles.
Veuillez contacter votre
revendeur.



Protège-rayons

Pour roues 20", 22" et
24". Coloris noir ou
transparent en option.



Caisson de pied
Rembourré



Coussin confort pour la tête

Coussin avec rembourrage Kospoflex à poser sur l'appui-tête.



Relève-jambes :

Support amputation



Extension de dossier

Extension de 12 cm.
À utiliser avec le coussin de dossier 60 cm.



Cale d'adduction
Le support réduit l'adduction



Manchettes d'accoudoir

Larges : 415 x 80 mm
Longues : 445 x 70 mm
Longues/larges : 525 x 60 mm
Courtes : 333 x 58 mm
Standard : 385 x 58 mm
Manchette d'accoudoir incurvée 525 x 80 mm



Plot d'abduction
Le plot réduit l'abduction

Étroit : Largeur 80 mm
Moyen : Largeur 120 mm
Large : Largeur 140 mm



Accoudoir gouttière pour personnes hémiplegiques

Offre un support supplémentaire au bras atteint.
Peut être réglé en rotation et deux positions fixes



Appui-têtes

Support C, large
Support A, maintien latéral
Support B, petit



Coussin rondin pour personnes hémiplegiques

Coussin confortable se posant sur les cuisses pour personnes hémiplegiques.



Housse lavable

Protège le corps de l'appui-tête



Cales de bassin

A fixer au protège vêtement. Permet de stabiliser le bassin pression 2,5 cm; 3,5 cm et 4,5 cm



Coussin oreiller pour la tête

Coussin 40 x 40 cm avec rembourrage Kospoflex et ruban élastique.



Appui-mollet escamotable

L'utilisateur ne doit pas soulever les jambes lors du montage ou démontage du relève-jambes.



Repose-pieds monobloc verrouillable

Les relève-jambes peuvent être escamotés sur le côté comme les relève-jambes standard.



Cale-tronc de correction

Conçu pour corriger les mauvaises positions du tronc supérieur.



Grande profondeur d'assise

Pour les profondeurs d'assise suivantes : 54,5, 57 et 59,5 cm. À utiliser avec une tête de verrouillage de vérin de dossier extra-longue.



Coussinets pour tige de cale-tronc de correction



Cale-tronc stable

Conçu pour les personnes présentant une stabilité réduite au niveau du tronc supérieur. Pour un fonctionnement optimal, combinez-le à un coussin de dossier STABIL ou SUPERSTABIL



Extension de châssis

Augmente l'écart entre les roues motrices et les roues directrices. Réduit les risques de basculement.



Rembourrage pour tige d'appui-mollet

Protège les appuis.



Coussinet pour cale-tronc Stable



Trousse à outils



5.1 Assemblage de la ceinture abdominale

Illustration 1

- Faites passer la ceinture à travers la patte de fixation de la ceinture abdominale.

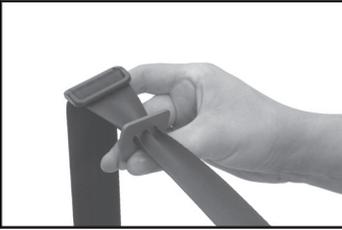


Illustration 1

Illustration 2

- Faites repasser la ceinture dans la boucle de ceinture.



Illustration 2

Illustration 3

- Fixez la patte de fixation de la ceinture abdominale dans le dernier trou à l'arrière de l'équerre du dossier à l'aide de vis et écrous fournis.

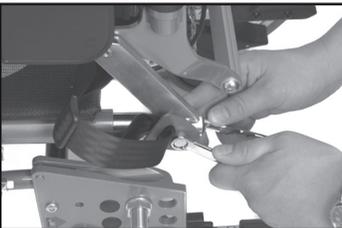


Illustration 3

- ✂ 2 clés plates de 13 mm.

5.2 Assemblage du harnais

Illustration 1

- Retirez les poignées de poussée et glissez la barre de fixation harnais sur les poignées de poussée en partant du bas.



Illustration 1

Illustration 2

- Fixez les poignées de poussée dans la bonne position et verrouillez-les fermement. Fixez ensuite la barre à la position/hauteur requise. La hauteur doit être au niveau des épaules de l'utilisateur.



Illustration 2

Illustration 3

- Faites passer le harnais par les rouleaux et fixez-le en l'enfilant dans l'attache. Réglez le harnais à la longueur requise.



Illustration 3

6. ASSEMBLAGE ET RÉGLAGE



6.1 Déballage

1. Déballer tous les éléments et vérifiez qu'il n'en manque aucun sur la base de l'équipement standard.
2. Montez les roues motrices et les roues directrices.
3. Montez le dossier, les accoudoirs, les coussins et les relève-jambes.
4. Montez les accessoires.

Poids des composants (fauteuil de 55 cm de large) :

Roues motrices : 1,9 kg pièce

Roues directrices : 0,8 kg pièce

Relève-jambes inclinable : 2,5 kg pièce

Dossier Uno : 1,25 kg

VB Sit : 1 kg

Appui-tête A : 1 kg

Appui-tête C : 0,9 kg

Les outils requis sont décrits dans chaque point. Les accessoires mentionnés au point 5 sont des options et vous seront fournis avec des instructions d'assemblage séparées.

6.2 Roues motrices

Pour monter la roue motrice, retirez la douille de l'axe à démontage rapide du porte-axe, faites-le passer par le centre de la roue motrice et dans le porte-axe tout en appuyant au centre du bouton.



- ⚠ Pour vérifier que la roue motrice est correctement fixée au moyeu, enlevez votre doigt du bouton central et tirez sur la roue motrice.
- ⚠ Si la roue motrice ne se bloque pas, n'utilisez pas le fauteuil roulant et contactez votre revendeur.
- ⚠ Le sable et l'eau de mer (ainsi que le sel d'épandage) peuvent endommager les axes des roues motrices. Nettoyez soigneusement le fauteuil roulant lorsqu'il a été exposé à l'un de ces éléments.

6.3 Fourche avant

De série, les fourches avant sont dotées d'axes à démontage rapide. La fourche avant s'enlève facilement en appuyant sur le bouton qui se trouve au centre au-dessus de la roue.

- 👍 Contrôlez l'inclinaison du porte-axe des roues. (voir point 6.5).



6.4 Roues directrices

Retrait

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sous la fourche avant.



Montage

- Insérez l'axe à démontage rapide dans le porte-axe. Tirez légèrement sur la fourche afin de vous assurer qu'elle est bien verrouillée.



- ⚠ Le Netti III XHD doit être équipé de fourches avant larges et de roues directrices larges flexel de 7".
- ⚠ Le sable et l'eau de mer (ainsi que le sel d'épandage) peuvent endommager les axes des roues motrices. Nettoyez soigneusement le fauteuil roulant lorsqu'il a été exposé à l'un de ces éléments.

6.5 Hauteur sol siège à l'avant

La hauteur sol siège dépend de :

- La taille des roues directrices.
- La taille de la fourche avant.
- Contrôlez l'inclinaison du porte-axe des roues.

Pour changer les roues directrices ou les fourches avant, retirez la roue et placez-la dans la position requise sur la fourche avant.

- ⚠ La hauteur du porte-axe n'est pas réglable.
- ⚠ Contrôlez la position du dispositif anti-bascule.

6.6 Hauteur sol siège à l'arrière

La hauteur sol siège à l'arrière dépend de :

- La taille des roues motrices.
- La position des roues motrices.

Roue motrice

Démontez le porte-axe (y compris la rondelle et l'écrou) et montez-le dans la position requise sur la fixation de la roue motrice.

 2 clés plates de 24 mm.

 Si vous modifiez les hauteurs sol siège, assurez-vous que les roues motrices sont positionnées de telle sorte que le tube inférieur du châssis soit parallèle au sol.

 Le risque de basculement augmente lorsque la roue motrice est plus avancée dans la fixation de la roue motrice.

 Contrôlez la position du dispositif anti-bascule.

 Réajustez les freins. (voir point 6.17).

 Réajustez l'angle de chasse (règlage des fourches de chaque roue directrice). (voir point 6.5)

 Veillez à ce que l'écrou situé à l'intérieur du châssis épouse totalement l'axe de la roue.

6.7 Dossier

- Dépliez et soulevez le dossier et montez le vérin dans son fourreau.
- Verrouillez le dossier en poussant la goupille à travers le fourreau et la tête de vérin par le côté.



6.8 Réglage de la profondeur d'assise arrière


La profondeur d'assise peut être réglée de 10 cm à l'arrière et de 10 cm à l'avant.

Réglage de la profondeur d'assise arrière :

- L'équerre du dossier est dotée de 5 trous espacés de 2,5 cm.
- La profondeur d'assise peut être réglée entre 40 et 50 cm (mesurée de l'avant de la plaque d'assise au tube du dossier, sans coussin de dossier).
- Sur le châssis sous le fauteuil se trouve une tête de verrouillage supplémentaire pour le vérin de dossier.
- La tête de verrouillage courte couvre les profondeurs d'assise de 40 cm, 42 cm et 45 cm.
- La tête de verrouillage longue couvre les profondeurs d'assise de 45 cm, 47,5 cm et 50 cm (il existe également un modèle grande profondeur d'assise qui couvre les profondeurs d'assise encore plus importantes). (voir point 5).



- Lorsque vous modifiez la position de l'équerre du dossier, n'oubliez pas de modifier également la position du vérin sous le fauteuil à l'avant. Le support est doté de 3 trous. Lorsque l'équerre du dossier est réglé en position minimale, le vérin à gaz est placé dans le trou le plus en avant à l'aide de la tête de verrouillage courte. Pour chaque position supérieure de l'équerre du dossier, reculez le vérin à gaz d'un trou. Lorsque le ressort à gaz atteint le dernier trou possible avec la tête de verrouillage courte, utilisez la tête de verrouillage longue et recommencez à partir du premier trou.

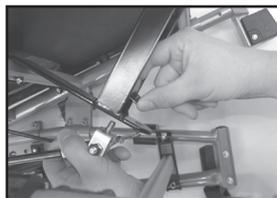

 2 clés plates de 24 mm.

 Si vous utilisez la plaque d'assise confort, il est recommandé de changer de plaque d'assise lorsque vous modifiez la profondeur d'assise.

 L'utilisation des sangles de réglage dossier à l'arrière peut vous permettre de gagner quelques cm en profondeur.

Pour régler la profondeur d'assise à l'arrière, procédez comme suit :

- Libérez le vérin à gaz en basculant l'assise à fond vers l'avant.
- Ôtez la goupille du dossier et avancez le dossier sur l'assise.
- Retirez les vis qui maintiennent l'équerre du dossier et réglez le dossier dans la position requise. Réglez les deux côtés en même temps.
- Remettez les vis en place et serrez-les.
- N'oubliez pas de déplacer le vérin tel que décrit plus haut dans le présent point.

 Lors du réglage de la profondeur d'assise arrière, la vis de l'équerre du dossier doit être serrée à 14 Nm.

 Clé hexagonale (Allen) de 6 mm.
Clé plate de 13 mm.

 Si l'utilisateur souhaite bénéficier d'inclinaisons différentes des valeurs standard, il est possible de modifier la position du vérin à trois niveaux (sous le fauteuil, à l'avant).

 Lorsque vous modifiez la profondeur d'assise, vous modifiez également le point de basculement du fauteuil. Pour prévenir ce problème, changez la position de la roue motrice au niveau de la fixation de la roue motrice. (voir point 6.6).

6.9 Réglage de la profondeur d'assise avant

La profondeur d'assise avant peut être réglée jusqu'à 10 cm. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Retirez la vis qui maintient le support de potence du relève-jambes.
- Réglez le support de potence sur la position requise.
- Serrez les vis à 25 Nm.



 Clé hexagonale (Allen) de 6 mm.

 En réglant les supports de potence dans différentes positions, vous pouvez compenser les problèmes de bassin tordu ou les différences de longueurs de cuisses.

6.10 Dispositifs anti-bascule

- Réglez chaque dispositif anti-bascule de sorte à ce qu'il ne dépasse pas le rayon de la roue.
- Tirez sur chaque dispositif anti-bascule pour les dégager du châssis.
- Faites-le tourner à 180°.
- Avancez-le pour le verrouiller en position sous l'effet de la tension du ressort.



- i** À la livraison, les dispositifs anti-bascule sont réglés selon les dimensions des roues motrices commandées en position standard. Si d'autres réglages sont effectués, les dispositifs anti-bascule doivent être réglés en conséquence.

Réglage des dispositifs anti-bascule

Le réglage des dispositifs anti-bascule doit être modifié lorsque la position ou les dimensions des roues motrices changent.

Correctement réglés, les dispositifs anti-bascule doivent être positionnés juste à l'intérieur du rayon des roues motrices. Pour régler les dispositifs anti-bascule, procédez comme suit :

- Desserrez l'attache de la barre du dispositif anti-bascule à l'aide d'une clé hexagonale.
- Tirez ou poussez la barre en position requise.
- Fixez l'attache.
- Faites de même de l'autre côté.

⚙ Clé hexagonale (Allen) de 6 mm.

- ⚠** Vérifiez que les deux dispositifs anti-bascule présentent la même longueur. L'écart entre les roues du dispositif anti-bascule et le sol doit être de 3 mm maximum.

- ⚠** S'il dépasse des roues motrices à l'arrière, le dispositif anti-bascule entravera la manipulation du fauteuil dans les virages et sur les escaliers.

- ⚠** Les dispositifs anti-bascule doit toujours être utilisé afin de garantir la sécurité de l'utilisateur.

6.11 Réglage des accoudoirs

- Tournez la poignée de déverrouillage sur le côté et maintenez-la dans cette position.
- Réglez l'accoudoir à la hauteur requise et relâchez la poignée. Soulevez ou abaissez légèrement l'accoudoir jusqu'à ce qu'il se verrouille.



- 👍** La manchette de l'accoudoir et la vis de blocage sont placées en position centrale. Ce réglage peut être adapté aux besoins de l'utilisateur.

- ⚠** Sur le Netti III XHD, il faut utiliser les manchettes pour accoudoirs larges.

6.12 Coussins


Les coussins sont fixés au fauteuil roulant et réglés à l'aide de velcro.



- 👍** Il est impératif de régler le coussin correctement afin de garantir un bon confort d'assise.

- 👍** Les housses des coussins sont lavables et réutilisables. Suivez les instructions d'entretien et de lavage mentionnées à l'arrière du coussin.

6.13 Réglage du dossier réglable en tension

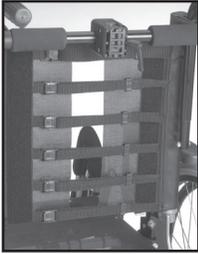

- Desserrez les sangles et placez le coussin de dossier de sorte que l'utilisateur ait suffisamment d'espace pour placer la partie inférieure et le support lombaire intégré dans la bonne position.
- Serrez les sangles afin qu'elle suivent la courbure de la colonne vertébrale et offrent un petit appui supplémentaire à la partie supérieure du sacrum.

6.14 Relève-jambes

Le relève-jambes réglable est inclinable, escamotable et amovible. Il est fourni avec un appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur. Les palettes sont articulées et réglables en rotation en continu. De série, les palettes sont dotées d'un système de verrouillage qui les renforce (voir illustration page 21). Pour retirer le l'axe de verrouillage, utilisez une pince à clips.



Le Netti III XHD peut être équipé des relève-jambes suivants :

- Support amputation (voir illustration au point 5).

Montage du relève-jambes :

- Soulevez le relève-jambes de quelques degrés.
- Repliez les palettes.
- Tenez le relève-jambes par l'angle supérieur et placez-le dans le support de potence en formant un angle identique à celui illustré ci-dessous.
- Poussez le relève-jambes vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.



⚠ Risque de pincement lors du réglage de l'angle du relève-jambes.



Hauteur de la palette :

La hauteur des palettes est réglable en continu.

- Desserrez la vis de réglage afin que le tube de palette puisse se mouvoir librement.
- Réglez la palette à la hauteur souhaitée et resserrez la vis.



Inclinaison de la palette :

- Desserrez la vis comme illustré ci-dessous à l'aide d'une clé hexagonale (Allen).
- Réglez la palette selon l'inclinaison requise et resserrez la vis.



 Clé hexagonale (Allen) de 5 mm.

 Une molette de réglage peut être utilisée en remplacement de la vis (option).

Verrouillage et déverrouillage des palettes

- Les palettes sont dotées d'un système de verrouillage qui les renforce.

- Pour verrouiller les palettes, tirez sur la pièce de verrouillage de la palette de droite et placez le verrouillage sur la tige de la palette de gauche.
- Pour déverrouiller la palette, tirez sur la pièce de verrouillage de la palette dans le sens de la flèche et soulevez la palette de droite.



 Pendant le réglage, aucune charge ne peut être exercée sur les palettes.

 Si le fauteuil est utilisé à l'extérieur, la distance entre la palette et le sol doit être de 4 à 5 cm.

 Ne vous tenez jamais debout sur les palettes à cause du risque de basculement.

 Lorsque vous procédez au réglage de l'inclinaison du relève-jambe, tenez compte du risque de pincement au niveau des éléments mobiles.


Retrait du relève-jambes :

- Tirez la pièce de verrouillage de la palette vers l'arrière dans le sens de la flèche, de façon à libérer la tige. Chaque palette peut être relevée.
- Relevez le relève-jambes de quelques degrés.
- Faites pivoter le relève-jambes vers l'extérieur.
- Soulevez et retirez le relève-jambes (voir illustration page suivante).



Réglage de l'appui-mollet L'appui-mollet est réglable en hauteur et en profondeur. Pour régler la hauteur, desserrez l'écrou qui se trouve à l'extérieur de la fixation de l'appui-mollet, sélectionnez la hauteur requise et refixez l'écrou (III. 6.14 A).

 Clé plate de 10 mm.

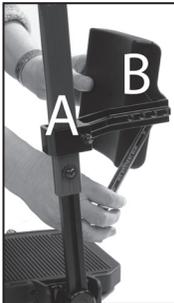

III. 6.14


Pour procéder au réglage de la profondeur, enlevez l'appui-mollet du support en insérant une clé plate entre le coussinet et le support. Sélectionnez la position souhaitée et refixez-le (III. 6.14 B).

 Clé plate de 13 mm.

 Ne vous tenez jamais debout sur les relève-jambes !

 Ne soulevez jamais le fauteuil roulant par les relève-jambes.

6.15 Appui-tête

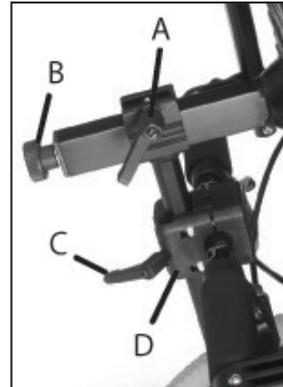

A - Levier de réglage de la profondeur
B - Molette de réglage de la rotation
C - Levier de réglage de la hauteur
D - Support de l'appui-tête



- Placez l'écrou carré dans la rainure du support de l'appui-tête comme illustré ci-dessus.
- Placez l'appui-tête dans le support de l'appui-tête.
- Réglez la hauteur et la profondeur de l'appui-tête dans les positions requises et serrez les vis.



- Le support de l'appui-tête est fixé en serrant les quatre vis deux à deux en croix afin de répartir la force de serrage équitablement sur les quatre vis.

Réglage de la profondeur de l'appui-tête :

- Libérez le levier de verrouillage situé sur la partie supérieure de la barre verticale (A).
- Réglez l'appui-tête et fixez-le dans la position requise.

Réglage de la hauteur de l'appui-tête :

- Libérez le levier de verrouillage situé sur l'adaptateur de l'appui-tête (C).
- Réglez l'appui-tête et fixez-le dans la position requise.

Réglage de l'inclinaison de l'appui-tête :

- Libérez la molette de réglage située à l'arrière de la barre horizontale (B).
- Réglez l'appui-tête et fixez-le dans la position requise.

Réglage latéral de l'appui-tête :

- L'adaptateur de l'appui-tête peut être déplacé vers la droite ou vers la gauche afin de répondre aux besoins particuliers en terme de maintien de tête (déviance latérale).
- Desserrez les quatre vis qui maintiennent le support d'appui tête et la vis pointeau.
- Placez l'adaptateur dans la position requise et refixez-le en resserrant les vis en croix, ainsi que la vis pointeau.

⚠ N'oubliez pas de dévisser les leviers lorsque vous procédez au réglage de l'appui-tête.

i Si la barre de l'appui-tête ne s'adapte pas parfaitement au support, alors ce dernier est probablement trop serré ou fixé de travers.

i Une fois l'appui-tête monté, fixez-le correctement en serrant la petite vis pointeau de réglage qui se trouve au centre du support de l'appui-tête à l'aide d'une clé hexagonale (Allen).

👍 Si l'appui-tête vous semble trop bas, vous pouvez le faire pivoter de 180° en libérant la molette de réglage qui se trouve à l'arrière de la barre horizontale (B).

6.16 Poignées de poussée

Réglage des poignées de poussée :

- Desserer le levier sur le côté et soulevez complètement la poignée.
- Orientez la poignée dans la position souhaitée.
- Réglez la hauteur.
- Verrouillez la poignée dans la position souhaitée en serrant le levier.



- ⚠ Veillez à verrouiller la poignée correctement.
- ⚠ Assurez-vous que la vis de sécurité est bien serrée.
- ℹ Pour retirer complètement les poignées, la vis de sécurité située au bas des poignées doit également être retirée.

6.17 Réglage des freins

- Les freins sont réglables en continu le long du tube du châssis.
- Pour actionner le frein, poussez la poignée vers l'avant (III. 6.17.1).



III. 6.17.1

- Pour libérer le frein, tirez la poignée vers l'arrière (III. 6.17.2).



III. 6.17.2

- Pour repositionner le frein, desserrez les deux vis qui se trouvent à l'intérieur du support de frein.



III. 6.17.3.

- Pour affiner le réglage, desserrez la vis supérieure située à l'intérieur des freins.
- Réglez la position du frein et serrez les vis.



III. 6.17.4.

- ⚠ Clé hexagonale (Allen) de 5 mm.
- ⚠ Vérifiez que les freins sont correctement réglés en les activant et assurez-vous que le fauteuil roulant ne se déplace pas.
- ⚠ Les freins sont conçus comme des freins de parking et ne doivent pas être utilisés comme des freins de conduite.
- ⚠ Tenez compte du risque de pincement potentiel entre le frein et le pneu.

Frein tambour

Le fauteuil roulant est équipé de roues motrices dotées de freins tambours.



Si le frein ne freine pas correctement : dévissez la vis de tension de 2 à 4 tours pour régler le câble d'un ou des deux côtés. Recontrôlez les freins.

Si le câble n'est pas suffisamment tendu : Serrez la vis de tension à fond. Tendez le câble en desserrant le serre-câble avant de tirer sur le câble. Resserrez le serre-câble et desserrez la vis de tension.



 1 clé plate de 10 mm

 Pour garantir un fonctionnement correct des câbles, ces derniers ne doivent jamais être tendus.

Utilisation et commande du frein :

Chaque roue est dotée de freins tambours manuels qui permettent à la personne accompagnante de contrôler la vitesse sur les terrains inclinés. Les commandes de freins sont situées sur chaque poignées de poussée.



- Pour commander les freins, tirez les leviers de frein (1) uniformément et délicatement vers la poignée afin d'immobiliser le Fauteuil.
- Pour commander et verrouiller le frein de parking (2) actionnez le levier (1) contre la poignée de poussée et verrouillez le frein à l'aide du doigt. Vérifiez que les deux freins de parking sont verrouillés.
- Pour libérer le frein de parking, appuyez le levier (1) contre la poignée de poussée. Le frein est verrouillé à l'aide d'un ressort qui est alors libéré.

 Il est impératif de verrouiller les freins de parking lorsque vous laissez l'utilisateur assis seul dans le fauteuil roulant.

 Ne laissez pas l'utilisateur dans le fauteuil roulant sans avoir actionné chaque frein de parking.

6.18 Inclinaison/basculement de l'assise

L'inclinaison de l'assise est réglable à l'aide de la poignée de déverrouillage fixée sur la barre de poussée, côté gauche. La partie assise peut être inclinée de -11° à $+14^{\circ}$.




6.19 Inclinaison du dossier

L'inclinaison du dossier est réglée à l'aide de la poignée de déverrouillage fixée sur la barre de poussée, côté droit. L'inclinaison peut être réglée entre 4° vers l'avant et 40° vers l'arrière.

-  Pour garantir un fonctionnement correct des câbles, ces derniers ne doivent jamais être tendus.
-  Ne procédez jamais au réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier sans avoir correctement positionné chaque dispositif anti-basculé au préalable.

Chaque poignée de déverrouillage porte les étiquettes suivantes :

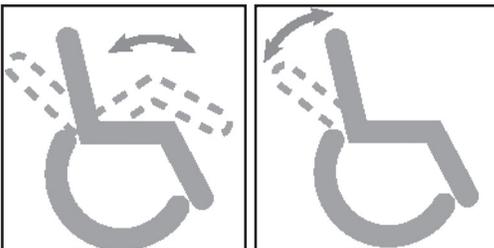

Basculement

Inclinaison

-  Risque de basculement. Contrôlez la position du dispositif anti-basculé.

7. MANIPULATION

7.1 Techniques générales

Le poids et l'équilibre du fauteuil influent sur la facilité de manœuvre de ce dernier. Le poids, la taille et la position d'assise de l'utilisateur sont également des facteurs importants. La position des roues affecte aussi la conduite. Plus les roues motrices sont chargées, plus le fauteuil est facile à manœuvrer. Par contre, si une charge lourde est appliquée sur les roues directrices, le fauteuil sera difficile à manœuvrer.

Personne accompagnante :

Si vous laissez l'utilisateur seul dans le fauteuil roulant, bloquez toujours les freins et assurez-vous que les dispositifs anti-basculé sont abaissés.

Stationnement :

Augmentez la surface d'appui du fauteuil roulant en reculant celui-ci d'environ 10 cm pour vous assurer que les roues directrices sont tournées vers l'avant.

7.2 Techniques de conduite

- Monter une marche -

Monter une marche en marche avant seul :

Cette technique s'adresse uniquement aux utilisateurs chevronnés.

- Vérifiez que le dispositif anti-basculé est relevé.
- Rapprochez le fauteuil de la marche.
- Faites basculer le fauteuil roulant sur les roues motrices afin de soulever suffisamment les roues directrices pour monter sur la marche.
- Saisissez fermement les mains courantes et avancez votre corps tout en tirant.

-  Abaissez le dispositif anti-basculé.

Monter une marche en marche avant avec l'aide d'une personne accompagnante :

- Vérifiez que chaque dispositif anti-bascule est relevé.
- Inclinez le fauteuil roulant vers l'arrière.
- Soulevez les poignées de poussée tout en poussant le fauteuil sur la marche.

⚠ Abaissez chaque dispositif anti-bascule.

Monter une marche en marche arrière seul :

Cette technique n'est valable que si la marche est très basse. Elle dépend également de la distance entre les palettes et le sol.

- Vérifiez que le dispositif anti-bascule est relevé.
- Reculez le fauteuil jusqu'à la marche.
- Saisissez fermement les mains courantes et avancez votre corps tout en tirant.

⚠ Abaissez chaque dispositif anti-bascule.

Monter une marche en marche arrière avec l'aide d'une personne accompagnante :

- Vérifiez que chaque dispositif anti-bascule est relevé.
- Tirez le fauteuil en arrière jusqu'à la marche.
- Inclinez le fauteuil roulant vers l'arrière en soulevant légèrement les roues directrices.
- Tirez pour faire monter le fauteuil roulant sur la marche et reculez suffisamment loin pour pouvoir abaisser les roues directrices sur la marche.

⚠ Abaissez chaque dispositif anti-bascule.



7.3 Techniques de conduite

- Descendre une marche -

Descendre une marche en marche avant seul :

Cette technique s'adresse uniquement aux utilisateurs chevronnés.

- Vérifiez que chaque dispositif anti-bascule est relevé.
- Rapprochez le fauteuil de la marche.
- Saisissez fermement les mains courantes et poussez rapidement vers l'avant afin que le fauteuil roulant retombe sur ses quatre roues en même temps.

⚠ Abaissez chaque dispositif anti-bascule.

Descendre une marche en marche avant avec l'aide d'une personne accompagnante :

- Vérifiez que le dispositif anti-bascule est relevé.
- Inclinez le fauteuil roulant vers l'arrière en soulevant légèrement les roues directrices.
- Descendez prudemment la marche et inclinez le fauteuil roulant vers l'avant pour reposer les roues directrices sur le sol.

⚠ Abaissez chaque dispositif anti-bascule.

Descendre une marche en marche arrière seul :

Cette technique s'adresse uniquement aux utilisateurs chevronnés. Cette technique ne doit pas être utilisée si la hauteur de la marche est supérieure à 10 cm.

- Vérifiez que le dispositif anti-bascule est relevé.
- Reculez le fauteuil roulant jusqu'à la marche.
- Descendez prudemment la marche en marche arrière tout en avançant votre corps afin de maintenir l'équilibre du fauteuil.

⚠ Cette action accroît les risques de basculement vers l'arrière.

⚠ Abaissez chaque dispositif anti-bascule.

Descendre une marche en marche arrière avec l'aide d'une personne accompagnante :

- Vérifiez que chaque dispositif anti-bascule est relevé.
- Reculez le fauteuil roulant jusqu'à la marche.
- Descendez prudemment la marche et inclinez le fauteuil vers l'arrière sur les roues motrices jusqu'à ce que les roues directrices soient dégagées de la marche.
- Abaissez les roues directrices sur le sol.

⚠ Abaissez chaque dispositif anti-bascule.

7.4 Techniques de conduite - Pente -

Conseils importants pour prévenir tout risque de basculement en cas de déplacement sur une surface en pente.

- ⚠ Évitez de tourner le fauteuil roulant en plein milieu d'une pente.
- ⚠ Conduisez toujours aussi droit que possible.
- ⚠ Mieux vaut demander de l'aide que de prendre des risques.

Monter une pente :

Avancez votre tronc afin de maintenir l'équilibre du fauteuil.

Descendre une pente :

Reculez votre tronc afin de maintenir l'équilibre du fauteuil. Contrôlez la vitesse du fauteuil en saisissant les mains courantes. N'utilisez pas les freins.



7.5 Techniques de conduite - Monter un escalier -

- ⚠ Demandez toujours de l'aide.
- ⚠ N'utilisez jamais les escaliers roulants, même si vous êtes assisté par une personne accompagnante.

En marche arrière, avec de l'aide :

- Vérifiez que le dispositif anti-bascule est relevé et que les poignées de poussée sont fixées correctement.
 - Reculez le fauteuil roulant jusqu'à la première marche de l'escalier.
 - Inclinez le fauteuil roulant vers l'arrière sur les roues motrices.
 - Montez doucement l'escalier, une marche à la fois, tout en maintenant le fauteuil roulant en équilibre sur les roues motrices.
 - Une fois arrivé en haut de l'escalier, reculez le fauteuil roulant suffisamment loin pour pouvoir abaisser les roues directrices sur le sol en toute sécurité.
- ⚠ Abaissez chaque dispositif anti-bascule.

 En présence de deux personnes accompagnantes, l'une peut aider l'autre en soulevant le fauteuil roulant par l'avant du châssis.

 Ne soulevez pas le fauteuil roulant en le tenant par les relève-jambes.

 Ne soulevez pas le fauteuil roulant en le tenant par les accoudoirs.

 Les personnes accompagnantes doivent utiliser la force de leurs jambes afin d'éviter de surcharger inutilement leur dos.

7.6 Techniques de conduite - Descendre un escalier -

 N'utilisez jamais les escaliers roulants, même si vous êtes assisté par une personne accompagnante.

En marche avant, avec de l'aide :

- Vérifiez que chaque dispositif anti-bascule est relevé et que les poignées de poussée sont fixées correctement.
 - Avancez le fauteuil roulant jusqu'à la première marche de l'escalier.
 - Inclinez le fauteuil roulant vers l'arrière sur les roues motrices.
 - Saisissez fermement les poignées de poussée et maintenez l'équilibre sur les roues motrices en franchissant une marche à la fois.
 - Une fois arrivé en bas de l'escalier, abaissez les roues directrices sur le sol en toute sécurité.
-  Abaissez chaque dispositif anti-bascule.

 En présence de deux personnes accompagnantes, l'une peut aider l'autre en soulevant le fauteuil roulant par l'avant du châssis.

 Ne soulevez pas le fauteuil roulant en le tenant par les relève-jambes.

 Ne soulevez pas le fauteuil roulant en le tenant par les accoudoirs.

7.7 Transfert

Les personnes appelées à appliquer les techniques de transfert au départ et vers le fauteuil roulant doivent se familiariser avec ces dernières. Voici quelques conseils importants en termes de préparation du fauteuil :

Avec ou sans personne accompagnante - latéralement.

Préalablement au transfert :

- Le fauteuil roulant doit être positionné aussi près que possible de la destination du transfert.
- Reculez le fauteuil roulant de 5-10 cm afin d'orienter les roues directrices vers l'avant.
- Verrouillez les freins.
- Retirez le relève-jambes et l'accoudoir du côté du transfert.

Avec ou sans personne accompagnante - vers l'avant.

Préalablement au transfert :

- Le fauteuil roulant doit être positionné aussi près que possible de la destination du transfert.
- Reculez le fauteuil roulant de 5-10 cm afin d'orienter les roues directrices vers l'avant.
- Verrouillez les freins.
- Faites basculer le fauteuil vers l'avant.



À l'aide d'un lift :

Préalablement au transfert dans le fauteuil :

- Faites basculer le fauteuil vers l'arrière.
- Retirez l'appui-tête.
- Retirez les relève-jambes.
- Inclinez légèrement le dossier.
- Remettez les accessoires en place une fois le transfert terminé.



- ⚠ Ne vous mettez jamais debout sur les palettes sans vous assurer au préalable qu'elles touchent le sol. Le fauteuil risque de basculer vers l'avant.

7.8 Point d'équilibre

Pour régler le point d'équilibre, changez la position de la roue motrice au niveau du palier multi position.

- Déplacez le moyeu de la roue motrice et la roue motrice. (voir point 6.6)
- Réglez les freins. (voir point 6.17)



2 clés plates de 24 mm.



Clé hexagonale (Allen) de 5 mm.

Le fait d'avancer les roues motrices facilite la manipulation du fauteuil mais accroît les risques de basculement vers l'arrière.



Le point d'équilibre peut également être modifié en réglant l'inclinaison de l'assise et/ou l'inclinaison du dossier.



Il est recommandé d'utiliser les deux dispositifs anti-basculer.



Vérifiez que les roues motrices et l'axe à démontage rapide sont verrouillés correctement. (voir point 6.2).

7.9 Soulèvement du fauteuil roulant

- Le fauteuil roulant ne doit être soulevé que par le châssis. Un symbole (voir ill. 7.9.1) est apposé à l'endroit où il convient de le soulever.



Ill. 7.9.1

- Ne soulevez jamais le fauteuil roulant par les relève-jambes ou les accoudoirs.
- Ne soulevez jamais le fauteuil roulant lorsqu'un utilisateur y est assis.

8. ENTRETIEN

8.1 Consignes d'entretien

Les fauteuils Netti sont constitués de modules.

Toutes les pièces sont disponibles chez Alu Rehab et donc livrables rapidement. Les instructions de montage sont fournies avec les différentes pièces.

Les pièces destinées à l'utilisateur sont décrites dans les catalogues des pièces de rechange téléchargeables à l'adresse www.eurekamedical.fr. Le cas échéant, il est également possible de démonter ces pièces et de les renvoyer au fabricant/distributeur sur demande.

Les pièces faisant partie de la construction du châssis peuvent uniquement être manipulées par le fabricant ou un service agréé par ce dernier.

- Vous pouvez commander de la peinture d'origine chez Alu Rehab afin de repeindre les égratignures et les petits dommages : contactez votre revendeur pour passer commande.

- En cas de défauts ou de dommages, contactez votre revendeur.
- Contrôlez/réglez les vis et écrous à intervalles réguliers.
- Le sable et l'eau de mer (ainsi que le sel d'épandage) peuvent endommager les axes des roues directrices et des roues motrices. Nettoyez soigneusement le fauteuil roulant après utilisation.
- Nous recommandons de laver le fauteuil roulant dans une salle de lavage à une température >85 °C.
- Vous pouvez commander de la peinture d'origine chez le fabricant pour réparer les petits dommages de surface.

Fréquence	Toutes les semaines	Tous les mois
Contrôle des défaillances/dommages par ex. éléments cassés/manquants	X	
Nettoyage du fauteuil roulant		X
Lubrification des axes de roue		X
Nettoyage des coussins		X
Contrôle du dispositif anti-bascule		X
Contrôle du réglage des freins		X
Contrôle de l'usure des pneus		X

- * Enduisez les éléments mobiles et les axes de roue avec de l'huile. Alu Rehab recommande l'utilisation d'une huile vélo ordinaire.

8.2 Nettoyage et lavage

1. Retirez les coussins avant de nettoyer le fauteuil roulant.
2. Nettoyez les coussins et les housses conformément aux instructions imprimées sur le coussin (en dessous).

Procédures de nettoyage des coussins

INTÉRIEUR	
Lavage	Lavage à la main à 40 °C
Désinfection	Virkon S
	Autoclave 105 °C
Séchage	Tordre
	Sécher à l'air debout sur la tranche
REVÊTEMENT EXTERNE	
Lavage	HOUSSE
Séchage	Sèche-linge à max. 85 °C

3. Nettoyez le châssis avec de l'eau et un chiffon.
4. En cas de nettoyage haute pression, évitez de diriger le jet directement vers le vérin à gaz, les étiquettes et le coussin de dossier.
5. Nous recommandons l'utilisation d'un savon doux.
6. Rincez minutieusement le fauteuil à l'eau pour éliminer tout le savon.
7. Utilisez de l'alcool dénaturé pour éliminer les saletés résiduelles.

Désinfection du fauteuil roulant

Retirez les coussins (voir instructions de lavage séparées). Utilisez un chiffon doux imbibé de peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) ou d'alcool isopropylique. Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) recommandé :
 NU-CIDEX « Johnson&Johnson »

9. GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Raison/action	Référence
Le fauteuil roulant avance de travers	<ul style="list-style-type: none"> • L'inclinaison du porte-axe (angle de chasse) ne doit pas dépasser 90°. • Vérifiez que les roues directrices sont réglées à la même hauteur. • Les moyeux des roues motrices ne sont pas montés correctement. • L'un des freins est trop serré. • L'utilisateur est assis de travers dans le fauteuil. • L'utilisateur exerce une charge plus importante d'un côté que de l'autre. 	<p>Voir point 6.5</p> <p>Voir point 6.4</p> <p>Voir point 6.6</p> <p>Voir point 6.17</p>
Le fauteuil roulant est difficile à manœuvrer.	<ul style="list-style-type: none"> • Les moyeux des roues motrices ne sont pas montés correctement. • Nettoyez les saletés présentes au niveau des roues directrices et des fourches. • Le charge appliquée sur les roues directrices est trop lourde (réglez le point d'équilibre en déplaçant les roues motrices vers l'arrière) 	Voir point 6.6
Le fauteuil roulant est difficile à tourner	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que les roues directrices ne sont pas trop serrées. • Réglez l'inclinaison du porte-axe (Angle de chasse). • La charge appliquée sur les roues directrices est trop importante. • Réglez le point d'équilibre. 	<p>Voir point 6.4</p> <p>Voir point 6.5</p>
Les roues avant ont du jeu.	<ul style="list-style-type: none"> • Le charge appliquée sur les roues directrices est trop lourde (réglez le point d'équilibre en déplaçant les roues motrices vers l'arrière) • Les roues directrices ne sont pas fixées correctement. • Vérifiez que les fourches avant sont montées à la même hauteur. • L'inclinaison du porte-axe ne doit pas dépasser 90°. 	<p>Voir point 6.4</p> <p>Voir point 6.4</p> <p>Voir point 6.3</p> <p>Voir point 6.5</p>
Les roues motrices sont difficiles à enlever et à remettre en place.	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez et lubrifiez l'axe à démontage rapide. • Réglez la longueur du porte-axe. 	Voir point 6.6
Les freins ne fonctionnent pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez les freins. 	Voir point 6.17
Le fauteuil roulant semble « trembler »	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôlez les vis et les points de réglage en général. 	

i Contactez votre revendeur pour en savoir plus sur les services agréés susceptibles de vous aider si vous ne pouvez pas résoudre le problème sur la base du présent tableau.

i Si vous avez besoin de pièces de rechange, contactez votre revendeur.

10. TESTS ET GARANTIE

10.1 Tests

Le Netti III XHD a été testé et homologué pour être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Le fauteuil porte le marquage CE.

Charge maximale autorisée : 200 kg

La résistance au feu du système d'assise a été testée conformément à la norme : ISO 7176-16

10.2 Garantie

Alu Rehab offre une garantie de 5 ans sur tous les composants du châssis et l'assemblage des traverses tubulaires. Tous les autres composants sont garantis deux ans, à l'exception des batteries et pièces d'usure. Alu Rehab décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une installation et/ou de réparations inappropriées ou non professionnelles, d'une négligence, de l'usure, de modifications non approuvées par Alu Rehab apportées au niveau de l'assemblage du fauteuil ou dans les institutions ou de l'utilisation de pièces de rechange fournies ou fabriquées par des tiers. Les cas précités annulent toute garantie.

10.3 Réclamation

- Toute réclamation doit être adressée à la personne qui vous a vendu le fauteuil roulant. Les papiers de vente doivent avoir été complétés et signés en bonne et due forme pour prouver la date et le lieu d'achat du fauteuil roulant.
- En règle générale, tout défaut justifie une réclamation. Il appartient au vendeur et à Alu Rehab de déterminer si le défaut doit être réparé ou si le client doit bénéficier d'une remise suite au défaut.
- La décision repose sur l'évaluation du défaut. Dans les quatorze jours qui suivent la réception de la plainte, le client recevra un rapport rédigé par le vendeur et/ou Alu Rehab, dans lequel est expliqué la manière dont il sera remédié au défaut.
- Les réclamations doivent être transmises dès la découverte du défaut.



L'usure ordinaire, une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation ne peuvent pas donner lieu à réclamation.



L'utilisateur doit utiliser, entretenir et manipuler le fauteuil roulant tel que décrit dans le manuel d'utilisation.

10.4 Garantie de fourniture des pièces de rechange

- Alu Rehab offre une disponibilité de 5 ans (minimum) pour la fourniture des pièces de rechange. La période de garantie court à compter de la date à laquelle Alu Rehab livre le fauteuil au revendeur.
- Pendant la période de garantie de fourniture des pièces de rechange, celles-ci sont livrées dans les 14 jours.
- Alu Rehab offre une garantie de 1 an pour les pièces de rechange contre tout vice de fabrication.

10.5 Réglages spéciaux/adaptations

Les termes réglages spéciaux/adaptations désignent tous les réglages qui ne sont pas repris dans ce guide. Les fauteuils roulants spécialement réglés/adaptés aux besoins du client ne peuvent pas conserver le marquage CE apposé par Alu Rehab Norway. Dans ce cas, la garantie offerte par Alu Rehab A.S est nulle et non avenue. En cas de doutes concernant certains équipements et adaptations, contactez Alu Rehab A.S.

10.6 Combinaison à d'autres produits

Combinaison du fauteuil Netti à d'autres produits non fabriqués par Alu Rehab A.S. Dans de tels cas, le marquage CE de tous les produits impliqués n'est généralement pas valable. Cependant, Alu Rehab A.S a conclu des accords avec d'autres fabricants concernant certaines combinaisons.

i Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou adressez-vous directement à Alu Rehab A.S Norway.

10.7 Entretien et réparation

Pour des informations concernant l'entretien et les services de réparation dans votre région, contactez votre revendeur local.

i Un numéro d'identification/de série unique a été apposé sur la partie inférieure du châssis, du côté gauche du fauteuil.

i Un catalogue reprenant les pièces de rechange disponibles pour votre fauteuil roulant peut être obtenu via votre revendeur local ou téléchargé à l'adresse www.alurehab.com.

i Un manuel de recyclage pour votre fauteuil roulant peut être obtenu via votre revendeur local ou téléchargé à l'adresse www.alurehab.com.

11. DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions*	Profondeur d'assise standard**	Hauteur du dossier*** (extension)	Largeur totale	Poids
35 cm	40-50 cm	48 (60) cm	59 cm	31,0 kg
38 cm	40-50 cm	48 (60) cm	62 cm	31,5 kg
40 cm	40-50 cm	48 (60) cm	64 cm	32,0 kg
43 cm	40-50 cm	48 (60) cm	67 cm	32,5 kg
45 cm	40-50 cm	48 (60) cm	69 cm	33,0 kg
50 cm	40-50 cm	48 (60) cm	74 cm	34,5 kg
55 cm	40-50 cm	48 (60) cm	79 cm	36,5 kg
60 cm	40-50 cm	48 (60) cm	84 cm	38,5 kg
65 cm	40-50 cm	48 (60) cm	89 cm	40,5 kg
70 cm	40-50 cm	48 (60) cm	94 cm	42,5 kg
75 cm	40-50 cm	48 (60) cm	99 cm	44,5 kg

* Mesurée entre les bords des tubes du châssis. Pour connaître la distance entre les protège-vêtements, ajoutez 2,5 cm.

** Mesurée de l'avant de la plaque d'assise à l'équerre du dossier et sans coussin.
Si vous utilisez le dossier Uno standard, retirez env. 3 cm

*** Mesurée de la plaque d'assise à la partie supérieure du velcro du dossier.



Le poids inclut les roues motrices, les roues directrices, les relève-jambes et les accoudoirs.
Sans coussins.



La charge maximale autorisée s'élève à 200 kg.



Lors du montage d'accessoires tels que le dispositif de motorisation etc. le poids des accessoires doit être déduit de la charge maximale autorisée.

Revendeur :	
N° de série :	
Date d'achat :	
Cachet du revendeur :	



REVENDEURS AGRÉÉS

ALU_REHAB™

*Bedriftsvegen 23
NO-4353 Kleoo Stasjon,
NORVÈGE*

*Tél. +47 51 78 62 20
Fax +47 51 78 62 21*

E-mail : post@alurehab.com

www.alurehab.com

UM0106F