



ANVÄNDARMANUAL

Netti 4U Base



Denna produkt överensstämmer med 93/42/EEC för medicinska produkter.

ALU_REHAB™
Thinking ahead - moving forward

INNEHÅLL

1. INLEDNING	4
1.1 Användningsområde/indikationer för Netti 4U Base	5
1.2 Kontraindikationer	5
1.3 Kvalitet och hållbarhet	5
1.4 Miljöhänsyn och omhändertagande	5
1.5 Information om återanvändning	6
1.6 Om denna manualen	6
1.7 Viktiga mått	7
2. SNABBREFERENS	8
3. BESKRIVNING	9
4. UTFÖRANDEN AV NETTI 4U Base	10
5. TILLVAL/TILLBEHÖR	11
5.1 Montering av höftbälte	13
6. MONTERING OCH JUSTERING	13
6.1 Packa upp rullstolen	13
6.2 Drivhjul	13
6.3 Länkhjul	14
6.4 Justering av sitthöjd	14
6.5 Ryggstöd	15
6.6 Tippskydd	16
6.7 Justering av sitsdjup bak	16
6.8 Justering av sitsdjup fram	17
6.9 Format säte och sitsdyna	17
6.10 Ryggstödsdyna	17
6.11 Benstöd	17
6.12 Huvudstöd	20
6.13 Armstöd	22

6.14 Justering av bromsar	22
6.15 Sitsvinkel	25
6.16 Ryggvinkel	25
7. KÖRTEKNIK/KÖREGENSKAPER	25
7.1 Allmänt om körning	25
7.2 Körteknik - uppför trappsteg	25
7.3 Körteknik - nedför trappsteg	26
7.4 Körteknik - lutande underlag	26
7.5 Körteknik - uppför trappor	27
7.6 Körteknik - nedför trappor	27
7.7 Förflyttning av brukare	27
7.8 Lyfta rullstolen	28
7.9 Drivringar	29
8. TRANSPORT	29
8.1 Fällning för transport	29
8.2 Transport i bil	29
9. UNDERHÅLL	30
9.1 Underhåll	30
9.2 Rengöring	31
10. FELSÖKNING	32
11. TESTER OCH GARANTI	33
11.1 Tester	33
11.2 Garanti	33
11.3 Reklamationer	33
11.4 Reservdelsgaranti	34
11.5 Special/individuell anpassning	34
11.6 Kombinationer med andra produkter	34
11.7 Service och reparationer	34
12. MÅTT OCH VIKTER	35



Netti 4U Base utan Netti sittsystem



Netti 4U Base med Netti sittsystem

1. INTRODUKTION

Netti 4U Base är en rullstol avsedd att fungera som grund för sittsystem och modulsitsar samt för sittsystem från Netti.

Vi på Alu Rehab anser att en rullstol ska väljas baserat på omfattande utvärdering med fokus på brukarens behov och kraven från omgivningen. Därför är det viktigt att ha kunskap om rullstolens möjligheter och begränsningar..

Rullstolen är konstruerad för både inomhus- och utomhusbruk.

Max brukarvikt: 125 kg.

⚠ Vid montering av tillbehör så som hjälpmotor, sittsystem etc., tillbehörens vikt ska dras bort från max brukarvikt.

i Specifikationerna kan variera mellan olika länder.

1.1 Användningsområde/ indikationer för Netti 4U Base

Netti 4U Base är en rullstol avsedd att användas tillsammans med modulsitsar och sittsystem, alternativt med olika sittsystem från Netti. Sittsystem ska väljas baserat på brukarens behov. Netti 4U Base ger ökad stabilitet tack vare det stora utbudet av benstöd, armstöd och huvudstöd. Dessutom har Netti 4U Base unika funktioner för tilt i kombination med mycket braköregenskaper.

1.2 Kontraindikationer

Om brukaren har väldigt utpräglad muskulär spasticitet, rekommenderar vi att man använder förstärkta ben- och huvudstöd.

1.3 Kvalitet och hållbarhet

Rullstolen Netti 4U Base har testats hos TÜV SÜD Product Service GmbH i Tyskland i enlighet med EU-standardEN DIN EN 12183:2009. Som tillverkare bedömer Alu Rehab A.S att denna test motsvarar 5-6 års normal användning av rullstolen. Rullstolens hållbarhet och livslängd påverkas av graden handikapp hos brukaren, samt nivån på underhållet av stolen. Dessa två faktorer avgör stolens slutliga hållbarhet.

1.4 Miljöhänsyn och omhändertagande

Alu Rehab och dess leverantörer vill visa miljöhänsyn.



Detta betyder:

- Att vi så långt som möjligt undviker att använda miljöskadliga ämnen och processer.
- Att Alu Rehabs produkter har lång livslängd och hög flexibilitet - vilket är bra för både miljön och ekonomin.
- Att allt förpackningsmaterial kan återvinnas.
- Att rullstolen är konstruerad för att kunna delas upp i olika komponentmaterial - vilket underlättar återvinning.



För information om korrekt återvinning hänvisas till de lokala myndigheterna.

1.5 Information om återanvändning

Alla produkter från Alu Rehab är utvecklade för att ge många års underhållsfri användning. Alla våra produkter kan anpassas för återanvändning av en auktoriserad återförsäljare. För att kunna garantera prestanda och säkerhet rekommenderar Alu Rehab att följande tester utförs innan stolen återanvänds.

Kontrollera att följande komponenter fungerar och är hela etc. och byt ut delar vid behov:

- Drivhjul (däckmönster)
- Rullstolens chassi
- Dynor och överdrag:
- Nav
- Bromsfunktion
- Balansering av hjulen
- Lagerhus

Uppmärksamma även uppgifterna i avsnitt 9.2 Rengöring

Tippskydd

Korrekt monterade och inställda tippskydd förhindrar att stolen tappar bakåt. Vi rekommenderar att alla brukare använder tippskydd.

1.6 Om denna manualen

För att undvika skador när man använder rullstolen Netti 4U Base, ska denna bruksanvisning noga läsas igenom innan rullstolen används.



Symbolen anger förbjudna åtgärder. Om en förbjuden åtgärd utförs upphör garantin att gälla.



Varningssymbol. Denna symbol används för att uppmanna till försiktighet.



Symbolen indikerar viktig information.



Symbol för nyttiga tips.



Symbolen betyder verktyg.

1.7 Viktiga mått

Netti 4U Base är en rullstol avsedd för både utomhus- och inomhusbruk.

 Specifikationerna kan variera mellan olika länder.

Totalvikt: 29,5 kg
(500 mm bred stol)



Sittbredd:

350, 400, 450, 500 mm

Sittdjup:



(Mått från ryggdynan till sittplattans framkant)

425, 450, 475, 500 mm

Sitthöjd:



(Från golv till toppen av sittplattan med 24-tum drivhjul i övre hållposition).

465 mm*

* Genom att ändra drivhjulens position kan man ändra sitthöjden upp till 500 mm.

Ryggstödshöjd:



480 mm

Specifikation	min.	max
Totallängd med benstöd	1 130 mm	-
Totalbredd	680 mm	-
Back-/svängbredd	1 400 mm	-
Totalhöjd	1 100 mm	-
Totalvikt	29,5 kg	-
Vikt tyngsta del	2,5 kg	-
Max säkerhetslutning	-	8°
Sittytans vinkel	- 8°	22°
Effektivt sittdjup*	425 mm	550 mm
Effektiv sittbredd	350 mm	500 mm
Sittytans höjd i framkant	465 mm	500 mm
Ryggvinkel	92°	137°
Ryggstödshöjd	480 mm	-
Avstånd benstöd-sittyta	280 mm	770 mm
Vinkel benstöd-sittyta	105°	182°
Avstånd armstöd-sittyta	260 mm	355 mm
Frontposition för armstödsstrukturen	320 mm	460 mm
Drivringens diameter	535 mm	-
Horisontell axelposition	-50 mm	25 mm
Minsta vändradie	860 mm	-

Modellbredd: 50 cm.

Uppmätt utan dynor.

* Man kan lägga till 5 cm för utdragna benstödshållare.

2. SNABBREFERENS

Innehållet på denna sida är en sammanfattning av hela manualen. Här ges en kortfattad beskrivning om hur man använder rullstolen Netti 4U Base.

 Snabbreferensen ersätter inte bruksanvisningen utan är avsedd som checklista.

- Packa upp rullstolen (Avsnitt 6.1)
- Montera drivhjulen (Avsnitt 6.2)
- Montera länkhjulen (Avsnitt 6.3)
- Tiltla ryggstödet bakåt och montera gaskolven i ryggstödet med hjälp av låsbulten. (Avsnitt 6.5)
- Montera benstöden (Avsnitt 6.11)
- Montera huvudstödet (Avsnitt 6.12)
- Fäll upp tippskyddet (Avsnitt 6.6)
- Montera tillval/tillbehör. (Se punkt 5 för ytterligare information. Monteringsanvisningar medföljer tillbehöret.)

 För felsökning, se avsnitt 10. För montering och justering, se avsnitt 6.

 Kör försiktigt!

 Tänk på att friktion mot drivringarna kan göra ytan varm.

 Saltvatten kan öka risken för korrosion. Andra försiktighetsåtgärder rörande miljöförhållanden är inte nödvändiga.

 När stolen lutas bakåt ska alltid tippskydd och broms användas.

 Se till att låsa alla handtag ordentligt.

 Tippskydden ska alltid användas för brukarens säkerhet.

 Metalldelarnas ytemperatur kan öka när dessa exponeras för direkt solljus.

 Stå aldrig på fotplattorna, det kan orsaka att stolen tippa framåt.

 Lyft aldrig rullstolen i benstöden eller armstöden.

 Produktkomponenter kan avvika mellan olika länder.

 För brukare med nedsatt syn finns manualer och kataloger för nerladdning via www.alurehab.com.

 Kontakta återförsäljaren om det är något du undrar över!

3. BESKRIVNING


Standardversion*

1. Körbygel
2. Huvudstöd
3. Vinkel- och djupinställning för huvudstöd
4. Frigöringshandtag tilt/recline
5. Huvudstödsfäste
6. Armstöd med armstödsplatta
7. Sitsplatta
8. Vinkelinställning för benstöd
9. Fäste för vadplatta
10. Fotplatta
11. Vadplatta
12. Länkhjul
13. Framgaffel
14. Drivhjul
15. Tippskydd
16. Bromshandtag

i Om någon av dessa delar saknas ska man kontakta återförsäljaren.

* Produktkomponenter kan avvika mellan olika länder.

I vissa länder lägger man till ryggstöds-kardborrband och sittsystem som standard,

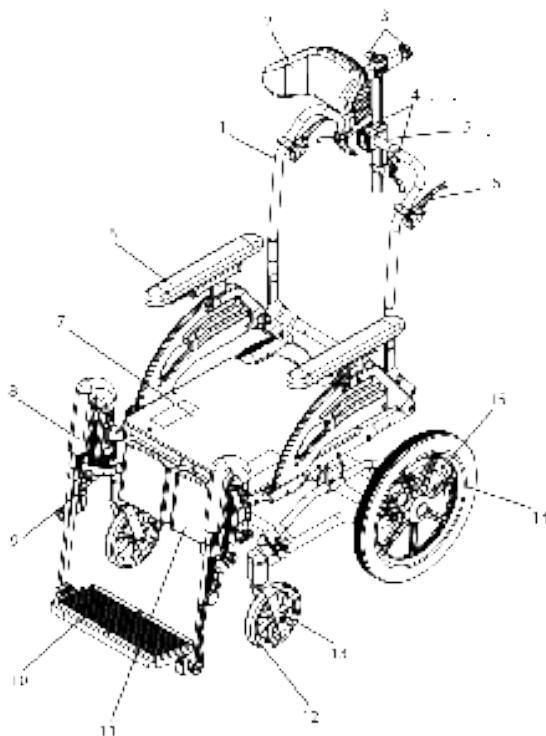

4. UTFÖRANDEN AV NETTI 4U BASE

Standard

SITS

- Netti Uno|Sitsdyna*
- Lutning -8° till +22°
- Justerbart djup på 7,5 cm

HJUL

- 16 x 1 3/4-tum trumbroms eller 24 x 1-tum punkteringssäkra drivhjul med snabbutlösningssaxel
- Drivring: Aluminium
- 7-tum punkteringssäkra länkhjul med snabbutlösningssaxel

Standarddrivhjul kan avvika mellan olika länder.

RYGGSTÖD

- Vinkel: 92° till 137°
- Höjd: 50 cm
- Ryggdyna med kardborrband*
- Netti Uno|Svart dyna*
- Körbygel

FOTSTÖD

- Universal eller vinkeljusterbara benstöd
- Höjd- och vinkeljusterbara fotplattor eller fotplatta
- Avtagbart

ARMSTÖD

- Höjd- och djupjusterbara
- Avtagbara

HUVUDSTÖD

- Höjd-, djup- och vinkeljusterbart
- Avtagbart

* Netti 4U Base med Netti sittsystem

Tillbehör

SITS

- Tryckfördelande dynor

HJUL

- Punkteringssäkra PU-hjul 12-tum, 16-tum, 22 x 1 3/8-tum och 24 x 1 3/8-tum med trumbroms (Se avsnitt 5)
- 22 x 1-tum och 24 x 1-tum punkteringssäkra drivhjul
- 6-tum och 7-tum punkteringssäkra länkhjul med snabbutlösningssaxel

RYGGSTÖD

- Ryggdynor i olika storlek
- Ryggstödsförlängning (se avsnitt 5)
- Svankstöd och ryggkil (se avsnitt 5)

FOTSTÖD

- Universal eller vinkeljusterbara benstöd
- Höjd- och vinkeljusterbara fotplattor eller fotplatta
- Avtagbart

ARMSTÖD

- Hemikudde (se avsnitt 5)

HUVUDSTÖD

- Huvudstöd, olika modeller (Se avsnitt 5)

5. TILLBEHÖR

Bälten

Olika varianter:
Höftbälten med
eller utan stoppning
och med plastlås
eller bilbälteslås.

(Se punkt 5.1 för montering)



Ryggdynor

Olika modeller
Kontakta din
återförsäljare.



Bord

Olika modeller



Stoppning för bord

Ger ett mjukt underlag
när man vilar armarna
på bordet.



Benstöd:

Vinkeljusterbara



Universal

Kan ställas in i fasta lägen
mellan 33° och 105°
med justeringsvred.



Ryggkil

Ger bättre sidostöd.



Amputeringsstöd



Svankstöd

Förbättrar svankstödet.



Stoppning för
vadplattans fäste
Reducerar tryck.



Inbyggbart bäckenstöd
Bäckenstabilisator.



Sittdynor

Olika modeller
Kontakta återförsäljaren.



Tippskydd

Tippskydd med trampprör.



Huvudstöd
Stöd C, med stor platta
Stöd A, med sidostöd
Stöd B, med liten platta



Hygienöverdrag
Skyddar kärnan på
huvudstödet.



Huvuddyna
40x40 cm dyna med
Kospoflex-stopppning
och gummirem.



Huvuddyna komfort
Dyna med Kospoflex-
stopppning som dras
över huvudstödet.



Hemi-kudde
Ett rörligt stöd för brukare
som är halvsidesförlamad.



Ryggstödsförlängning
12 cm förlängning.
Används tillsammans
med 60 cm ryggdyna.



Fotplatta med lås
Benstödet kan svängas
åt sidan precis som ett
vanligt benstöd.




Sidostöd Korrigering
Korrigerande sidostöd
som förebygger dålig
överkroppshållning.



Stopppning till sidostöd
Korrigerering



Sidostöd Stabil
Avsedd för brukare
med nedsatt stabilitet
i överkroppen. För bästa
funktion bör detta
användas med dynan Stabil.

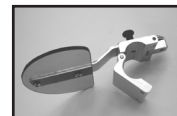

Stopppning till sidostöd Stabil



Svängbara vadstöd
Brukaren behöver
inte lyfta benen
vid montering eller
demontering av
benstöd.



Abduktionskloss
Hjälper till att
förebygga abduktion.
Liten: 80 mm bred
Mellan: 120 mm bred
Stor: 140 mm bred



Drivhjul
12- och 16-tum
24-tum med trumbroms



5.1 Montera höftbälte

Bild 5.1.1

- Dra bältet genom hålet på höftbältets hållare.



Bild 5.1.1

Bild 5.1.2

- Trä bältet tillbaka genom bältklämman.



Bild 5.1.2

Bild 5.1.3

- Fäst höftbälteshållaren i ryggstödet i det bakersta hålet med de medföljande skruvarna och muttrarna.

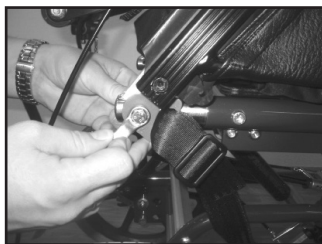


Bild 5.1.3



2 st 13 mm fast nyckel

6. MONTERING OCH JUSTERING

6.1 Uppackning av stolen

1. Packa upp alla delar och kontrollera att allt som anges på packlistan finns med.
2. Montera drivhjulen (Avsnitt 6.2)
3. Montera länkhjulen (Avsnitt 6.3)
4. Kontrollera/justera sitsdjupet (Avsnitt 6.7/6.8)
5. Montera ryggstödet (Avsnitt 6.5)
6. Montera format säte och sitsdyna (Avsnitt 6.9)
7. Montera ryggstödsdyna (Avsnitt 6.10)
8. Montera benstöden (Avsnitt 6.11)
9. Montera huvudstödet (Avsnitt 6.12)
10. Montera eventuella tillbehör (Avsnitt 5)

Komponenternas vikt (45 cm bred rullstol):

Drivhjul: 1,9 kg vardera

Tippskydd: 0,1 kg vardera

Länkhjul: 0,8 kg vardera

Benstödens vinkeljustering: 2 kg vardera

Sittdyna: Ca. 1 kg

Huvudstöd A: 1 kg

Huvudstöd C: 0,9 kg

6.2 Drivhjul


1. 22- och 24-tum drivhjul.

För att montera drivhjulen ska man ta bort snabbutlösningsbulten från navhysan, för den genom navet på drivhjulet och in i navhysan samtidigt som man trycker in knoppen på navet.



2. 12- och 16-tum drivhjul.

- För in navhylsa och låsstift i hjulramen.
- Fäst navhylsan med en 24 mm fast nyckel.

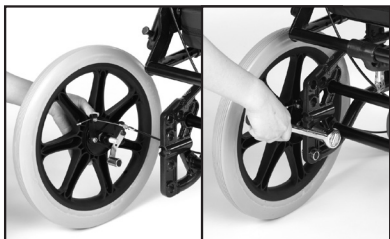

- ⚠ För att kontrollera att drivhjulet är korrekt monterat på navet sätter man ett finger på ekrarna vid navet och drar i drivhjulet.
- ⚠ Rullstolen får inte användas utan att drivhjulen sitter ordentligt fast. Kontakta återförsäljaren.
- ⚠ Sand och vägsalt (används för halkbekämpning) kan orsaka skador på drivhjulens lager och länkhjulen. Rengör rullstolen noga om den utsätts för detta vid användning.

6.3 Länkhjul

Ta av länkhjulen

- Tryck på frigöringsknappen under framgaffeln.

Montera länkhjul

- För in snabbutlösningssaxeln genom lagerhuset. Dra i hjulet för att kontrollera att hjulet låst fast ordentligt.




6.4. Justering av sitthöjd

Sitthöjden baktill påverkas av:

- Drivhjulens storlek.
- Drivhjulens placering.
- Om man placerar 24-tums drivhjul i det övre hålet blir sitthöjden 46,5 cm från golvet till sittplattan. Om man placerar 24-tums drivhjul i näst översta läget blir höjden från golv till sittplatta 50 cm.
- Om man placerar 22-tums drivhjul i det övre hålet blir sitthöjden 44 cm från golvet till sittplattan. Om man placerar 22-tums drivhjul i näst översta läget blir höjden från golv till sittplatta 47,5 cm.


Om drivhjulens placering ska ändras eller om man byter till en annan storlek på drivhjulen lossar man navhylsa inklusive bricka och mutter. Ta bort navhylsan och montera i önskat läge, dra åt ordentligt.

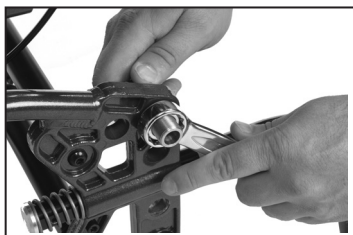

- ⚙ 2 st 24 mm fasta nycklar.

- ⚠ Kontrollera att muttern på insidan av hjulramen har full kontakt med hjulets navhylsa.

Drivhjul och länkhjul ska monteras i enlighet med nedanstående beskrivning.

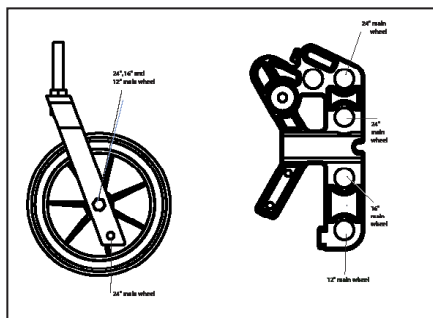

⚠ När sitthöjden ska ändras ska man kontrollera att länkhjulen är placerade så att nedre ramrör är parallella med marken.

⚠ Kontrollera tippskyddets placering och efterjustera bromsarna efter montering av drivhjul eller förändring av drivhjulets placering.

6.5 Ryggstöd

- För att montera gasfjädern lyfter man bågen med en hand och för in gasfjäderns låshuvud i plasthållaren med den andra handen (Bild 6.5.1).
- Kontrollera att hålet i låshuvudet är parallellt med de öppna hålen i plasthållaren.



Bild 6.5.1

- Spärra ryggstödet genom att trycka låsbulten genom plasthållaren och gasfjäderns låshuvud (Bild 6.5.2.)



Bild 6.5.2

⚠ För att kontrollera att ryggstödet är spärrat tar man tag i körbygeln och trycker ryggstödet framåt. Om ryggstödet faller framåt - upprepa låsförfarandet eller kontakta återförsäljaren.

- Rullstolen är monterad med standard sittsdjup. Plasthållaren har fyra hål varav tre är tillfälligt blockerade med plastpluggar (Bild 6.5.3),



Bild 6.5.3

- Ryggstödsleden har fyra hål (Bild 6.5.4). Hålen placering motsvarar hålen i plathållaren. Om gasfjäders låshuvud monteras i plathållarens inre hål ska ryggstödsleden också monteras i det inre hålet, etc.



Bild 6.5.4

- Hitta önskad placering för låsbulten i plathållaren och ta bort plastpluggen från det aktuella hålet.
- Spärra ryggstödet genom att trycka låsbulten genom plathållaren och gasfjäders låshuvud.
- Efter att hålplaceringen ändrats i plathållaren ska hålplaceringen i ryggstödsleden ändras till parallell placering.

- ⚠ Kontrollera att hålet i ryggstöds led och plathållaren är monterade i samma hålplacering.

- ⚙ 6 mm insexnyckel

6.6 Tippskydd

Tippskyddet ska monteras i enlighet med monteringsanvisningarna, som medföljer rullstolen vid leverans.

Användning av tippskydden

- Dra ut tippskyddet
- Vrid det upp eller ner 180°
- Lås i rätt läge



Justera höjden för tippskydd

Tippskydden kan justeras i fasta lägen. Den korta placeringen är avsedd för 12- och 16-tum drivhjul och 22-tum i det övre läget. Den långa placeringen är avsedd för 24-tum drivhjul i nedre läget.

- Lossa skruven i den justerbara förlängningsstycket, så som bilden nedan visar.
- Detta förlängningsstycke har två hål. Placera stycket i önskat läge och dra åt skruven.



- ⚙ 5 mm insexnyckel

- ⚠ Tippskydden ska alltid användas för brukarens säkerhet.

6.7 Justering av sitsdjup bak

- För att justera sitsdjupet i bakkant lossar man låsbulten från plathållaren (Bild 6.5.2).
- Hitta önskad placering för låsbulten i plathållaren och ta bort plastpluggen från det aktuella hålet.
- Spärra ryggstödet genom att trycka låsbulten genom plathållaren och gasfjäders låshuvud.
- Efter att hålplaceringen ändrats i plathållaren ska hålplaceringen i ryggstödsleden ändras till parallell placering.

- ⚠ Kontrollera att hålet i ryggstödet led och plasthållaren är parallellt monterade.

- 🔧 6 mm insexnyckel

6.8 Justering av sitsdjup fram

Man kan justera sittdjupet med upp till 10 cm i framkant. Gör enligt följande:

- Skruva ut skruvarna i justerstycket (Bild 6.7).
- Placera justerstycket i önskat läge
- Sätt tillbaka och dra åt skruvarna



Bild 6.8

- 🔧 6 mm insexnyckel

- ⚠ Om brukaren spastiska benägenhet får inte justerstycket dras ut mer än 5 cm.

6.9 Format säte och sitsdyna

Det formade sätet ska fästas på sittplattan i plywood med hjälp av skruv med vanlig mutter eller klommutter. Därefter ska sittplattan fästas i rullstolens ram. Sittdynan fästs med kardborrband mot sittplattan.

- 👍 Det är viktigt att dynorna monteras på rullstolen innan den används.

- 👍 Dynornas klädsel är tvättbar och återanvändbar. Följ anvisningarna på dynans baksida för korrekt underhåll och skötsel av dynorna.

6.10 Ryggdyna*

Ryggdynan fästs mot ryggstödet med kardborrband.



- * I vissa länder används Netti sittsystem som standard på Netti Base.

- 👍 Sitsens och ryggdynans klädsel är tvättbar och kan återanvändas. Följ anvisningarna på dynan för korrekt underhåll och skötsel av dynorna.



6.11 Benstöd

Netti 4U Base kan levereras med endera Universal eller vinkeljusterbara benstöd.

Vinkelinställning för benstöd

Vinkeljusterbara benstöd kan fritt ställas in i önskad vinkel. Stöden är svängbara och avtagbara. Fotstöden är vikbara och kan vinklas i fasta lägen. Levereras med höjd- och djupjusterbara vadvstöd.

Montering av benstöd

- Montera benstöden genom att hålla i benstöds ledade del. Håll fast i en vinkel på ca. 20° mot sidoramen. Placera i det svarta plastlåset, som sitter på det avtagbara justeringsstaget. Sväng inåt och tryck neråt (Bild 6.11.1.)



Bild 6.11.1

Justering av vinkel - Universalbenstöd

- Benstöds vinkel kan justeras med hjälp av stjärnhjulet på ledpunkten (Bild 6.11.2).
- Genom att lossa stjärnhjulet kan man justera benstödet i önskad vinkel.
- När vredet dras åt spärras den inställda stjärnskruven.



Bild 6.11.2

Justering av vinkel - Vinkeljusterbart benstöd

- Benstöds vinkel kan justeras med hjälp av stjärnhjulet i Bild 6.11.3.
- Genom att lossa stjärnhjulet kan man justera benstödet i önskad vinkel.
- När vredet dras åt spärras den inställda stjärnhjulet.



Bild 6.11.3

- ⚠ Kläm hårt. Vid justering av benstöds vinkel ska fingrarna hållas borta från justeringsmekanismen mellan de rörliga delarna.



Bild 6.11.4

Justera benstödens längd

- Lossa skruven (A) för att flytta justeringsröret
- Justera benstödet till önskat läge och dra åt skruven ordentligt.



Bild 6.11.5

I vissa länder används ett stjärnhjul istället för justeringsvred.

Justering av fotplattans vinkel

- Fotplattan kan ställas in i vinkel.
- Lossa skruven (B) och ställ in fotplattan i önskad vinkel. Dra åt skruven ordentligt (Bild 6.11.6).



5 mm insexnyckel.

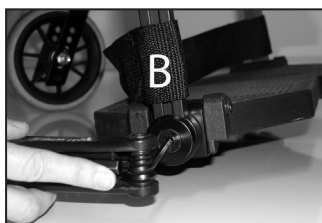


Bild 6.11.6

Låsa och frigöra fotplattorna

- Fotplattorna är försedda med låsbult som gör fotplattorna starkare.
- För att spärra fotplattorna drar man plastlåset (Bild 6.9.7) på höger fotplatta och placerar låset över bulten på den vänstra fotplattan.

- För att frigöra fotplattan drar man i plastlåset (Bild 6.9.7) och lyfter upp höger fotplatta.



Bild 6.11.7.



När rullstolen ska användas utomhus ska markfrigången mellan fotplatta och mark vara 4-5 cm.



Det får inte finnas någon belastning på fotplattorna när dessa ställs in.

Ta bort benstöden:

- Dra plastlåset på fotplattan bakåt så att stiftet frigörs, därefter kan fotplattan vikas uppåt.
- Höj upp benstödet några grader.
- Frigör benstödet genom att dra det lätt rakt upp.
- Sväng benstödet utåt.
- Lyft och ta bort benstödet. (Bild 6.11.8.).



Bild 6.11.8

Justering av vadvstöd

Vadvstöden är höjd- och djupjusterbara. För att ställa in höjden lossar man muttern på utsidan av vadvstödet hållare, ställ in önskad höjd och spänn sedan muttrarna (Bild 6.9.9.A).

 10 mm fast nyckel

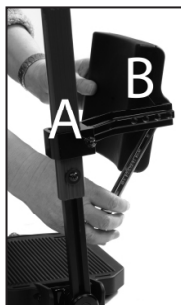


Bild 6.11.9


För att ställa in djupet tar man bort dynan på vadvstödet från hållaren med en fast nyckel mellan dynan och hållaren. Ställ in önskat läge och dra åt. (Bild 6.9.9 B)

 13 mm fast nyckel


 Stå aldrig på fotplattorna!

 Lyft aldrig rullstolen i benstöden.

6.12 Huvudstöd

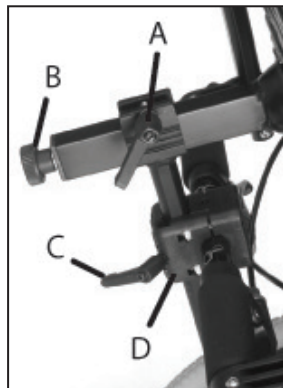

A - Spak för djupinställning
B - Vred för vinkelinställning
C - Spak för höjdinställning
D - Huvudstödsfäste

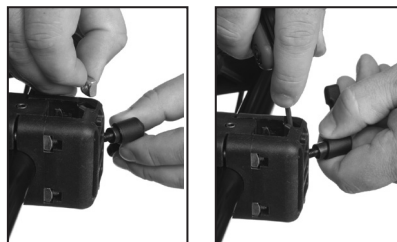

- Placera fyrkantsmuttern i spåret på huvudstödet hållare, som bilden ovan visar.
- Placera därefter huvudstödet i huvudstödet hållare.
- Huvudstödet höjd och djup ställs in i önskat läge, därefter spänner man fast.



- Huvudstödet's hållare fästs genom att man drar åt de fyra skruvarna diagonalt, på så sätt hålls huvudstödet fast och kraften fördelas på de fyra skruvarna.

Justering av huvudstödet's djup:

- Frigör låsspaken uppe på det vertikala staget (A).
- Justera in huvudstödet till önskat läge.

Justering av huvudstödet's höjd:

- Frigör låsspaken på huvudstödet's adapter (C).
- Justera in huvudstödet till önskat läge.

Justering av huvudstödet's vinkel:

- Frigör justeringshjulet på baksidan av det horisontella staget (B).
- Justera in huvudstödet till önskat läge.

Justering av huvudstödet i sidled:

- Huvudstödet's adapter kan flyttas åt både vänster och höger, vilket ger möjlighet att anpassa huvudstödet's inställning efter brukarens behov.
- Lossa de fyra skruvarna som håller samman adaptern.
- Flytta adaptern till önskat läge och fixera adaptern genom att diagonalt dra åt de fyra skruvarna.



Glöm inte att frigöra spakarna när huvudstödet justeras.



Om huvudstödet's stativ inte passar perfekt i hållaren så har troligtvis hållaren monteras för hårt eller ojämnt.



Efter montering av huvudstödet ska det spännas ordentligt med den lilla ställskruven i mitten, uppe på huvudstödet's hållare - använd insexnyckel.



Om huvudstödet verkar vara för kort kan det vridas 80° om man lossar justervredet på baksidan av det horisontella staget (B).

6.13 Armstöd



- Armstödet kan svängas bakåt



- Tryck på det röda handtaget för att frigöra armstödet och svänga det bakåt



Justera armstödet djup

- Tryck på den röda knappen för att justera armstödet djup.



Justera armstödet höjd

- Lossa skruven på armstödet med en 4≈mm insexnyckel.
- Höj eller sänk skaftet
- Dra åt skruven



- ⚠ Var uppmärksam på armstödslåset (A) när armstödet spärras.

- ⚠ Om rullstolen är utrustad med sidostöd går det inte att rotera detta armstödet.

- ⚠ Var uppmärksam på klämrisker mellan armstödet och ramröret när armstödet spärras.

6.14 Justering av bromsar

- Bromsarna kan flyttas fritt längs ramröret.
- Aktivera bromsen, tryck handtaget framåt (Bild 6.14.1).



Bild 6.14.1

- Man släpper bromsen genom att dra handtaget bakåt (Bild 6.12.2).



Bild 6.14.2

- För att flytta bromsen lossar man de två skruvarna på bromsklämmans insida (Bild 6.12.3).
- Justera in bromsens position och dra åt skruvarna.



Bild 6.14.3

- För fininställning lossas den övre skruven på bromsens insida (Bild 6.12.4)
- Justera in bromsens position och dra åt skruven.



Bild 6.14.4

 5 mm insexnyckel

- ⚠ Kontrollera att bromsarna är korrekt justerade genom att aktivera bromsarna och kontrollera att rullstolen inte rör sig.
- ⚠ Bromsarna är avsedda som parkeringsbroms och ska inte användas som färdbroms.
- ⚠ Var uppmärksam på klämrisker mellan broms och däck.

Trumbroms

Om rullstolen är utrustad med 12- eller 16-tum drivhjul är dessa utrustade med trumbroms.

Om bromsarna inte fungerar korrekt:
Wiren justeras på en eller båda sidorna,
justera ställskruven 2-4 varv utåt.
Kontrollera därefter bromsarna igen.




Om wiren är för lös:
Skruva in ställskruven helt. Spänn wiren
genom att lossa wireklämman innan du drar
wire längre genom den. Dra åt wireklämman
och skruva ut ställskruven igen.



 1 st 10 mm fast nyckel.

 För att säkerställa korrekt
wirefunktion får dessa aldrig
vara spända.

Använda och aktivera bromsen:
Drivhjul med trumbromsar är utrustade med
manuella navbromsar för att kontrollera
hastigheten in- och utåtbak. Bromshandtagen
är placerade på körhandtagen.

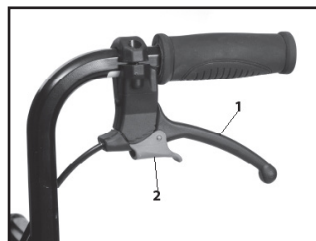

- För att bromsa drar man bromsspakarna (1) jämnt mot handtaget för att stoppa hjulen.
- För att aktivera och spärra parkeringsbromsen (2) trycker man spaken (1) mot tryckhandtaget och spärrar parkeringsbromsen med fingret. Se till att båda parkeringsbromsarna är spärrade.
- Parkeringsbromsen frigörs när man trycker spaken (1) mot tryckhandtaget. Parkeringsbromsen spärras med en fjäder och frigörs på detta sätt.

 Det är mycket viktigt att
parkeringsbromsarna är låsta om
brukaren lämnas kvar i rullstolen.

 Lämna aldrig brukaren i rullstolen utan
att först aktivera parkeringsbromsen.

6.15 Sitsvinkel/lutning

Sitsens vinkel regleras med frigöringshandtaget som är monterat på körbygeln. Sitsen kan lutas från -5° till +20°



6.16 Ryggstöds vinkel

Ryggstöds vinkel regleras med frigöringshandtaget som är monterat på körbygeln. Denna vinkel kan justeras från 90° till 135°

- ⚠ För att säkerställa korrekt wirefunktion får dessa aldrig vara spända.
- ⚠ Sitsens och ryggstöds vinkel får aldrig justeras utan tippskydd.

Frigöringshandtagen har följande märkning:



Recline



Tilt

- ⚠ Risk att stolen tippar. Kontrollera tippskyddens placering.

- ⚠ Lämna aldrig brukaren i rullstolen när denna lutar framåt.

7. KÖRTEKNIK

7.1 Allmänt om körning

Rullstolens köregenskaper påverkas av stolens vikt och balans. Brukarens vikt, storlek och sittställning har också stor inverkan. Dessutom påverkas köregenskaperna av hjulens placering. Ju mer av vikten som är placerad över drivhjulen desto lättare är det att köra. Rullstolen blir väldigt tung att köra om mycket av vikten är placerad över länkhjulen.

Vårdare:

Om brukaren lämnas kvar i rullstolen ska bromsarna aktiveras och tippskydden fällas ner.

Parkering:

Stolens stöd mot underlaget kan ökas genom att rullstolen flyttas bakåt ungefär 10 cm så att länkhjulen riktas framåt.

7.2 Körteknik

- uppför trappsteg -

Vårdare som kör framlänges upp över en kant:

- Kontrollera att tippskydden är vända uppåt.
- Luta rullstolen bakåt.
- Balansera rullstolen på drivhjulen och skjut stolen framåt tills länkhjulen är uppe på kanten.
- Lyft körbygeln och skjut rullstolen upp över kanten.
- ⚠ Vänd tippskydden neråt.

Vårdare som kör baklänges upp över en kant:

Denna teknik är bara användbar om steget är mycket lågt. Dessutom måste frigången mellan fotplattor och mark vara tillräcklig.

- Kontrollera att tippskyddet är vända uppåt.
- Kör rullstolen baklänges mot steget.
- Ta ett ordentligt tag om drivringarna och flytta kroppen framåt samtidigt som man drar.

⚠ Vänd tippskyddet neråt.

Vårdare som kör baklänges upp över en kant:

- Kontrollera att tippskyddet är vända uppåt.
- Dra rullstolen bakåt mot steget
- Luta rullstolen bakåt, så att länkhjulen lättar lite från marken.
- Dra rullstolen upp över steget och fortsätt bakåt tillräckligt för att säkert kunna sätta ner länkhjulen på underlaget.

⚠ Vänd tippskyddet neråt.

7.3 Körteknik

- nerför steg -

Vårdare som kör framlänges ner för en kant:

- Kontrollera att tippskyddet är vända uppåt.
- Luta rullstolen bakåt, så att länkhjulen lättar lite från marken.
- Kör försiktigt ner för kanten och luta rullstolen framåt så att länkhjulen åter får kontakt med marken.

⚠ Vänd tippskyddet neråt.

Vårdare som kör baklänges ner för en kant:

- Kontrollera att tippskyddet är vända uppåt.
- Flytta rullstolen bakåt mot steget.

- Kör försiktigt ner för steget och flytta rullstolen bakåt på drivhjulen tills länkhjulen är fria från steget.
- Sätt ner länkhjulen på marken.

⚠ Vänd tippskyddet neråt.

7.4 Körteknik

- lutande underlag -

Viktigt att tänka på när man kör uppåt eller neråt för att undvika att stolen tippar.

⚠ Sväng inte rullstolen mitt i lutningen.

⚠ Kör alltid så rakt som möjligt.

⚠ Det är bättre att be om hjälp än att ta onödiga risker.



Köra uppför:

Luta överkroppen framåt för att bibehålla balansen på rullstolen.

Köra nerför:

Luta överkroppen bakåt för att bibehålla balansen på rullstolen. Kontrollera rullstolens hastighet genom att klämma om drivringarna. Använd inte bromsarna.

7.5 Körteknik

- uppför trappor -

- ⚠ Be alltid om hjälp.
- ⚠ Använd aldrig rulltrappor, inte ens med hjälp vårdare.

Bakåt, med assistans:

- Kontrollera att tippskydden är vända uppåt.
- Dra rullstolen bakåt till det första trappsteget.
- Luta rullstolen bakåt på drivhjulen.
- Dra långsamt upp rullstolen för trappsteget, ta ett steg i taget och var noga att hålla balansen på drivhjulen.
- Efter trappans översta steg drar man rullstolen bakåt tillräckligt långt för att länkhjulen ska kunna sättas ner på golvet.

- ⚠ Vänd tippskydden neråt.

- 👍 Om det finns två tillgängliga vårdare kan en person hjälpa till genom att lyfta i den främre ramen.

- ⚠ Lyft inte rullstolen med hjälp av benstöden.

- ⚠ Lyft inte rullstolen med hjälp av armstöden.

- 📢 För att undvika överbelastning av ryggen bör vårdarna använda sin benstyrka när man lyfter rullstolen, för att skona ryggen.

7.6 Körteknik

- nerför trappor -

- ⚠ Använd aldrig rulltrappor, inte ens med hjälp av vårdare.

Framåt, med assistans:

- Kontrollera att tippskydden är vända uppåt.
- För rullstolen framåt till det första trappsteget.
- Luta rullstolen bakåt på drivhjulen.
- Håll ordentligt i körbygeln och håll balansen på drivhjulen, ta ett steg i taget
- Efter trappans nedersta steg sätter man försiktigt ner länkhjulen på golvet.

- ⚠ vänd tippskydden neråt.

- 👍 Om det finns två tillgängliga vårdare kan en person hjälpa till genom att lyfta i den främre ramen.

- ⚠ Lyft inte rullstolen med hjälp av benstöden.

- ⚠ Lyft inte rullstolen med hjälp av armstöden.

7.7 Förflyttning av brukare

Tekniker för att flytta en person till/från rullstolen bör tränas in ordentligt med alla berörda personer. Här följer några viktiga råd för att förbereda rullstolen:

Med eller utan vårdare - i sidled.

Före förflyttning:

- Rullstolen ska placeras så nära som möjligt mot den sida brukaren ska förflyttas från.
- Dra rullstolen bakåt 5-10 cm så att länkhjulen riktas framåt.
- Lås bromsarna.
- Ta bort benstöd och armstöd på den sidan förflyttningen sker på.

Med eller utan vårdare - framåt.

Före förflyttning:

- Rullstolen ska placeras så nära som möjligt mot den sida brukaren ska förflyttas från.
- Dra rullstolen bakåt 5-10 cm så att länkhjulen riktas framåt.
- Lås bromsarna.
- Luta stolen framåt



Använda lyftanordning:

Innan man förflyttar till stolen:

- Luta stolen bakåt
- Ta bort huvudstödet
- Ta bort benstöden
- Öppna upp ryggstödet lite
- Sätt tillbaka delarna när förflyttningen är klar.



- ⚠ Stå aldrig på fotplattorna utan att först säkerställa att plattorna har kontakt med marken, det finns risk att rullstolen tipsar framåt.

7.8 Lyfta rullstolen


- Rullstolen får endast lyftas i ram och körbygel.



- ⚠ Lyft aldrig rullstolen i benstöden eller armstöden
- ⚠ Lyft aldrig rullstolen när brukaren sitter i.

7.9 Drivringar

Som standard levereras Netti 4U Base med drivringar av aluminium. Brukarens möjlighet att ta tag i drivringen påverkas av materialet och avståndet till drivhjulet. Kontakta din återförsäljare för mer information om drivringar som passar just din rullstol.

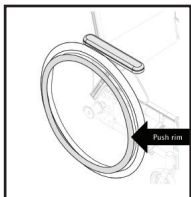

⚠ Andra drivringar kan ge bättre grepp, men kan även öka friktionen. Om man använder händerna för att stoppa rullstolen kan risken för brännskador på händerna öka.

👍 Det finns risk att man klämmer sig/fastnar med fingrarna i det trånga utrymmet och om fingrarna hamnar mellan ekrarna. För att undvika detta rekommenderar vi tillbehöret ekerskydd.

i Om du vill/behöver byta drivringar eller öka/minska avståndet mellan drivring och hjul ber vi dig kontakta återförsäljaren

8. TRANSPORT

Netti 4U Base är testad och godkänd i enlighet med krocktest ISO 7176-19.

8.1 Fällning för transport

När rullstolen inte används kan den fällas samman enligt nedanstående beskrivning. Lägg stolen i bagagerum eller bilens baksäte. Placeras stolen i baksätet ska den spännas fast med säkerhetsbälte.

- Ta bort huvudstödet (Avsnitt 6.12)
- Vrid tippskydden uppåt (Avsnitt 6.6)
- Ta bort benstöden (Avsnitt 6.11)
- Dra ut låsbulten för ryggstödet och fäll ryggstödet fram i sitsen (Avsnitt 6.10)
- Ta loss drivhjulen (Punkt 6.2)
- Ta bort länkhjulen (Punkt 6.3)


8.2 Transport i bil

Om huvudstödet är korrekt monterat är detta mycket stabilt, men ersätter inte behovet av ett extra nackstöd som monteras i bilen.

Rullstolen är markerad med etiketter på fyra platser som anger var remmarna ska fästas.



Netti 4U Base är testad och godkänd i enlighet med ISO 7176-19 tillsammans med ett kombinerat fästsystem, W120/DSIR, för rullstol och brukare, systemet är utvecklat av Unwin Safety Systems. För mer information gå in på: www.unwin-safety.com

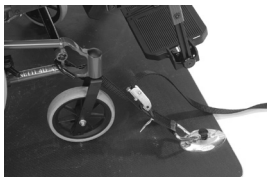

Fram: Använd krok eller fästrem.

Montera en öglebult i ett av hålen i hjulramens hållare. Kroka fast en Krok/karbinkrok i öglebulten.



Artikelnummer, 1 par öglebultar med bussning: 21074



Remmarnas vinkel bör vara 0-45°

A Netti 4U comfort|CES har krocktestats utan hjälpmotor etc. Om det vid senare tillfälle monteras hjälpmotor, trappklättrare etc. måste dessa demonteras när rullstolen ska transporteras.

9. SKÖTSELRÅD

9.1 Underhåll

Netti-rullstolar består av moduler. Alu Rehab lagerför alla reservdelar och kan leverera dessamedkortvarsel. Monteringsanvisningar medföljer alla reservdelar.

Delar som kan hanteras av användaren är markerade i reservdelskatalogen, som kan laddas ner via www.alurehab.com. Vid behov kan dessa reservdelar även demonteras och skickas till tillverkaren/återförsäljaren.

Komponenter som rör hjulramen får endast åtgärdas av tillverkaren eller auktoriserad serviceverkstad.

För reparation av mindre lackskador kan originalfärg beställas från Alu Rehab: Kontakta din återförsäljare för beställning.

A Om det uppstår defekter eller skador, kontakta återförsäljaren.

- ⚠ Kontrollera/efterspänn skruvar och muttrar regelbundet.
- ⚠ Sand och vägsalt (används för halkbekämpning) kan orsaka skador på drivhjulens lager och länkhjulen. Rengör rullstolen noga efter användning.
- ❗ Vi rekommenderar att rullstolen tvättas i tvättrum vid >85 °C.
- ❗ För mindre skador på ytan kan originalfärg beställas från tillverkaren.

9.2 Rengöring

Om man använder externt sittsystem ska tvättanvisningarna för dessa produkter följas.

1. Ta bort dynorna innan rullstolen tvättas.
2. Tvätta dynor och överdrag enligt anvisningarna på dynorna.
3. Gör rent ramen med vatten och en trasa.
4. Vid högtryckstvätt, rikta inte strålen direkt mot gasfjädrar, etiketter och ryggdyna.
5. Vi rekommenderar att man använder såpa.

Intervall	Varje vecka	Varje månad
Kontrollera för fel/defekter T.ex.brott/saknadedelar	X	
Tvätta av rullstolen		X
Smörj lager*		X
Tvätta dynorna		X
Kontrollera tippskyddet		X
Kontrollera bromsarna		X
Kontrollera däcken		X

* Som tumregel ska alla rörliga delar och lager smörjas med olja. Alu Rehab

rekommenderar vanlig cykelolja.

Rengöring av dynor

KÄRNA	
Tvätta	Handtvätt 40 °C
Desinfektion	Virkon S
	Autoklavkammare 105 °C
Torkning	Vrid ur vatten
	Låt lufttorka stående på kanten
ÖVERDRAG	
Tvätta	Maskintvätt 60 °C
Torkning	Torktumla, max 85 °C

6. Tvätta rullstolen noga med rent vatten för att skölja av all såpa.
7. Använd T-sprit för att ta bort eventuella smutsrester.

Desinficering av rullstolen

Avlägsna dynorna (Se separata tvättanvisningar). Använd en trasa med väteperoxid eller teknisk sprit (Isopropanol). Rekommenderad väteperoxid: NU-CIDEX "Johnson&Johnson"

10. FELSÖKNING

Symptom	Orsak/Åtgärd	I manualen
Rullstolen drar snett	• Drivhjulets nav kan vara felaktigt monterade • En av bromsarna är för hårt åtdragen • Brukaren sitter väldigt snett i stolen • Brukaren är kanske starkare i den ena kroppshalvan	6.2 6.14
Rullstolen är tung att köra	• Drivhjulets nav kan vara felaktigt monterade • Ta bort smuts från länkhjulen och gafflarna • För stor vikt är placerad över länkhjulen	6.2
Det är svårt att svänga rullstolen	• Kontrollera att länkhjulen inte är för hårt åtdragna • Ta bort smuts från länkhjulen och gafflarna • Kontrollera att länkhjulen är placerade i rätt läge	6.3 6.3
Drivhjulen är svåra att ta loss och sätta tillbaka.	• Rengör och smörj snabbutlösningen • Justera navhylsan så den kommer längre från ramen	6.2 6.2
Bromsarna tar dåligt	• Justera bromsarna	6.14
Rullstolen känns "skakig"	• Kontrollera och efterspänn skruvar och justeringspunkter	

-  Kontakta återförsäljaren för information om auktoriserade serviceverkstäder som kan hjälpa till om felsökningen inte löser problemet.
-  Kontakta återförsäljaren om du behöver reservdelar.
-  Om ändring ska göras som påverkar ramens konstruktion måste detta först godkännas av återförsäljaren/tillverkaren.

11. TESTER OCH GARANTI

11.1 Tester

Netti 4U Base är testad och godkänd för användning både inomhus och utomhus. Rullstolen är CE-märkt.

Max brukarvikt: 125 kg

Rullstolen är testad av TÜV SÜD Product Service GmbH enligt DIN EN 12183: 2009.



Krocktestad vid Millbrooke Proving Ground, Bedford UK, enligt ISO 7176-19

Netti sitt- och ryggdynor är brandtestade i enlighet med: ISO 7176-16

11.2 Garanti

Alu Rehab lämnar 5 års garanti på ram och ramdelar samt på tvärstag. På övriga delar, utom batteri, lämnas 2 års garanti. Alu Rehab ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av felaktig eller icke-fackmannamässig montering och/eller reparation, försummelse, slitage, montering av rullstolen utförd av personer eller institutioner som inte godkänts av Alu Rehab eller användning av reservdelar som levererats av tredje part. I ovanstående fall förverkas all garanti.



På ramen fins en etikett med ett unikt id-nummer.

11.3 Reklamationer

- All reklamation ska göras hos återförsäljaren. Observera att köpehandlingarnaskavarakorrektifyllda och undertecknade för att styrka tid och datum för köpet av rullstolen.
- Normalt anses defekter vara en orsak till reklamation. Återförsäljaren och Alu Rehab har beslutanderätt om huruvida en defekt ska repareras eller om kunden har rätt till reducerat pris, på grund av defekten.
- Detta beslut baseras på en bedömning av defekten. 14 dagar efter inlämnande av reklamation erhåller kunden en rapport från återförsäljaren och/eller Alu Rehab om hur defekten ska hanteras.
- Reklamationer ska göras så snart defekten upptäcks.



Normalt slitage, felaktig användning eller felaktig hantering är inte grund för reklamation.



Brukaren ska använda, underhålla och hantera rullstolen så som beskrivs i användarmanualen.

11.4 Reservdelsgaranti

- Alu Rehab lämnar 5 års garanti (som minst) på reservdelstillgång. Garantitiden anses börja den datum då Alu Rehab slutar tillverka den specifika typen av rullstol.
- Under denna garanti för reservdelstillgång levereras reservdelar inom 14 dagar.
- Under denna garanti för reservdelstillgång lämnar Alu Rehab 1 år sgaranti för defekta reservdelar.

11.5 Special/individuell anpassning

Special/individuell anpassning omfattar alla justeringar/anpassningar som inte omfattas av denna manual. Rullstolar som special/individuanpassas av kunden får inte behålla den CE-märkning som utfärdas av Alu Rehab A.S Norge. I ovanstående fall förverkas även den garanti som Alu Rehab A.S Norge tillhandahåller. Om det råder tveksamheter om specialmontering/-anpassning, vänligen kontakta Alu Rehab A.S.

11.6 Kombinationer med andra produkter

Om Nettikombineras med andra produkter, som inte tillverkas av Alu Rehab A.S

Är den allmänna regeln att alla former av CE-märkning, för alla berörda produkter, slutar gälla.

Dock har Alu Rehab A.S ingått avtal med vissa tillverkare om godkända kombinationer.

- ❗ För ytterligare information, kontakta återförsäljaren eller Alu Rehab A.S Norge.

11.7 Service och reparationer

Kontakta återförsäljaren för information om service och reparation i din närhet.

- ❗ Ett unikt id-nummer/serienummer finns på rullstolens underram, på vänster sida.
- ❗ Reservdelskatalog för den aktuella rullstolen kan beställas hos återförsäljaren eller laddas ner på www.alurehab.com
- ❗ En renoveringsmanual för den aktuella rullstolen kan beställas hos återförsäljaren eller laddas ner på www.alurehab.com

12. MÅTT OCH VIKT

Sittbredd*	Sittdjup**	Ryggstöd höjd***	Totalbredd	Transport- bredd	Vikt
35 cm	42,5-50 cm	50 cm	53 cm	48 cm	28,0 kg
40 cm	42,5-50 cm	50 cm	58 cm	53 cm	28,5 kg
45 cm	42,5-50 cm	50 cm	63 cm	58 cm	29,0 kg
50 cm	42,5-50 cm	50 cm	68 cm	63 cm	29,5 kg

* Mått mellan klädselskydden.

** Mått från framkanten på sitsplattan till ryggstödet led.

***Mått från framkanten på sitsplattan till toppen av ryggstödet.



Vikten är inklusive drivhjul, länkhjul, benstöd och armstöd. Utan dynor.



Max brukarvikt är 125 kg.



Vid montering av tillbehör så som hjälpmotor etc., tillbehörens vikt ska dras bort från max brukarvikt.

Återförsäljare:	
Serienr:	
Leveransdatum:	
Återförsäljarens stämpel:	



AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE

ALU_REHAB™

Bedriftsvegen 23
NO-4353 Klepp Stasjon, NORGE

Tfn +47 51 68 18 88

Fax +47 51 68 18 89

E-post: post@alurehab.com

www.alurehab.com

UM0100SE