

NETTI CUSTOMIZED- PRODUKT

INFORMATIONEN ZU IHRER
PERSÖNLICH ANGEPASSTEN
LÖSUNG

EINSCHLIESSLICH VERWENDUNG
UND TRANSPORT



Designed in Norwegen

Enable joy of life

WIR GRATULIEREN IHNEN

zu Ihrem fortschrittlichen Netti customized-Produkt.

ES WURDE SPEZIELL AUF SIE ABGESTIMMT - damit es Ihren Bedürfnissen bestmöglich gerecht wird. Bei korrekter Pflege und bestimmungsgemäßen Gebrauch wird es Ihnen vielen Jahre lang zuverlässig Dienste leisten.

■ Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um diese Einführung zu Netti Customized-Lösungen zu lesen. Hier wird erklärt, auf welcher Grundlage die Lösung entsteht und welche Gewährleistungsbedingungen gelten.

Ihr Netti Customized-Produkt wurde nach den Informationen entwickelt und gestaltet, die wir von Ihrem Therapeuten hinsichtlich Ihrer besonderen Bedürfnisse erhalten haben. Unser Team spezialisierter Rollstuhlbauer nutzt diese Informationen als Ausgangsbasis für seine Arbeit.

Die Lösungen werden auf Grundlage bewährter und eingehend geprüfter Konstruktionsprinzipien entwickelt. Sie bestehen aus Teilen, die für den Bau dieses Customized-Produkts speziell angepasst werden. Vor ihrer Auslieferung werden diese einzigartigen Lösungen einer Risikobewertung unterzogen und gemäß den Stabilitäts- und Funktionalitäts-Anforderungen geprüft, die für das Produkt gelten, damit Sie ein sicher verwendbares und zuverlässiges Produkt erhalten.

CE-KENNZEICHNUNG

Netti Customized Produkte erhalten keine CE-Kennzeichnung, weil es sich nicht um ein Serienprodukt handelt. Sie entstehen jedoch auf Grundlage langjähriger Erfahrung und Fachkompetenz und eignen sich in jeder Hinsicht für ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch.

RICHTLINIEN FÜR DIE VERWENDUNG

- Nehmen Sie sich die Zeit, alle Ihrem Netti Customized-Produkt beiliegenden Informationen zu lesen. Nur so können Sie das Produkt optimal nutzen.
- Bei einem Netti Customized-Rollstuhl lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung für den Rollstuhl, der als Ausgangsbasis für die Anpassung gedient hat, um sich über die Verwendung und Pflege Ihres Customized-Rollstuhls zu informieren.
- Wenn Ihr Netti Customized-Produkt Teil eines Rollstuhls ist, vergewissern Sie sich, dass Ihr Netti Customized-Produkt korrekt montiert und befestigt ist. Kontrollieren Sie die Halterung regelmäßig auf festen Sitz.
- Bei Netti Customized-Polsterprodukten müssen die auf dem Etikett vermerkten Reinigungsanweisungen für die Polsterung befolgt werden.
- Wenn das Netti Customized-Produkt über bewegliche Teile verfügt, müssen diese Teile regelmäßig geschmiert werden, damit sie optimal funktionieren.

Vergewissern Sie sich, dass Sie von Ihrem Händler alle Sonderinformationen und die erforderliche Unterweisung erhalten haben. Er ist für die Unterweisung verantwortlich und muss Sie über eventuelle Risiken und besondere Vorsichtsmaßnahmen informieren, die im Zusammenhang mit ihrem Netti Customized-Produkt zu beachten sind.

CRASH TEST

Alle einem Crash Test unterzogenen Netti-Rollstühle wurden mit Netti-Standardausrüstung getestet und für die Verwendung als Sitz in einem Fahrzeug zugelassen.

Netti Customized-Produkte sind NICHT crash-getestet. Rollstühle, die mit Netti Customized-Teilen ausgestattet sind, besitzen darum KEINE ZULASSUNG zur Verwendung als Sitz in einem Fahrzeug. Customized-Teile tragen folgendes Zeichen:



In Sonderfällen kann ein Customized-Rollstuhl einer Risikobewertung unterzogen werden, die feststellt, ob er ausreichend stabil für die Verwendung als Sitz in einem Fahrzeug ist. Einen entsprechenden Antrag müssen Sie bei Ihrem Alu Rehab-Händler einreichen.

Bei Verwendung als Sitz in einem Fahrzeug:

Es steht Ihnen frei, einen Netti-Rollstuhl (der crash-getestet und für die Verwendung als Sitz in einem Fahrzeug zugelassen ist) als Autositz zu nutzen, sofern Sie für die vorhandenen Customized-Komponenten, wie beispielsweise Kopfstütze oder Beinstützen, für die Nutzungsdauer des Rollstuhls als Autositz durch die Standardkomponenten ersetzen. Richten Sie sich bei der Montage der Komponenten streng nach der Montageanweisung in der Gebrauchsanweisung.

TRANSPORT IM AUTO:

Bitte beachten Sie bei der Verwendung eines Rollstuhls als Sitz in einem Auto die folgenden Anweisungen:

- Überprüfen Sie, dass der Rollstuhl für die Verwendung als Sitz in einem Auto zugelassen ist (gemäß ISO 7176-19:2008).
- Informieren Sie sich über das maximal zulässige Benutzergewicht und belasten Sie den Rollstuhl nicht über diese Grenze hinaus.
- Entfernen Sie alles Zubehör und alle Teile, die sich bei einem Aufprall lösen könnten. Bewahren Sie diese Teile gesichert an einem geeigneten Platz auf.
- Verwenden Sie immer ein zugelassenes Rollstuhl- und Personen-rückhaltsystem (ISO 10452:2012), um den Rollstuhl im Fahrzeug zu fixieren. Netti III wurde mit dem kombinierten Rollstuhl- und Personen-rückhaltsystem W120/DISR von Unwin Safety Systems erfolgreich getestet. Weitere Informationen finden Sie auf: www.unwin-safety.com

- Vergewissern Sie sich, dass der Rollstuhl über Ringschrauben für die Befestigung von Spanngurten an der Rückseite verfügt. Die Artikelnummer für ein Paar Ringschrauben mit Buchse lautet: 21074.




SICHERUNG DES ROLLSTUHLS


Vorne: Haken oder Spanngurthalterung verwenden.
Vorn am Rollstuhlrahmen weisen Aufkleber auf die vorderen Befestigungspunkte für die Spanngurte hin.



Hinten: Befestigen Sie in einem der Löcher in der Antriebsradhalterung eine Ringschraube. Haken Sie den Karabiner des Spanngurts in die Ringschraube ein. Der Winkel der Spanngurte sollte 0 bis 45° betragen.

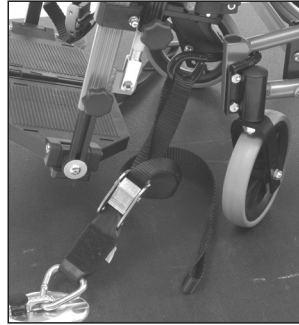

- ⚠ Verwenden Sie für den Benutzer des Rollstuhls immer die Rückhaltegurte des Autos. Das bei einem Rollstuhl zur Haltungskorrektur verwendete Geschirr kann Sicherheitsgurte nicht ersetzen. Die Sicherheitsgurte müssen eng am Körper des Rollstuhlbenutzers anliegen (nicht über die Armlehnen führen).

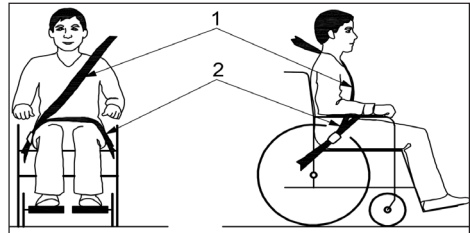

- ⚠ Netti Rollstühle wurden dem Crash Test ohne Elektroantrieb usw. unterzogen. Wird zu einem späteren Zeitpunkt ein Elektroantrieb, eine Treppensteighilfe usw. montiert, müssen Sie sich vergewissern, dass der Antrieb einen Crash Test für Rollstühle bestanden hat und für Rollstühle zugelassen ist, die als Sitz in einem Fahrzeug verwendet werden. Liegt eine solche Zulassung nicht vor, muss der Antrieb demontiert werden, wenn der Rollstuhl als Sitz in einem Fahrzeug verwendet werden soll.
- ⚠ Für Benutzer, die größer als 1,85 m sind, wird empfohlen die Rückenlehnenverlängerung montiert werden, wenn der Rollstuhl als Sitz in einem Fahrzeug verwendet wird.
- ⚠ Wenn die Breite des Rollstuhls die in PRM-TSI genannte maximale Breite von 700 mm überschreitet, kann dies die Möglichkeit eines Transports in Zügen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln einschränken.
- ⚠ Netti-Rollstühle wurden mit Netti-Kissen dem Crash Test unterzogen und zugelassen. Verwenden Sie immer Netti-Kissen, wenn der Netti-Rollstuhl als Sitz in einem Fahrzeug genutzt wird.
- ⚠ Eine korrekt montierte Netti-Kopfstütze ist sehr stabil, aber die Kopfstütze eines Autos ist für noch höhere Belastungen ausgelegt.
- ⚠ Verwenden Sie den Rollstuhl niemals als Sitz in einem Auto, wenn er bereits in einen Unfall mit Aufprall verwickelt war.

ZUSAMMENKLAPPEN FÜR DEN TRANSPORT

Wenn der Rollstuhl nicht von einer Person besetzt ist, klappen Sie ihn wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben zusammen. Transportieren Sie den Rollstuhl im Kofferraum oder auf der Rückbank. Bei Unterbringung auf der Rückbank muss der Rollstuhlrahmen mit Spanngurten gesichert werden, damit er bei einem Unfall nicht zur Gefahr für die Fahrzeuginsassen wird.

TRANSPORT IM FLUGZEUG

Für den Transport manuell angetriebener Netti-Rollstühle im Flugzeug gibt es keine Beschränkungen. Netti-Rollstühle sind mit zwei oder drei Gasdruckfedern ausgestattet. Diese sind nicht als gefährliche Güter eingestuft. Im Gegensatz zur allgemeinen Gefahrgutanweisung UN3164 unterliegen laut Vorschriften der IATA-DGR (Sonderbestimmung A114) Güter, die Gas enthalten und die Funktion von Stoßdämpfern erfüllen (einschließlich Energie absorbierende Vorrichtungen oder pneumatische Federungen) NICHT den oben genannten Transportanweisungen und sind daher von den folgenden Anforderungen ausgenommen:

- a) Jeder Artikel besitzt ein Gasvolumen, das 1,6 l nicht überschreitet, und sein Ladedruck überschreitet 250 bar nicht, wobei das Produkt aus Fassungsvermögen in Litern und Druck in bar den Wert 80 nicht überschreitet.
- b) Jeder Artikel weist einen Berstdruck von mindestens dem Vierfachen des Ladedrucks bei +20 °C auf bei Produkten mit nicht mehr als 0,5 l Gasfassungsvermögen.
- c) Jeder Artikel besteht aus einem Material, das sich nicht in Fragmente zerlegt.
- d) Jeder Artikel wurde nach Qualitätsstandards gefertigt, die von der zuständigen Behörde des Landes genehmigt worden sind.
- e) Es ist belegt und gezeigt, dass der Artikel seinen Druck mittels einer durch Feuer abbaubaren Dichtung oder einer anderen Druckablassvorrichtung so abbaut, dass der Artikel sich nicht in Fragmente zerlegt oder hochschießt.

FAHRTEN MIT ÖFFENTLICH VERKEHRSMITTELN

Der Rollstuhl sollte in einem gesonderten Bereich für Rollstühle abgestellt werden. Der Rollstuhl sollte mit der Rückseite in Fahrtrichtung ausgerichtet sein. Die Rückseite der Rückenlehne muss an einem festen Objekt anliegen, z. B. den Lehnen einer Sitzreihe oder einem Raumteiler. Achten Sie darauf, dass der Benutzer leicht Handläufe oder Haltegriffe erreichen kann.

GEWÄHRLEISTUNG

Alu Rehab bietet für Netti Customized-Produkte eine Reparaturgewährleistung von zwei Jahren. Netti Customized-Lösungen sind einzigartig und werden nicht in Serie produziert. Darum müssen Sie das Netti Customized-Produkt immer an Alu Rehab senden, wenn etwas daran repariert oder ausgewechselt werden muss..

Alu Rehab haftet nicht für Schäden, die aus der fehlerhaften oder nicht fachgerechten Montage und/oder aus Reparaturen, Versäumnissen, Verschleiß, Veränderungen an Rollstuhlteilen, die von Alu Rehab nicht genehmigt wurden, oder aus der Verwendung von Ersatzteilen resultieren, die von Fremdanbietern stammen. In den oben genannten Fällen erlischt der Garantieanspruch.

REKLAMATIONEN

- Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an den Vertriebsvertreter, bei dem Sie das Netti Customized-Produkt oder den Netti Customized-Rollstuhl gekauft haben. Beachten Sie, dass die Verkaufsunterlagen ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben sein müssen, um Zeit und Ort des Kaufs des Netti Customized-Produkts zu dokumentieren.
 - Jedes Netti Customized-Produkt trägt zur Kennzeichnung einen Aufkleber mit einer einzigartigen NeC-Nummer. Bitte geben Sie bei Fragen zum Produkt diese Nummer, die Rahmennummer des Rollstuhls oder die Bestellnummer an.
 - Allgemein werden Defekte als Reklamationsgründe anerkannt. Der Vertriebsvertreter und Alu Rehab entscheiden, ob ein anerkannter Mangel repariert werden muss oder ob der Kunde aufgrund des Mangels Anspruch auf eine Preisminderung hat. Diese Entscheidung beruht auf einer Bewertung des Mangels..
 - Reklamationen müssen sofort bei Feststellung des Defektes gemeldet werden!
- ! **Normaler Verschleiß sowie Mängel, die auf eine unzulässige Verwendung oder unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind, stellen keinen Reklamationsgrund dar.**
- ! **Um seinen Gewährleistungsanspruch zu wahren, ist der Benutzer verpflichtet, den Rollstuhl entsprechend der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung zu verwenden, zu warten und zu handhaben.**

IM DIALOG SCHAFFEN WIR EINFACHE LÖSUNGEN UND STEIGERN DIE LEBENSFREUDE

**WIR WÜNSCHEN IHNEN VIELE
KOMFORTABLE JAHRE MIT IHREM
NETTI CUSTOMIZED-PRODUKT**

Updates, Benutzerhandbücher und
Informationen zu unseren Standard-
Produkten finden Sie auf unserer Webseite

www.My-Netti.de

UM0123DE
2018-12

SIE ERREICHEN UNS UNTER FOLGENDEN ANSCHRIFTEN:



Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
4353 Klepp Stasjon
NORWAY

T: +47 51 78 62 20
post@My-Netti.com

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
DENMARK

T: +45 87 88 73 00
info@My-Netti.com

My-Netti.de