



Installationsanleitung - Montage eines 2- oder 4 Punkt-Gurtes an einen Rollstuhl mit fester Sitzplatte

- 2-Punkt Gurt an einen Rollstuhl mit fester Sitzplatte – bestellen Sie das Kit 45279
- 4-Punkt Gurt an einen Rollstuhl mit fester Sitzplatte – bestellen Sie das Kit 45280

Item Kit = 45279 besteht aus		
Anzahl	Artikelnummer	Beschreibung
2	86282	Gurt-Befestigungskit
2	41698	Gurt-Adapter
2	20032	Schraube M8
2	20068	Hülse M8
2	20412	Selbstsichernde Mutter M8

Artikel Nummer Kit 45280 besteht aus 2 X 45279

Um das Gurt-Befestigungskit 86282 an einen Stuhl mit fester Sitzplatte zu montieren, folgen Sie bitte der Anleitung MD0109DE. Diese können Sie von unserer Homepage herunterladen:

<http://de.my-netti.com/docs/mounting-descriptions/montageanleitung-universal-gurtbefestigungskit.pdf?sfvrsn=6>



Sobald Sie das Universal-Befestigungskit montiert haben, können Sie jedweden 2-Punkt-Gurt am L-Winkel montieren.

Mit dem Kit 45279 erhalten Sie 2 Gurt-Adapter 41698.

Sie können diese mit der Hülse, Schraube und Mutter am L-Winkel montieren, wie im Bild unten gezeigt.

Für einen 4-Punkt-Gurt benötigen Sie 4 Gurt-Adapter. Bitte bestellen Sie das Kit 45280.

Die Installation ist immer identisch.



Folgen Sie bitte der Anleitung auf der nächsten Seite, um den Gurt zu justieren.

Zwei-Punkt Becken-Haltegurt



1. Legen Sie den gewünschten Befestigungspunkt fest.
2. Zentrieren Sie den Gurt am Becken und ziehen Sie das Gurtende durch die Gurt-Halterung.
3. Ziehen Sie den Gurt straff.



Vier-Punkt Becken-Haltegurt



1. Legen Sie den gewünschten Befestigungspunkt fest.
2. Befolgen Sie die oben genannten Anweisungen zur Befestigung der ersten Riemen
3. Befestigen Sie die zweiten Riemen am Stuhl, bis diese in den ersten Riemen verankert sind.
4. Ziehen Sie die zweiten Riemen fest, damit sich die ersten Riemen nicht verschieben.



Einstellung:

Wenn der Gurt ordnungsgemäß eingestellt und gestrafft ist, sollte er fest genug sitzen und das Becken des Benutzers sichern. Ziehen Sie den D-Ring von gepolsterten Gurten fest, bis kein Spielraum mehr besteht und sich die Polster unter der Schnalle berühren. Muss die Gurtlänge für einen sicheren Sitz angepasst oder der Gurt zur Reinigung abgenommen werden, kann dies mithilfe der Gurtendittings erfolgen.



SICHERHEITSPRÜFUNG:

Wenn der Gurt ordnungsgemäß am Rollstuhl befestigt wurde, kann sich der Benutzer **nach vorne oder seitlich lehnen, um den korrekten Sitz zu prüfen.**

Prüfen Sie:

1. Normale Funktion der Schnalle und Befestigungsriemen.
2. Komfort - Achten Sie auf Bereiche, die reiben könnten.
3. Position - sollte der Gurt zu hoch oder niedrig befestigt sein, passen Sie die Befestigungspunkte an.
4. Störung mit anderen Geräten - Bringen Sie die Befestigungspunkte neu an, sofern erforderlich.

Diese Anleitung ist bei Lieferung immer Bestandteil jedes Gurtes und muss daher an den Benutzer oder Betreuer weitergeleitet und gespeichert werden.

Haben Sie weitere Fragen zu diesem Produkt oder zu dieser Montageanleitung, dann wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Diese und weitere Montageanleitungen finden Sie auch auf unserer Homepage unter:

<http://de.my-netti.com/downloaden/bedienungsanleitungen>