




## Mounting description – MD0179 DE Kippstützen – Einstellung


Aufgrund der Verpackung sind die Kippstützen noch nicht in der korrekten Position eingestellt, wenn Sie den Rollstuhl auspacken. Versichern Sie sich bevor dem Benutzen des Rollstuhles, dass die Kippstützen in der korrekten Position eingestellt sind!

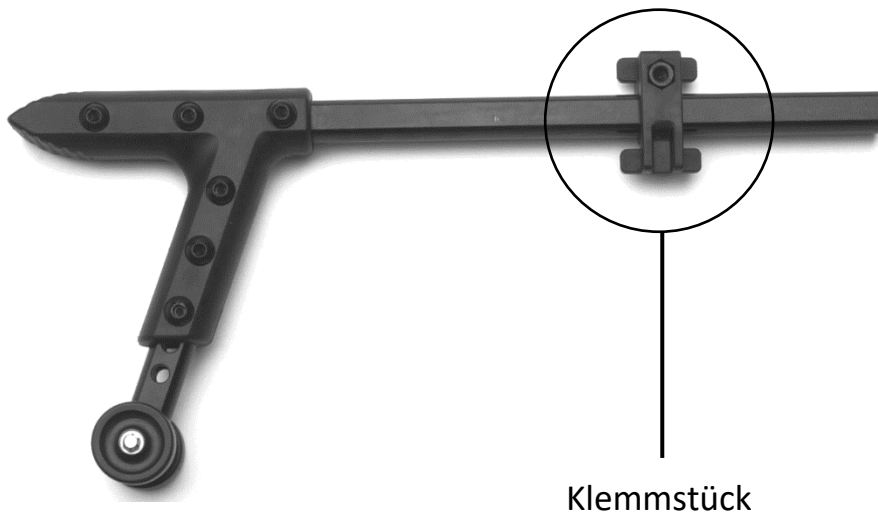

Korrekt eingestellte Kippstützen sollten mit dem Ende des Antriebsrades abschließen.

Die Kippstützen werden folgendermaßen eingestellt:

- ° Lösen Sie das Klemmstück von der Kippstütze mit einem Inbusschlüssel.
- ° Ziehen oder drücken Sie die Kippstütze in die erforderliche Position.
- ° Klemmstück fixieren und festschrauben.
- ° Führen Sie die gleiche Prozedur auf der anderen Seite durch.

 Kontrollieren Sie, dass beide Kippstützen die gleiche Länge haben. Sollten die Kippstützen über das Ende der Antriebsräder herausstehen, können Konflikte bei Bordsteinen und Stufen auftreten.



Werkzeug: 6 mm Inbusschlüssel