



Montageanleitung – Bodypoint Fußgelenk-Riemen (Ankle Huggers)

Sie erhalten zusammen mit den Fußgelenk-Riemen der Firma Bodypoint das Netti-Montageset 45024 zur Befestigung der Fußgelenk-Riemen auf einem Netti-Fußbrett.

Dieses Montageset besteht aus 8 Schrauben M5X16, 8 Unterlegscheiben M6 und 8 selbstsichernden Muttern M5. 4 Schrauben und Zubehör pro Fuß.

1. Positionieren Sie zuerst die Füße auf dem Fußbrett oder den Fußplatten und nehmen Sie eine Gurtführung pro Seite. Markieren Sie die in der Führung befindlichen Löcher und bohren Sie pro Führung 2 Löcher in die Fußplatte.



2. Stecken Sie nun die Schraube durch das Loch in der Führung und durch das Loch in der Fußplatte. Führen Sie die Unterlegscheibe von unten über die Schraube und schrauben Sie die Mutter fest an.



3. Wiederholen Sie dies für den anderen Fuß.



4. Befestigen Sie nun die Fußgelenk-Riemen wie in der Beschreibung von Bodypoint erwähnt.




Die Montageanleitung von Bodypoint finden auf Seite 2 und 3 dieser Anleitung.

2016-04- MD0110DE

Ankle Huggers®

INSTALLATIONS – UND GEBRAUCHSANLEITUNG

ART NOS. FT210 & FT220

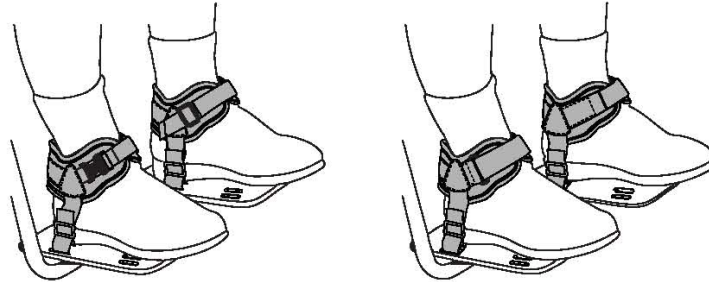

Diese Anleitungen enthalten wichtige Informationen über die sichere Benutzung und Wartung sämtlicher Bodypoint Knöchelgurte. Stellen Sie diese Anleitung dem Benutzer oder dem Pflegepersonal zu Verfügung, und besprechen Sie die Inhalte, um sicherzustellen, dass die Anleitung verstanden wurde.

⚠ WARNHINWEIS! Die Produkte sind von einem Fachmann für orthopädische Technik zu installieren und anzupassen.

BEVOR SIE BEGINNEN: Knöchelgurte dürfen nur von Personen verwendet werden, die einen ordnungsgemäß angelegten Hüftgurt tragen. Obwohl Knöchelgurte an Fußstützen jeglichen Typs montiert werden können, ist die erforderliche Positionierung des Benutzers zu beachten, bevor sie auf klappbaren Fußplatten montiert werden. Knöchelgurte sollten über normalen Schuhen getragen werden – stark gepolsterte Schuhe und orthostatische Geräte können den ordnungsgemäßen Sitz stören.

GEBRAUCH:

⚠ WARNHINWEIS! Dieses Produkt ist nur zu verwenden, um eine Person in einem Rollstuhl zu positionieren. Es dient NICHT als Sicherheitsvorrichtung während des Transports, und nicht als Rückhaltevorrückung oder als sonstige Anwendung, bei der durch falsche Handhabung Verletzungen entstehen könnten. Ein Missbrauch dieses Produkts ist nicht zulässig und nicht sicher.

⚠ WARNHINWEIS! Wie bei jeder neuen Sitzhaltungsunterstützung kann sich durch das Produkt die Art und Weise, wie eine Person sitzt, verändern. Benutzer müssen weiterhin regelmäßige Aktivitäten zur Druckentlastung und Hautzustandsüberprüfungen durchführen. Dies darf sich nicht auf den Bereich beschränken, an dem das Produkt den Benutzer berührt, sondern muss auch für die wichtigsten Druckaufgabebereiche wie das Kreuzbein,

die Beine und das Gesäß erfolgen. Wenn eine verstärkte Hautrötung oder Hautirritationen auftreten, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, und konsultieren Sie Ihren Arzt oder Ihren Sitzspezialisten. Anderenfalls können daraus ernsthafte Verletzungen wie z.B. Druckgeschwüre resultieren.

WARTUNG: Prüfen Sie die Nähte, das Gurtband und die Polster regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen. Wenden Sie sich bei deutlichen Abnutzungserscheinungen an den Hersteller, der eine Reparatur oder einen Ersatz durch Bodypoint veranlassen wird. Das Produkt darf keinesfalls von nicht qualifizierten Personen verändert oder repariert werden – die Gesundheit und Sicherheit des Benutzers hängen an diesem Gurt!

☰☠☑☒ REINIGEN: Maschinenwäsche, warm, 40° C. Nicht bleichen. Trocknen im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur oder Lufttrocknung. Nicht bügeln. (Durch die Verwendung eines Kleiderbeutels für das Produkt können Kratzer am Produkt und in der Maschine vermieden werden.)

GARANTIE: Für dieses Produkt besteht eine eingeschränkte Gewährleistung auf Fehler in Material und Verarbeitung, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch durch den ursprünglichen Kunden entstehen. Wenden Sie sich im Garantiefall an den Lieferant oder Bodypoint.

Weitere Informationen über Bodypoint Produkte und eine Liste der Vertreter außerhalb der USA befinden sich auf der Webseite www.bodypoint.com.


 **Bodypoint**

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30173 Hannover
Germany 

558 First Ave. S., Suite 300 | Seattle, WA 98104 | 206.405.4555 | 800.547.5716 | www.bodypoint.com



BPI001-de 2015.5

2016-04- MD0110DE

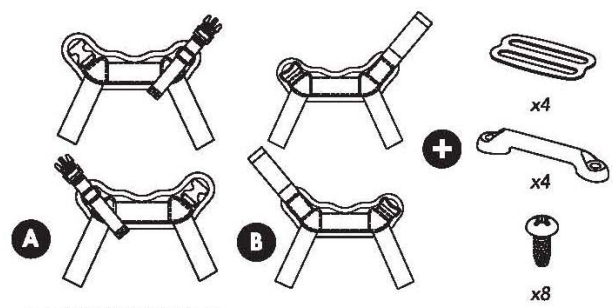


PACKUNGSIHALT

- A** Seitlicher Verschluss: Linker und rechter Fußgurt oder
 - B** Klettband: Linker und rechter Knöchelgurt
- Einstellbares Montage-Set

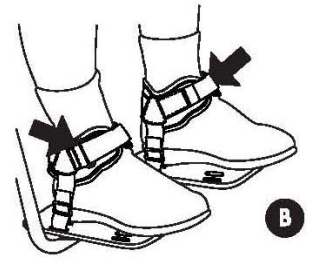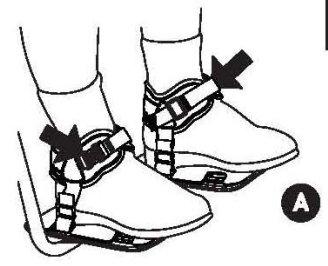


AUSRICHTUNG

- A** Seitlicher Verschluss: Die Hartplastik-Schnallen werden auf der Außenseite platziert.
- B** Klettband: Die Hartplastikschnaufe wird auf der Innenseite getragen, während sich das Kletteinstellband auf der Innenseite befindet.




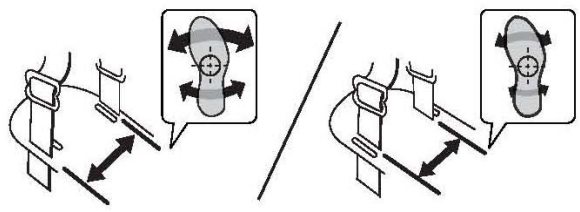


POSITIONIERUNG

Die Platzierung der Gurte ermöglicht verschiedene Bewegungsgrade. fästbandens längd.

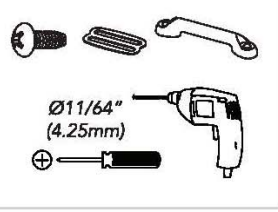

Ø11/64" (4.25mm)

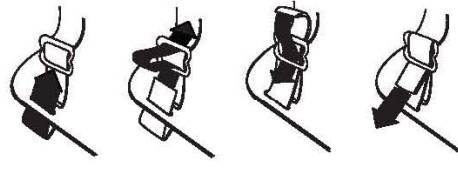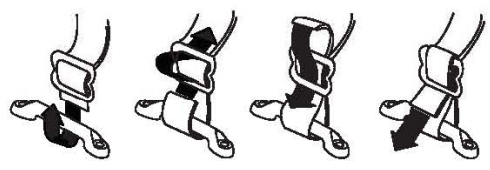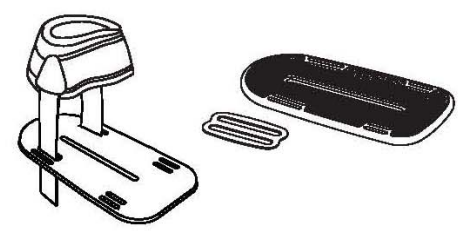
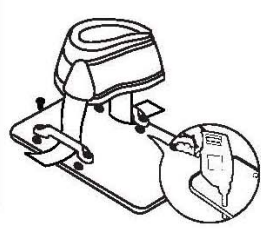


EINSTELLBARES MONTAGE-SET

- Benötigtes Werkzeug: Elektrischer Bohrer, Bohraufsatz Ø 4,25 mm und Kreuzschraubenzieher No. 2
- Markieren Sie die Montageposition, bohren Sie die Löcher und bringen Sie die Befestigungsteile an.
- Führen Sie das Gurtband wie dargestellt durch die Öffnungen.

GESCHLITZTE FUSSPLATTE VON BODYPOINT (Art.-Nr. FT051 & FT052)

- Kein Werkzeug erforderlich
- verwenden Sie die Fußplattenschlitze.
- Führen Sie das Gurtband wie dargestellt durch die Öffnungen.

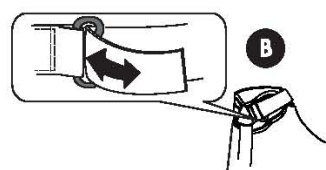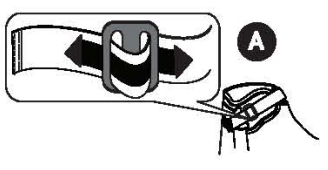

ABSCHLIESSENDE EINSTELLUNG

Ziehen Sie die Gurte fest um den Knöchel des Benutzers.

Für weitere Informationen zur korrekten Anpassung der Ankle Huggers können Sie die Broschüre "Positionierung der Füße" bei Ihrem Händler anfordern oder von www.bodypoint.com downloaden (in Englisch)