

MONTAGEANLEITUNG

Netti Rückenverlängerung




Artikel nr : 43799

Rückenverlängerung für Netti III, Netti 4U
CE Plus and Netti 4U CED

1. Entfernen Sie die Plastikabdeckungen von den Rückenrohr-Enden oben.



2. Netti III og Netti 4U CE Plus:
Entfernen Sie die M6 Sechskant-Schrauben **A** links und rechts. NB: Halten Sie die Mutter innerhalb des Rohres mit eine Zange fest und entfernen Sie sie.

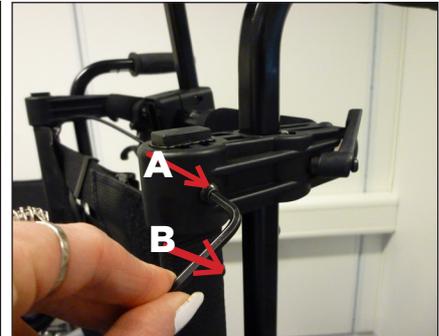

An sämtliche Modelle: Entfernen Sie die Schrauben **B** die zur Fixierung des einstellbaren Gurtrückens dienen.

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
3. Netti Rückenverlängerung besteht aus 2 Rohren mit jeweils einem Rückenverlängerungs Klettverschluss.



4. Stecken Sie nun die Rückenverlängerungsrohre in die Rückenrohre.



5. Netti III og Netti 4U CE Plus:
Schrauben Sie an jeder Seite die M6 Sechskantschraube **A** zurück in den Beschlag der Schiebebügel und in der Vierkantschraube die im Rückenverlängerungsrohr sitzt. Lassen Sie die Schraube etwas locker damit das Verlängerungsrohr bewegt werden kann.



An sämtliche Modelle: Schrauben Sie an jede Seite eine neue M4 Linsenkopfschraube **B** in das rückwärtsgewandte Loch in das Rückenrohr wo Schraube **B** sass. Bewegen Sie das Verlängerungsrohr rauf und runter bis die Schraube in ein Gewindeloch im Rückenverlängerungsrohr einrasten. Es gibt 4 mögliche Höhen: +100 mm, +172,5 mm, +199 mm, +225 mm. Achten Sie darauf, dass die Schrauben mit dem vorgebohrten Loch in den Rückenverlängerungsrohren übereinstimmen.



Ziehen Sie an beiden Seiten die M6 und die M4 Schrauben fest.

Bitte beachten Sie, dass durch den verlängerten Rücken der Rollstuhl bei nach hinten geneigter Rückenlehne oder Sitzeinheit dieser etwas durch den verlagerten Schwerpunkt an Stabilität verlieren kann. Überprüfen Sie die Stabilität, wenn die Rückenverlängerung montiert ist und der Nutzer im Rollstuhl sitzt. Die Position der Antriebsräder und die Kippstützen müssen eventuell nach hinten verlagert und versetzt werden um die Stabilität wieder herzustellen.

