

Montageanleitung – Verstärkter Verriegelungsmechanismus - Fussbrett – NDS- DUAL

Diese Anleitung zeigt, wie man den Verriegelungsmechanismus eines Standard-Fußbrettes entfernt und wie dieser durch den verstärkten Verriegelungsmechanismus ersetzt wird.

Anmerkung: Es ist nicht möglich, die verstärkte Verriegelungseinheit auf eine normale Beinstütze zu montieren, da das Fußstützen-Rohr, mit der die Höhe des Fußbrettes eingestellt wird, nicht mit der Aufnahme des verstärkten Verriegelungsmechanismus kompatibel ist.

Die Standard-Beinstütze hat ein quadratisches Rohr und die NDS-DUAL-Beinstütze hat ein rundes Rohr.

Mit dem verstärkten Verriegelungsmechanismus erhalten Sie 2 neue Schrauben. Später müssen Sie die vorhandenen Schrauben durch diese ersetzen.



Der verstärkte Verriegelungsmechanismus kann in 2 Ziehrichtungen an der Beinstütze montiert werden:

Im Lieferzustand ist der Auslösehebel standardmäßig nach vorn gerichtet

Vorwärtsrichtung

Rückwärtsrichtung



Benötigte Werkzeuge:
Inbusschlüssel - 6, 5 und 4
Maulschlüssel - 17 und 10




Beginnen Sie mit der Demontage des Standard-Verriegelungsstiftes. Um die Schraube und Mutter an der Unterseite des Fußbrettes zu entfernen, verwenden Sie den Inbusschlüssel 4 und den Maulschlüssel 10. Legen Sie Schraube und Mutter für die spätere Montage der verstärkten Verschlusskugel beiseite.



Entfernen Sie nun den Standard-Verriegelungsstift aus dem Fußbrett-Rohr.

Verwenden Sie den Inbusschlüssel 5 + 6, um den Standard-Verriegelungsmechanismus zu entfernen. Im Inneren des Mechanismus und des Fußstützen-Rohres sehen Sie 2 Muttern, mit denen die Schrauben im Verschluss fixiert sind. Schieben Sie nach der Demontage die kleinere Mutter wieder in das Rohr zurück.

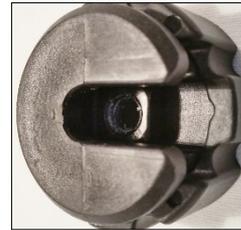

Führen Sie nun das Beinstützen-Rohr in die Halterung ein und platzieren Sie die kleinere Mutter mit Hilfe der Rückseite des Inbusschlüssels innerhalb des Rohres bis die Mutter mit dem oberen Loch im Verschluss in der Position übereinstimmt.



Nutzen Sie die 2 neuen Schrauben, um das Rohr und die Halterung zu verbinden. Die Schrauben mit den Inbusschlüsseln 5 + 6 fest anziehen.



Bevor Sie die nächsten Schritte ausführen, müssen Sie entscheiden, in welche Richtung Sie den Verriegelungsstift montieren möchten.

Im Lieferzustand ist der Stift vorne montiert. Wenn Sie sich entscheiden, diese Richtung beizubehalten, müssen Sie die richtige Installation der Verriegelung in der Halterung überprüfen. Für die Vorwärtsrichtung muss die Verriegelungskugel im Fußbrett so montiert werden, dass die Bohrung in der Verriegelungskugel nach vorne zeigt.



Wenn Sie die Rückwärtsrichtung verwenden möchten, muss die Verriegelungskugel so am Fußbrett montiert werden, dass die Bohrung in der Verriegelungskugel nach hinten zeigt und die abgeflachte Seite nach vorne.



Basierend auf Ihrer Entscheidung, schieben Sie Verschlusskugel in das Rohr auf der Unterseite des Fußbrettes ein und befestigen Sie diese mit der Schraube und Mutter, die Sie bei der Demontage beiseitegelegt haben. Eine Montage in Vorwärtsrichtung bedeutet, dass das Loch in der Verriegelungskugel nach vorne zeigt, wenn das Fußbrett in die Gebrauchslage zurückgedreht wird.



Der Verriegelungsstift kann nun an der Halterung angebracht werden. Schrauben Sie den Sicherungsstift soweit in die Halterung ein, dass sich das Ende des Gewindes in einer Linie mit der Innenkante des Loches befindet. Mit dem Maulschlüssel 17 die Mutter am Verriegelungsstift fest in dieser Position anziehen.



Ein zu weit in das Schraubengewinde eingeschraubter Verriegelungsstift verhindert, dass die Verschlusskugel vollständig in die Aufnahme der Halterung fällt.



Mit Hilfe des Inbusschlüssels 5 können Sie die Stellschraube (Madenschraube) in der dem Verriegelungsstift gegenüberliegenden Bohrung anziehen und somit eine gewisse Spannung einstellen.



Prüfen Sie nun, ob die Verriegelungskugel glatt in die Aufnahme der Halterung fällt und justieren Sie wenn nötig den Verriegelungsstift oder die Stellschraube nach.



Durch Ziehen und Drehen des Knopfes des Verriegelungsstiftes kann der Stift in eine verriegelte oder entriegelte Position eingestellt werden.

Verriegelte Position



Entriegelte Position



Bitte beachten:

Im Gebrauch des Rollstuhles muss der Verriegelungsstift sich immer in der verriegelten Position befinden.



Diese Anleitung ist bei Lieferung immer Bestandteil jedes verstärkten Verriegelungseinheit und muss daher an den Benutzer oder Betreuer weitergeleitet und gespeichert werden.

Haben Sie weitere Fragen zu diesem Produkt oder zu dieser Montageanleitung, dann wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Diese Montageanleitung finden Sie auch auf unserer Homepage unter:

<http://de.my-netti.com/downloaden/bedienungsanleitungen>