


# QUICK START GUIDE NETTI MOBILE

Kurz-Bedienungsanleitung  
für den Netti Mobile

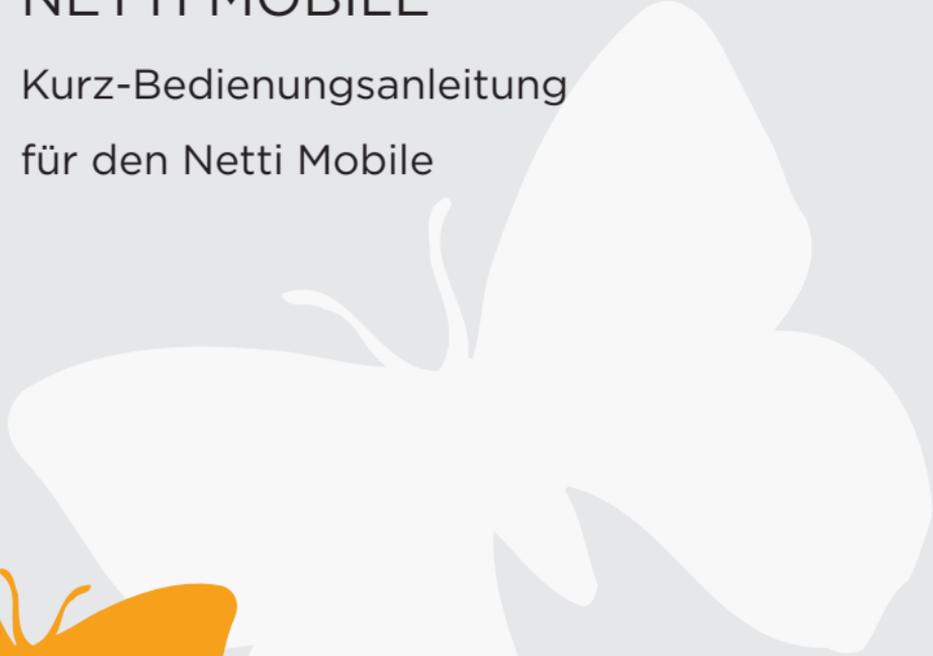

*Enable joy of life*

My-Netti.com

# HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

zur Anschaffung eines Elektrorollstuhls Netti Mobile der Firma Alu Rehab. Bei sorgsamer Behandlung wird Ihnen der Elektrorollstuhl über Jahre hinaus viel Freude bereiten.

- Bitte nehmen Sie sich Zeit, diese Kurz-Bedienungsanleitung und die Bedienungsanleitung zu lesen. Beide Dokumente helfen Ihnen, sich mit dem Produkt vertraut zu machen und beschreiben Ihnen, wie Sie den Rollstuhl optimal für sich nutzen können.

Ihr Netti Mobile ist für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich entwickelt. Durch die hohe Wendigkeit bei gleichzeitig niedrigem Platzbedarf ist der Rollstuhl besonders für Innenräume mit reduziertem Platzangebot geeignet. Darüber hinaus kann der Rollstuhl im Außenbereich auf gut befestigten Wegen und öffentlichen Plätzen gefahren werden. Wir empfehlen, das Fahren auf unzulänglich befestigten Wegen und steilen Wegpassagen zu vermeiden.

## GEBRAUCHSANLEITUNG

- **Laden Sie die Batterien jede Nacht.** Detaillierte Anweisungen hierzu finden Sie Kapitel 10 in Ihrer Bedienungsanleitung.
- Wie bei allen elektrisch betriebenen Fahrzeugen hängt die Reichweite des Rollstuhles stark davon ab, wie und wo er genutzt wird, und wie sorgsam die Wartung erfolgt ist. Unabhängige, nach internationalem Standard ausgeführte Tests haben eine Reichweite von ca. 25 Kilometer bei vollgeladener Batterie ergeben. Im täglichen Gebrauch könnten Sie jedoch feststellen, dass diese Reichweite kürzer ist. Die Umgebungstemperatur, zu überwindende Schwellen, der befahrene Untergrund und eventuell auftretende Steigungen beeinflussen die Reichweite des Rollstuhles entscheidend.
- Wir empfehlen jede Fahrt im Vorfeld zu planen, um ein „Liegenbleiben“ mit leerer Batterie zu vermeiden. Falls Sie jedoch während der Fahrt feststellen sollten, daß die Batterieanzeige in die gelbe Zone wechselt, kehren Sie bitte sofort um. Wenn die Batterieanzeige in die rote Zone wechselt und Sie Ihre Fahrt fortsetzen, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, daß die Batterien einen ernsthaften und irreparablen Schaden erleiden.

Die Möglichkeit „Liegenzubleiben“ kann durch folgende Maßnahmen deutlich reduziert werden:

- Versichern Sie sich, daß die Batterien des Rollstuhls vollgeladen sind, bevor Sie eine Fahrt antreten.
- Nutzen Sie, wenn möglich immer Bordsteinabsenkungen statt über erhöhte Bordsteinkanten zu fahren.

- Falls Ihr Rollstuhl mit Luftbereifung ausgestattet ist, sorgen Sie immer dafür, daß die Reifen ordnungsgemäß mit Luft befüllt sind - **35 psi oder 2,4 bar**.
- Vermeiden Sie den Transport von Lasten an den Schiebegriffen. Dies fördert die Instabilität des Rollstuhles.
- Seien Sie besonders vorsichtig und vermeiden Sie wenn möglich eine Fahrt auf unbefestigten Untergründen wie z.B. Kies, Schnee, Eis oder Matsch. Das Befahren von unbefestigten Untergründen oder auch starken Steigungen kann zu einem Verlust der Haftung der Räder zum Untergrund und dabei Verlust der Kontrolle der Lenkung führen.  
Bitte lesen Sie hierzu Kapitel 9 der Bedienungsanleitung.

## FESTGEFAHREN?

Wir empfehlen dringend, Situationen zu vermeiden, die zu einem „FESTFAHREN“ des Rollstuhles führen können. Falls dies jedoch einmal geschehen sollte, folgen Sie bitte den hier aufgeführten Schritten:

- 1) Lassen Sie den Fahrhebel (Joystick) los.
- 2) Schauen Sie, was den Rollstuhl an seiner Fahrt hindern könnte. Es könnte sich um eine Schwelle handeln, die die Lenkräder blockiert. Ein schlüpfriger Untergrund, Wasser etc. könnte auch Ursache des Verlustes der Traktion und Grund des Stoppens sein.
- 3) Versuchen Sie, den Ursachen entgegenzuwirken, und entfernen Sie lose Gegenstände die sich im Fahrweg befinden. Steuern Sie um eventuell blockierende Hindernisse herum.
- 4) Steuern Sie mit dem Fahrhebel in die Richtung, die den Rollstuhl aus der festgesetzten Situation befreien könnte. **Wenn der Rollstuhl innerhalb von 15 Sekunden sich nicht bewegt, schaltet sich das elektrische System aus und die Batterieanzeige blinkt.**
- 5) Lassen Sie den Fahrhebel los, warten Sie 30 Sekunden und versuchen Sie es erneut mit einer anderen Fahrrichtung.
- 6) Falls auch dies nicht zum gewünschten Ergebnis führt, vergewissern Sie sich erneut und entfernen Sie was den Rollstuhl an der Weiterfahrt hindern könnte.
- 7) Falls durch Anwendung aller oben genannten Aktionen ein Weiterfahren nicht möglich sein sollte, rufen Sie nach Hilfe.

## ACHTUNG!

**Das Ausschalten des elektrischen Systems bedeutet, dass der Motor schwer beansprucht worden ist. Wenn dies mehrmals wiederholt wird, wird der Motor dauerhaft beschädigt.** Wenn der Rollstuhl sich nicht bewegen kann, darf der Fahrhebel nicht weiterhin aktiviert gehalten werden, weil der Motor sich dabei überhitzt.

Sollte eine unsachgemäße Nutzung erfolgen, können die Motoren und/oder das Kontrollsystem überhitzen. Das Kontrollsystem wird dann den Rollstuhl automatisch abschalten.

Falls dies mehrmals auftreten sollte, lassen Sie den Rollstuhl für mindestens 5 Minuten ausgeschaltet, um die Aggregate abkühlen zu lassen. Jeder Versuch, den Rollstuhl mit überhitzten Komponenten zu fahren, kann zu dauerhaften Schäden der Komponenten führen. Die so verursachten Schäden werden von der Garantie nicht gedeckt.

## DIE FAHRSPERRE

Der Netti Mobile verfügt über ein elektronisches Schloss, um den unautori- sierten Zugriff auf den Rollstuhl zu unterbinden.

### SPERRUNG DES ROLLSTUHLES:

Drücken Sie bei eingeschalteten Rollstuhl den EIN/AUS-Schalter für 4 Sekunden. Der Rollstuhl wird unverzüglich ausgeschaltet und die Sperre ist aktiviert.

### ENTSPERREN DES ROLLSTUHLES:

Drücken Sie kurz den EIN/AUS-Schalter.

Drücken Sie die Hupe zweimal innerhalb von 10 Sekunden. Die Sperre ist wieder aufgehoben.

In der ausführlichen Bedienungsanleitung finden Sie weitere Hinweise und Instruktionen zum Umgang mit Ihrem Netti Mobile.

UM0117DE 2017-11

## WIR WÜNSCHEN IHNEN VIELE JAHRE FREUDE BEIM FAHREN IHRES NETTI MOBILE.



Alu Rehab AS  
Bedriftsvegen 23  
N-4353 Klepp Stasjon  
NORWAY

Alu Rehab ApS  
Kløftehøj 8  
DK-8680 Ry  
DENMARK

Neueste Informationen,  
sowie die Bedienungs-  
anleitung finden Sie auf  
unserer Internet-Seite:

[My-Netti.de](https://www.my-netti.de)