

Le petit guide du fauteuil Dynamique

 **Netti**® Dynamic System
COMFORT

Netti®
BY ALU REHAB

RELÈVE-JAMBES

En serrant la vis moletée, vous bloquez le système dynamique. En la desserrant, la fonction dynamique des relève-jambes est activée.



AJUSTEMENT DES APPUI-MOLLETS

Ajustement de la profondeur



Ajustement de la hauteur



REPOSE-PIEDS

Emboîtez l'embout métallique dans la partie en plastique. Tournez la roue vers l'avant pour verrouiller; et dans le sens inverse pour déverrouiller.




Ajustement de la longueur:
Desserrez les vis, ajustez la longueur, resserrez.



CEINTURE PELVIENNE



Desserrez la vis, et ajustez l'écrou de fixation afin que l'angle de la ceinture soit entre 70 et 90°. Resserrez la vis pour verrouiller.

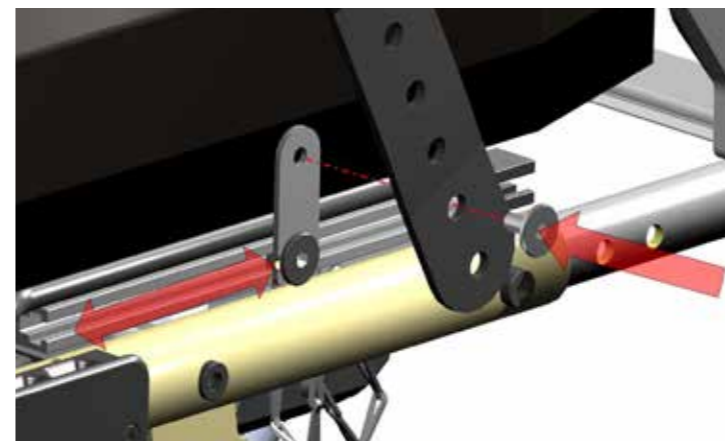

FONCTION DOSSIER

Activation du dossier dynamique 40°: Serrez la poignée du côté droit; le fauteuil sera automatiquement verrouillé en Dynamique.

Désactivation du dossier dynamique: Appuyez sur la poignée et son verrouillage, puis laissez-les se desserrer.

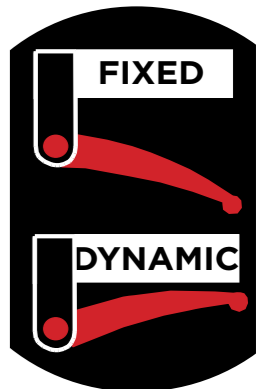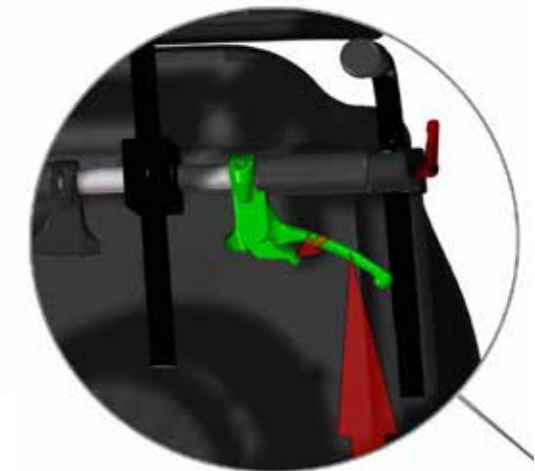

MAINTENANCE

Dû à une utilisation intense, les fauteuils équipés du Netti Dynamic System requièrent une maintenance régulière. Les tremblements et schémas d'extension continus peuvent amener à un desserrage progressif des vis. Vérifiez les vis et resserrez si nécessaire une fois par mois.

PLAQUE D'ASSISE

Sortez la tige du trou supérieur, et placez le dans le trou en dessous, verrouillant ainsi le mécanisme autour du tube sous le châssis.

