

Viktige funksjoner


Netti® Dynamic System rullestol

COMFORT

Netti®
BY ALU REHAB

BENSTØTTEFUNKSJONER


Låsing for hvile: stram stjernehjulene på begge sider. Løsne for full dynamisk funksjon.

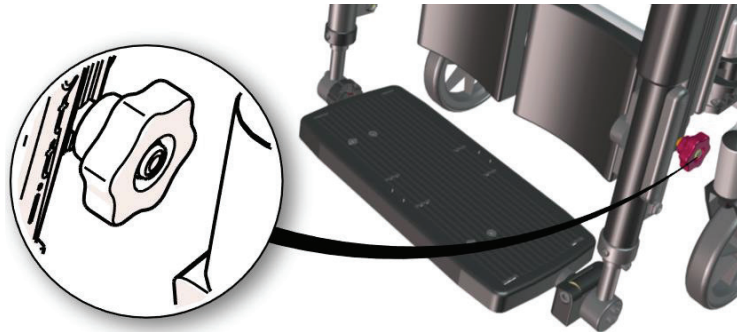

JUSTERING AV LEGGPUTER


Dybdejustering

Høydejustering

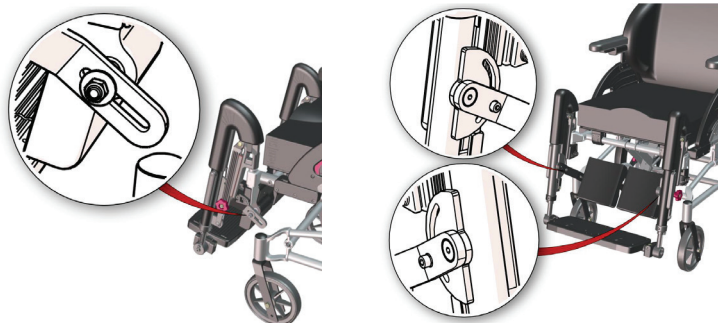


FOTPLATE

Lås av fotplate: la bolten falle i låsen og vri den riflede ringen. Vri tilbake for å løsne.

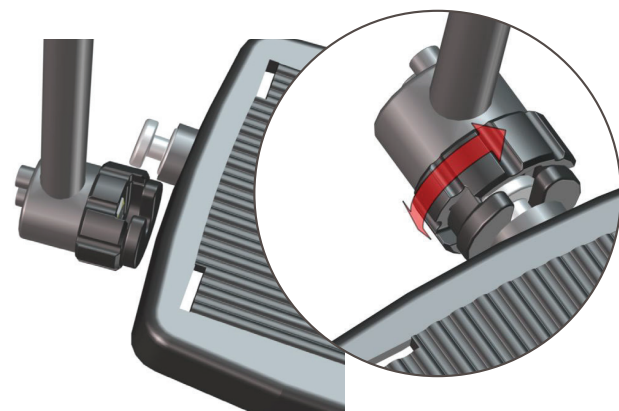


Lengdejustering:
Løsne skruene. Fest når fotplaten har passelig høyde.

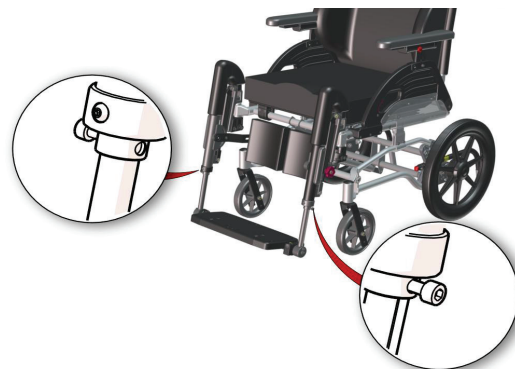

HOFTEBELTE


Innfesting: skru fast i øvre hull på beslaget.
Justering av beltevinkel: løsne nedre skrue på beslaget og skyv det langs skinnen hvor det er festet, til ønsket posisjon. Stram skruene.

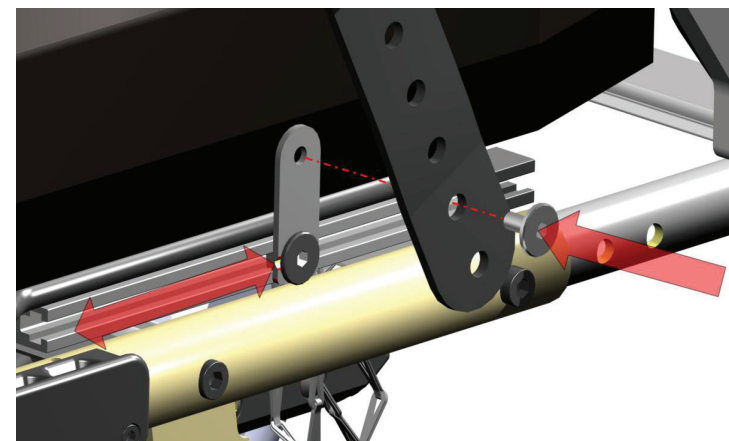

RYGGREGULERING

Aktivering av dynamisk ryggfunksjon:
Klem inn høyre håndtak, det blir stående inne og stolens rygg er dynamisk.

Låsing av ryggfunksjon:
Klem inn høyre håndtak + det lille, røde håndtaket og slipp begge ut. Ryggen er låst i den posisjon den sto da du slapp ut håndtakene.

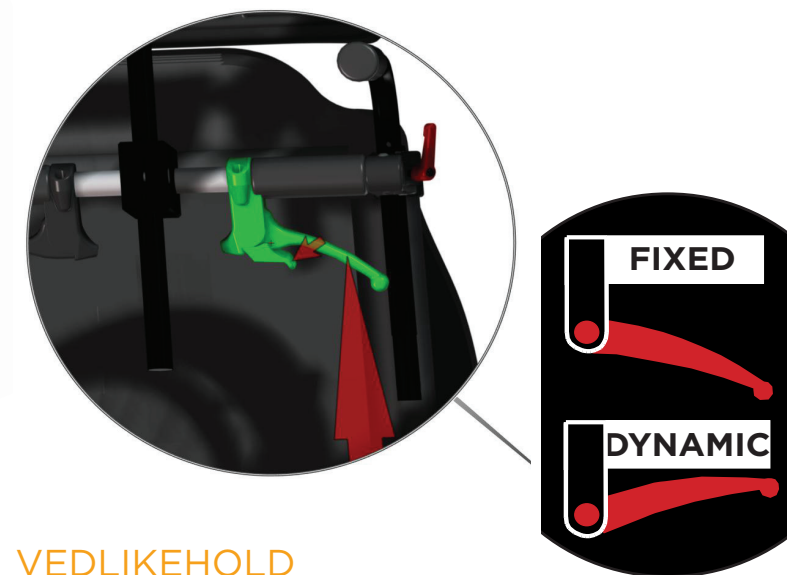

VEDLIKEHOLD

Rullestoler med Netti Dynamic System trenger regelmessig vedlikehold på grunn av hard bruk. Spesielt skjelving og regelmessig risting kan få skruer til å løsne. Kontroller skruene en gang i måneden og stram ved behov.

SETEPLATE

Låsefunksjon: trekk ut bolten fra sin øvre posisjon og skyv den inn i nedre slik at den går under rammeprofilen. Bildet viser hvordan man løsner den igjen.

