


Återanvändnings- och servicemanual

för Netti manuella rullstolar

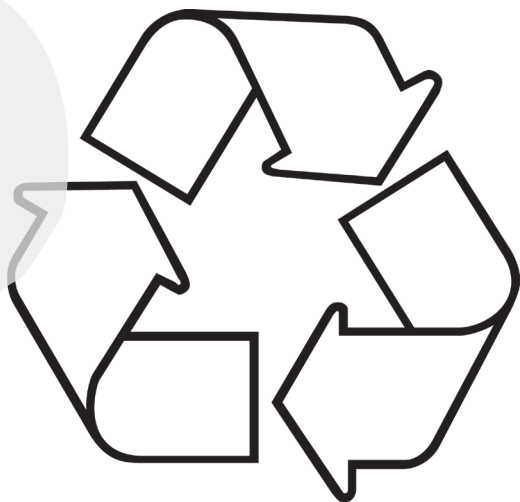

ÅTERANVÄNDINGS OCH SERVICEMANUAL

FRAMTIDEN HANDLAR OM ATT TA HAND OM MILJÖN.

Miljön kräver omtanke och nya lösningar. Därför arbetar Alu Rehab för att minska utsläppen i hela livsrytmen, från exploatering av råvaror, produkter, produktionsprocess till avfallshantering och återvinning. Genom att välja hållbara lösningar och kvalitet så att rullstolarnas livslängd förlängs leder det till mindre skada för miljön.

Netti III komfort var den första rullstol som genomgick EPD (Environmental Product Declaration), vilken dokumenterar miljöpåverkan och energiförbrukning i samband med produktion och transport av rullstolen. Vi kan därför fokusera på de områden som har en negativ inverkan på miljön.

Tack för att du väljer en produkt från Alu Rehab.

Alla Netti Rullstolar är testade av ackrediterat testlaboratorie i Tyskland enligt europeisk standard EN 12183.

Netti Rullstolar är också krocktestade av Millbrook Co England, RISE i Sverige och TASS Nederländerna och uppfyller kraven i standard ISO 7176-19.

VARFÖR ÅTERANVÄNDNING?

Alu Rehab sätter sin stolthet i att producera rullstolar som är bekväma och säkra att använda, både för användaren och ledsagaren. Vi lagerförhållbara rullstolar som kan användas och återanvändas under många år med alla dess funktioner intakta, så länge som de underhålls ordentligt. Vi vet att det bästa för miljön är när rullstolar används och återanvänds / rekonditioneras.

Vi har därför skapat denna återanvändningsmanual för att göra det lätt att underhålla och renovera Netti rullstolar och säkerställa lång livslängd.

Nya delar / reservdelar, lack, nya dynor, polstringar och klädsel och nya hjul kan köpas hos Alu Rehab så att även en sliten rullstol kan återanvändas efter renovering.

INNHÅLLSFÖRTECKNING

Återanvändningsmanualen är indelad i 4 STEG:
rengöring, rekonditionering, funktionskontroll och återvinning.

STEG 1 - RENGÖRING

■ Rullstol.....	sid 4
■ Sittsystem	sid 4

STEG 2 - REKONDITIONERING AV NETTI RULLSTOLAR

■ Ram/Chassi	sid 5
■ Hjul	sid 5
■ Armstöd	sid 6
■ Ryggenheten	sid 6
■ Körhandtag / körbygel	sid 6
■ Nackstöd	sid 6
■ Sittdel	sid 7
■ Rygg- och tiltmekanism	sid 7
■ Benstöd	sid 7
■ Bromsar	sid 7
■ Tippeskydd	sid 7
■ Allmän information	sid 7

STEG 3 - FUNKTIONSKONTROLL

■ Funktionskontroll	sid 8-9
---------------------------	---------

STEG 4 - ÅTERVINNING

■ Demontering och materialinformation för återvinning	sid 10
---	--------

KVITTO

■ Signatur för genomfört kontroll	sid 11
---	--------

Denna återanvändningsmanualen kan laddas ned från vår hemesida: www.My-Netti.se

STEG 1 RENGÖRING AV RULLSTOLAR

- 1. Ta bort ryggdynor, sittdynor, höj- och sänkbara körhandtag, armstöd och sittplatta. Delarna tvättas med svamp/mjuk trasa och milt tvålatten.
- 2. Dynorna tvättas enligt det tvättråd som finns på etiketten.
- 3. Vi rekommenderar användning av miljövänlig tvål och avfettningsmedel.
- 4. Spola rullstolen noggrant med rikligt rent vatten för att avlägsna tvålrester.
- 5. Använd rödsprit för att ta bort hårt sittande fläckar
- 6. Ta bort hjulen och sätt rullstolen upp och ned för att vatten rinner av och så att den kan torka innan smörjning och inspektion.

Desinfektion: Gnid hela stolen med en fuktig trasa med väteperoxid.

 **Använda inte högtryckstvätt då detta kan skada lagerhus och snabbkopplingar, eventuella gascylindrar, etiketter och sittplatta.**

Netti V kan tvättas/rengöras i tvättmaskin/tvättskåp i 60 celsiusgrad i 6 minuter.

RENGÖRING AV SITTSYSTEMET

 Vi rekommenderar av hygieniska skäl att ersätta alla polstrade delar när en ny användare övertar stolen. Läs skötselråden på dynan och överdraget. Använd tvättpåse till överdraget - kardborre kan ge extra nötning under tvätt. Kardborreband kan rengöras med en stål filborste.

	UNO Seat	Netti Sit
SITTDYNOR	KÄRNAN	
	Tvätt	Handtvätt 40°C
	Desinfektionsmedel	Virkon S* Autoklivering 105°C
	Torkning	Vrid ur vattnet, Lufttorka stående
	SKYDDSD-ÖVERDRAG	
	Tvätt	Maskintvätt 60°C Tvätta av med tvål och vatten
	Torkning	Centrifugera / lufttorka. Torktumlas ej.
	ÖVERDRAG	
	Tvätt	Maskintvätt 60°C
	Torkning	Torktumlas max 85°C

RYGGDYNOR	KÄRNAN	Alle Alu Rehabs ryggdynor behandlas lika
	Tvätt	Tvättas inte
	Desinfektion	Autoklivering 105°C, Virkon S*
	Torkning	Vrid ur vattnet Lufttorka stående
	ÖVERDRAG	
	Tvätt	Maskintvätt 60°C. Temp C°: Handtvätt
	Torkning	Temp C°: Centrifugera / lufttorka - Torktumlas ej. Easy Care, 3D: Centrifugera; lufttorka, Torktumlas max 85°C.

STEG 2 REKONDITIONERING

Innan man startar en service, kontroll eller inspektion, är det en stor fördel att ha satt upp rullstolen på ett lyftbord för att få korrekt hållning och för att undvika onödiga lyft. Det förutsätts att man har de rätta verktygen och att en manual finns tillgänglig.


Om nödvändigt bör rullstolen först rengöras - se Rengöringsprocedur för rullstolar. Envisa fläckar och liknande som fortfarande finns kvar efter rengöring, tas bäst bort med rödsprit. Stolen plockas ner så att den står på tippskydden på bordet/golvet. Det vill säga att dynor, huvudstöd, benstöd, drivhjul, länkhjulhjul, armstöd och alla tillbehör som är monterade på stolen avlägsnas.

RAMEN/ CHASSI:

Ramen kontrolleras för eventuell deformation, brott, skador, saknade skruvar, bultar och muttrar. Slitna delar byts ut och smörjs upp så att standarden tekniskt känns som ny. Deformerad ram och deformerade delar kastas.

DRIVHJUL


Drivhjul och drivringar rengöres med sprit. Fälg rengöres och däck kontrolleras för skador eller sprickor. Om nödvändigt, byt däcken. Snabbkoppling / drivhjul saxeln smörjs med olja. Se till att snabbkopplingen låser hjulet. Detta kontrolleras på följande sätt: För in snabbkoppling i navet genom att trycka in knappen på snabbkopplingen, släpp knappen och dra i drivhjulet som då ska sitta fast.

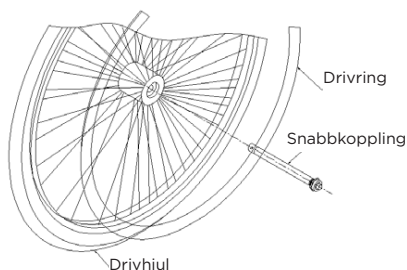

LÄNKHJUL OCH FRAMGAFFEL

Framgaffeln rengöres med rödsprit och snabbkopplingen smörjs med olja. Om det förekommer smuts i skruvarna på quick release axeln bör de plockas isär och rengöras med alkohol och monteras på nytt med gänglim (fullt utslag) i ett sådant läge som låser framgaffeln lagerhuset.

Länkhjulet tas bort från framgaffeln för rengöring av axeln. Hjulen rengörs med rödsprit och kontrolleras för smuts i lagren. Vid glapp eller onormalt slitage, ersätt hjulen. Kontrollera att snabbkopplingen låser hjulet vid montering. (Se manual för detaljer). Se till att lagerhuset är lodrät monterat i förhållande till marken för korrekta köregenskaper (Se manual för detaljer).

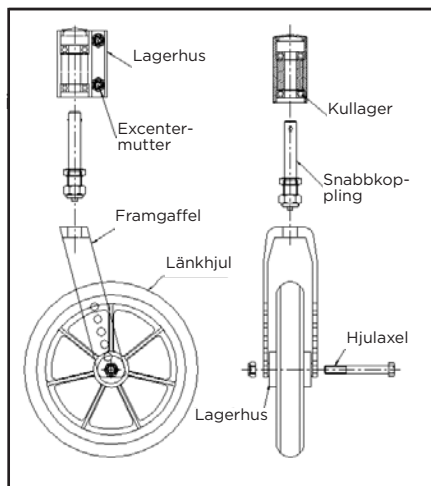

ARMSTÖD - Netti III/Netti V

Se till att låsspåret är rent. Se till att positionsskruvarna är installerade på rätt plats. Se till att armstödsplattan är monterad med två skruvar på varje sida och dra åt dem. Ställ in det rengjorda armstödet och efterdra. Sätt armstödet på plats i armstödsfästet på rullstolsramen. Justera stabiliseringsskruvarna på armstödsfästet. Fäst stabiliseringsskruvarna med kontra-mutter.

ARSTÖD Netti 4U

Se till att lås- och utlösarmekanismen fungerar.

Kolla att djupjusterings knappen av armstödsplattan fungerar. Dra åt skruvarna till armstödsplattorna.

KÖRHANDTAG

Körhandtagen kontrolleras för skador och byts ut om de är slitna. Kontrollera att säkerhetsskruven är monterad, om den saknas, montera nya.

⚠ Om rengöringsförfarandet inte har följts, eller om körhandtagen är skadade, måste de ersättas med nya.

KÖREBYGEL




Kontrollera alla skruvar och infästningar. Alla lösa skruvar tas bort och rengörs med rödsprit och monteras sedan på plats igen genom användning av gänglim (fullständig låsning). Kontrollera att handtagen för rygg- och tiltfunktion är märkta med symboler. Justeringsspakar kontrolleras och ersätts om de är slitna eller skadade.

RYGGENHET

Gå igenom kardborre-ryggen efter skador i sömmar och dragkjedia. Rengör kardborren om nödvändigt med en fuktig trasa. Kardborre "hane" kan rengöras med en filborste av stål. Säkerhetsbanden dras åt.

NACKSTÖD/ HUVUDSTÖD

Huvudstöd kontrolleras efter revor och smuts. Det rekommenderas att byta huvudstödet när rullstolen byter användare. Skruvar och ratt smörjes med olja. Alla justeringsdelar kontrolleras och ersätts om de är slitna eller skadade.

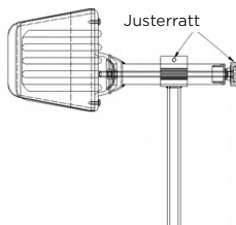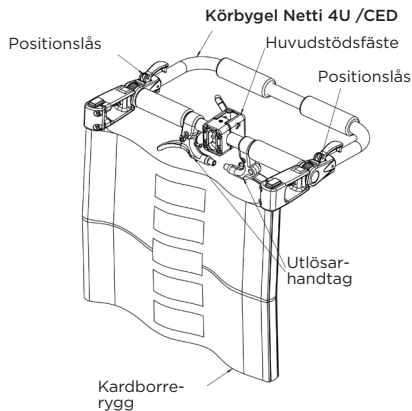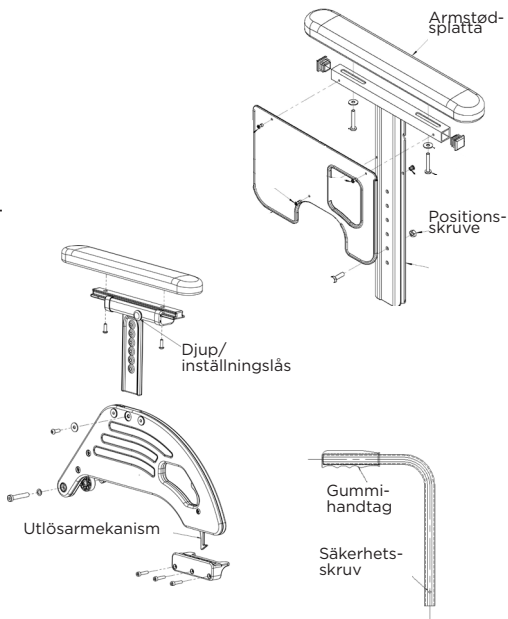

SITTEL

Sittplattan kontrolleras för brott och liknande samt saknade skruvar. Sittdynan rengöres enligt beskrivning på dynan - byts ut vid behov.

RYGG OCH TILTMKANISM

Gasfjädrarna kontrolleras för läckor och skador. Wire och wireöverföringar bör oljas och spännas, om nödvändigt bytas ut, om de är slitna. Gasfjädrarna bör rengöras och smörjas med olja på kolvstången.

BENSTÖD

Se till att alla justerskruvar är på plats. Dra åt lösa skruvar / muttrar, smörj med olja på alla rörliga delar. Kontrollera det mekaniska låset för vinkel och vid behov byt låskonen. Se till att benstödens låsning till ramen fungerar genom att ta av och sätta på dem. Byt benstödsfäste om nödvändigt.

PARKERINGSBROMSAR

Kontrollera att alla skruvar är på plats. Om delar är defekta eller saknas ska hela bromsen ersättas p.g.a. säkerheten. Justera bromsarna så att trycket mot drivhjulet hindrar hjulet från att rulla, kraftbehovet vid användning av bromsen ska vara rimlig. Trumbromsen rengörs och justeras så att bromstrycket låser hjulen vid maximalt tryck.

TIPPSKYDD

Se till att tippskydden fungerar tillfredsställande genom att sätta dem ur funktion och sedan i funktion. Justera tippskydden i rätt förhållande till drivhjulets position (Hjulen på tippskydden bör vara i lodrät linje från den bakre positionen på drivhjulen, och avståndet från hjulen på tippskydden till marken skall vara mellan 2 och 4 cm).

ALLMÄN INFORMATION

Använd endast originaldelar från Alu Rehab AS. Följande olja rekommenderas, Cycle Oil Safir (tunn olja).

Smörj aldrig justerstaget i mekanisk låsning med olja.

Olja till gascylindrar: HHS Lube (Würth).

Rekommenderat lim:






Loctite 2701 (full låsning)

Loctite 243 (demonterbar)

Färgkod för silver färg: RAL 9007

Färgkod grafit: RAL 7024

Färgkod Svart: RAL 9005

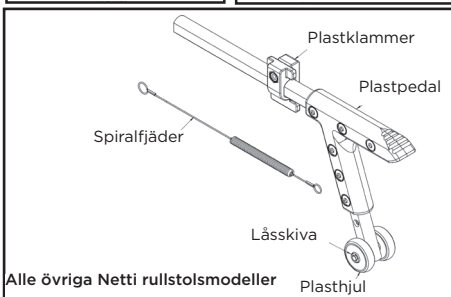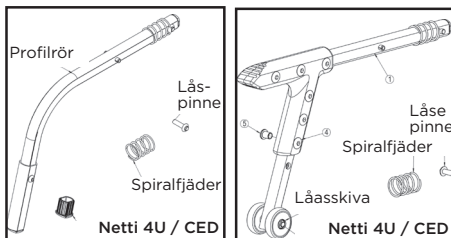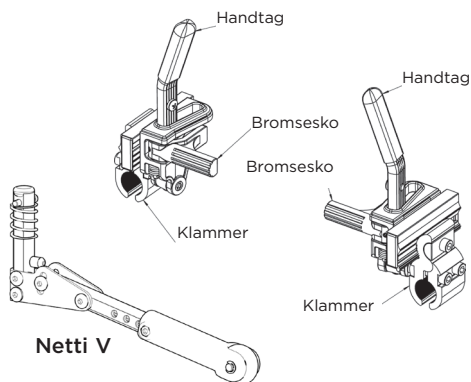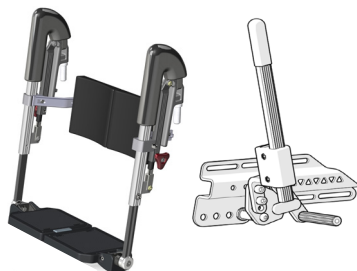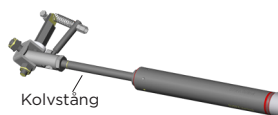

STEG 3 FUNKTIONKONTROLL - INNAN PRODUKTEN LEVERERAS TIL ANVÄNDAREN/KUNDE

Se till att rullstolen är inställd i förhållande till beställning, kontroll mot slutkontroll.

Visuell inspektion:

- Alla pluggar, proppar och skruvar skall vara på plats.
- Kontrollera sömmarna på ryggstödet kardborreband - de ska vara utan fransning.
- Kontrollera att stolens sittplatta är intakt och kan justeras i förhållande till sittdjup.
- För Netti Comfort sittplatta, se till att duken är hel.

Funktion	Modell	Test/kontroll	Utfört/OK
Tilt	Netti III familjen Netti S Netti 4U familjen Netti AdaptPro familjen Netti V familjen	Flytta tilten till båda ytterlägena och kontrollera att det finns fri passage. Kontrollera vajern så den inte glappar och efterdra om det behövs. Se till att den går fri för eventuella hinder. Kontrollera att tiltfunktionen är utmärkt med tiltmarkering.	
Ryggvinklingsreglering	Netti III familjen Netti S Netti 4U familjen Netti AdaptPro familjen Netti V familjen	Flytta ryggen i dess båda ytterlägen och kontrollera att ryggen rör sig fritt. Kontrollera vajer så den inte glappar och efterdra vid behov. Kontrollera att handtaget för ryggreglering är uppmärkt med markering.	
Körhandtag	Alla rullstolar förutom Netti 4U familjen Netti S	Holker skal være hele. Kjørehåndtak skal kunne reguleres lett og låses i ønsket posisjon. Stoppeskrue og fjær- stålpålen skal være montert.	
Körbåge	Netti 4U CED Netti S Netti AdaptPro familjen	Inget glapp i regleringsmekanismen. Efterdra om nödvändigt.	
Huvudstöd	Alla rullstolar	Låsskruven på fästet ska dras åt och den fjädrande stålpålen ska vara monterad. Se till att dynan är ren och hel, och att alla inställningsmöjligheter fungerar.	
Armstöd	Netti III familjen Netti S Netti 4U familjen Netti Adapt Pro familjen Netti V familjen	Armstödsdynorna ska vara i samma position och vara av samma typ på båda sidor. Se till att höjdregeringen kan låsas i önskat läge. Justera plasticskruvarna i armstödsfästet att ta upp glappet, dra åt kontramuttrarna. Armstödet ska glida lätt i armstödet. Stoppskruven ska stå lika hög på båda sidor. Glidmekanismen ska kunna anpassas lätt. Kontrollera att armstöd låser när det fälls ned.	

Funktion	Modell	Test/kontroll	Utfört/OK
Lagerhus	Alle modeller unntatt Netti 4U familien Netti S Netti AdaptPro familien Netti V familien	Kontrollera så att lagerhusen är monterade i lodrätt position på horisontellt underlag.	
Länkhjul	Alla rullstolsmodeller	Kontrollera att framhjulen låser i lagerhusen. De ska vara lätta att ta på och av (QR). För att vara säker på att snabbkoppling låser ska det vara ett litet spel i lagerhuset. Båda länkhjulen ska vara monterade i samma position i gaffeln.	
Drivhjul	Alla rullstolsmodeller	Kontrollera att drivhjulen låser i monterad position. De ska vara lätta att ta på och av (QR). För att säkerställa snabbkopplings lås, ska det vara ett litet spel i denna. Båda bakhjulen ska vara monterade i samma hållposition i hjulhålsinfästningen.	
Bromsar	Alla rullstolsmodeller	Kontrollera att de är inställda lika på båda sidor och att de låser bakhjulen utan att använda för stor kraft.	
Benstödsfäste	Alle rullestolmodeller	Benstödsfästet ska stå i samma position på båda sidor och vara fastskruvade.	
Vinkelställbara benstöd	Alle rullestolmodeller	Ska vara lätta att låsa i önskad vinkel. Ska vara lätta att ta på och av. Det ska inte vara något glapp i stolsramsinfästningen. Längdjusteringen ska fungera lätt. Vadstöd ska vara i samma höjd och djup på båda sidor. Knäpolster ska vara rena.	
Universal benstöd	Alle rullestolmodeller	Kontrollera att de är lätta att ta på och av. Det ska inte vara något glapp i stolsramsinfästningen. Längdjusteringen ska fungera lätt.	
Tippskydd	Alla rullstolsmodeller	Kontrollera att inställningarna är lika på båda sidor och i korrekt position, i förhållande till drivhjulen. Kontrollera att tippskydden kan sättas i det aktiva och passiva läget. Kontrollera att tippskydden är markerade med symboltecken.	
Riktningsstabil	Alla rullstolsmodeller	Sätt stolen i rörelse genom att trycka försiktigt med samma kraft på båda sidor av körbågen när stolen står på ett horisontellt golv. Stolen ska driva vidare i nära rätt och riktning. Om inte, kontrollera bruksanvisningen - länkhjul och drivhjul.	

Se till att bruksanvisningen alltid är tillgänglig..

STEG 4 - ÅTERVINNING

■ Demontering och material information för återvinning

Rullstolen är utformad för att göra det enkelt att dela upp stolens komponenter i enskilda material, för att göra återvinning så enkel som möjligt. Se Alu Rehab Recycling Manual SM0032 för att få en översikt över de material som används för de olika komponenterna och hur de kan separeras och återvinnas.

Överväg alltid reparation och återanvändning före skrotning. Det mest miljövänliga är att återanvända om möjligt.

Kontakta din lokala återvinningsstation för att få information om vilka komponenter och material de kan återvinna. Den lägsta nivån av återvinning är att separera metall, plast + skumkomponenter och trä. Den högsta nivån är att skilja mellan de enskilda metallsorterna, plastsorterna och trä.



Gasfjäder, batterier och elektriska komponenter måste alltid separeras till särskilda behållare och levereras till en auktoriserad återvinningsstation.

Skadade delar kan bli råvara för nya produkter!


KVITTO FÖR UTFÖRD ÅTERANVÄNDNINGSPROCEDUR.

Stolnummer / serienummer

Procedur utförd

OK

- Rengöring
- Rekonditionering
- Funktionskontroll

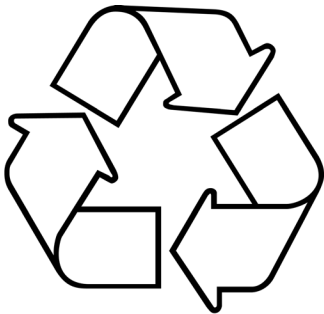

Rullstolen har genomgått ovan nämnda punkter och är redo för utleverering:

Verkstad

Tekniker:

.....

.....

Stad - Datum :

Signatur:

.....

.....

Denna ifyllda och undertecknade återvinningsmanual ska följa med rullstolen vid utleveransför att visa att rullstolen är renoverat och har genomgått service enligt tillverkarensrekommendationer. Detta säkerställer upprätthållande av slutanvändarsäkerhet och livslängd för rullstolen.

*inspire
joy of life*

Producent

📍 Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
N-4353 Klepp Stasjon
Norway

✉ post.klepp@meyragroup.com
T: +47 51 78 62 20
my-netti.com

Distributor

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
Denmark

info.ry@meyragroup.com
T: +45 87 88 73 00
F: +45 87 88 73 19
my-netti.dk
