



Autobesfestigungssatz

Netti 4U family

Netti III family

Netti V family

Netti Adapt Pro


Netti S family

Montageanleitung

*inspire
joy of life*

KIT 94610

Netti 4U family


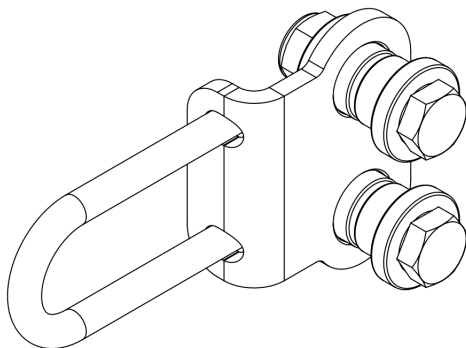


NETTI 4U – ROLLSTÜHLE

Am hinteren Ende jedes Netti 4U – Rollstuhls befinden sich 4 Löcher im Sitzrahmen. Eines der Löcher ist entweder blockiert durch Standardräder oder Räder mit Trommelbremse.

Montieren Sie den Autobefestigungssatz immer in den beiden oberen Löchern über dem Kippschutz.

Wenn 12-Zoll oder 16-Zoll Hinterräder verwendet werden sollen, installieren Sie den Autobefestigungssatz wie hier abgebildet. Wenn 20-26 Zoll Hinterräder verwendet werden sollen, entfernen Sie eine der M10 Achsbolzen und montieren Sie das Rad an seiner Position. Wenn die Räder mit Trommelbremse ausgestattet sind, montieren Sie den Autobefestigungssatz wie in der Abbildung gezeigt. Die Position des Drehstoppers und der Hülse für das Hauptrad kann je nach Radgröße und Sitzhöhereinstellung des Rollstuhls variieren. Verwenden Sie kein der im Satz enthaltenen M10 Schrauben.

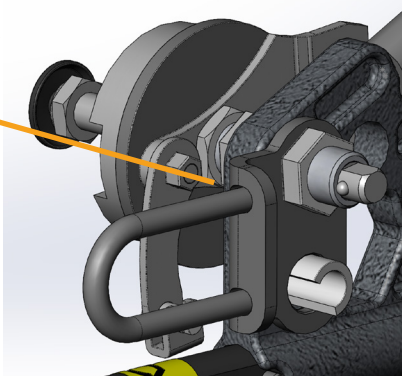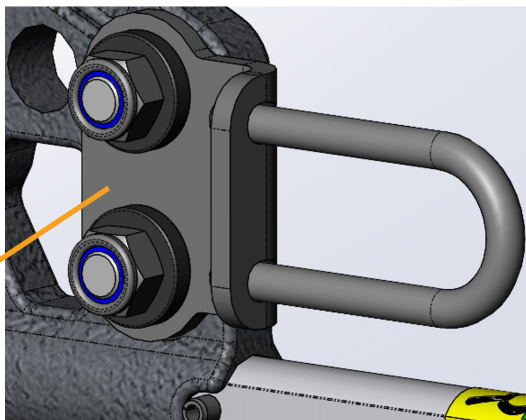


35Nm Drehmoment auf die M18x1 Mutter.

KIT 94125


Netti V

NETTI V - ROLLSTÜHLE

Am hinteren Ende jedes Netti V-Rollstuhlrahmens befinden sich zwei Löcher. Eines der Löcher ist entweder blockiert durch Standardrad oder Rad mit Trommelbremse.

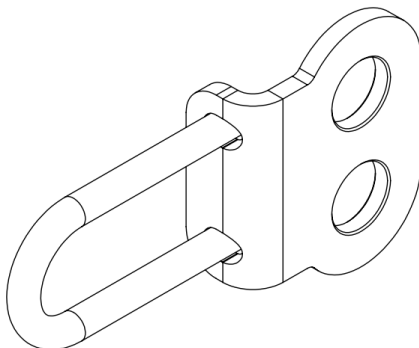


Für Standardräder:
Montieren Sie den Autobefestigungssatz wie hier gezeigt. Die Position von M8 Schraube und der Hülse für das Haupttrah kann je nach Radgröße und SitzhöhenEinstellung variieren.

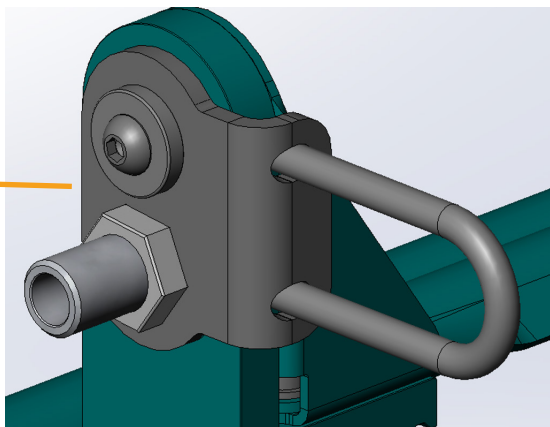

 **35Nm Drehmoment auf die M18x1 Mutter.**

Für Räder mit Trommelbremse:
Montieren Sie den Autobefestigungssatz wie hier gezeigt. Die Position des Drehstoppers und der Hülse für das Haupttrah kann je nach Radgröße und SitzhöhenEinstellung variieren.

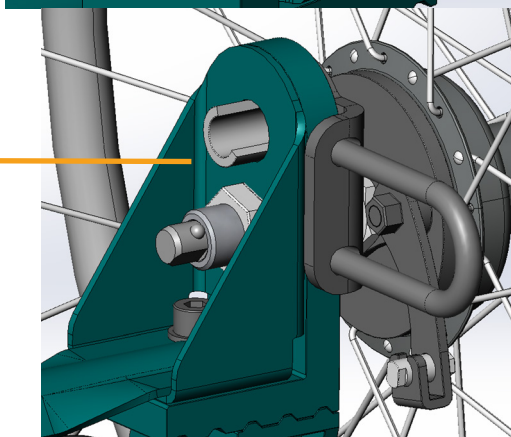


KIT 96306

Netti III family

NETTI III - ROLLSTÜHLE

Am hinteren Ende des Unterrahmens des Rollstuhls Netti III befinden sich 6 Löcher.

Eines der Löcher dient zur Montage eines Standardhinterrads oder eines Hinterrads mit Trommelbremse.

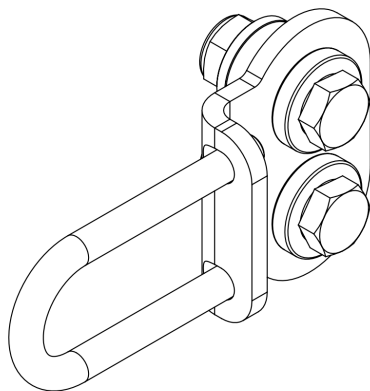


Für Standardräder:

Montieren Sie den Autobesfestigungssatz wie hier gezeigt. Die Position von M8 Schraube und der Hülse für das Hauptrad kann je nach Radgröße und Sitzhöhereinstellung variieren.




35Nm Drehmoment auf die M18x1 Mutter.

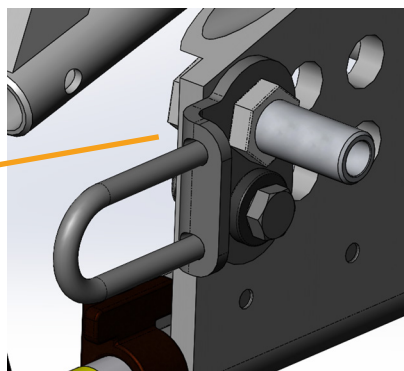

Für Räder mit Trommelbremse:

Montieren Sie den Autobesfestigungssatz wie hier gezeigt. Die Position des Drehstoppers und der Hülse für das Hauptrad kann je nach Radgröße und Sitzhöhereinstellung variieren.

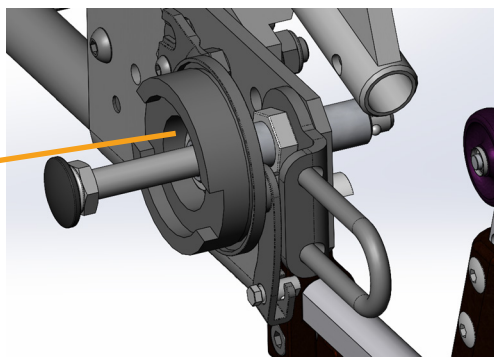



KIT 88203

Netti Adapt Pro

NETTI ADAPT PRO – ROLLSTÜHLE

Am hinteren Ende des Netti AdaptPro Rollstuhl-Unterrahmens befindet sich eine Querstrebe mit zwei M8 Schrauben auf jeder Seite.

Montieren Sie den Autobesfestigungssatz wie in der Abbildung unten gezeigt.

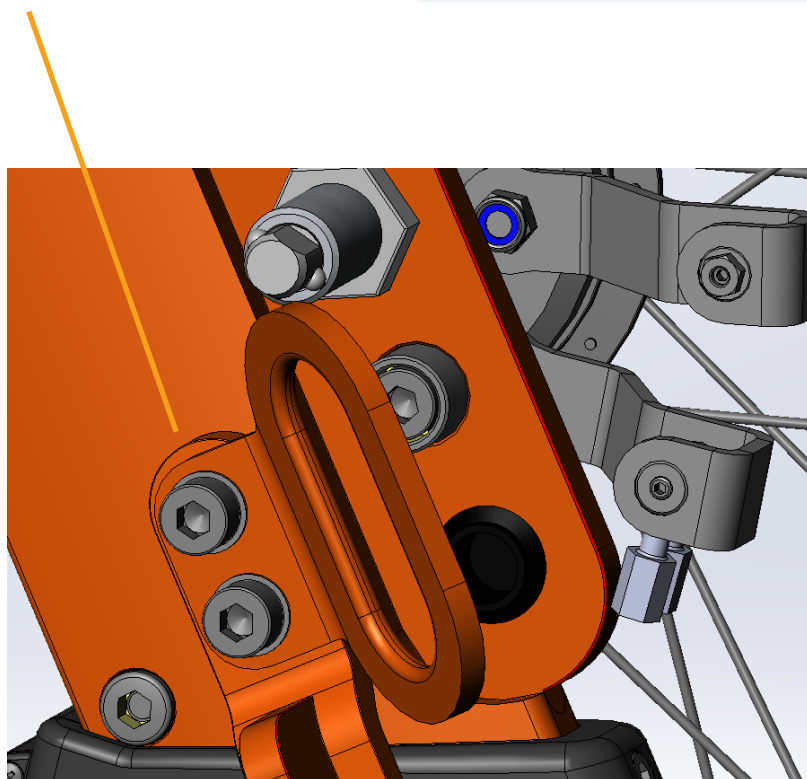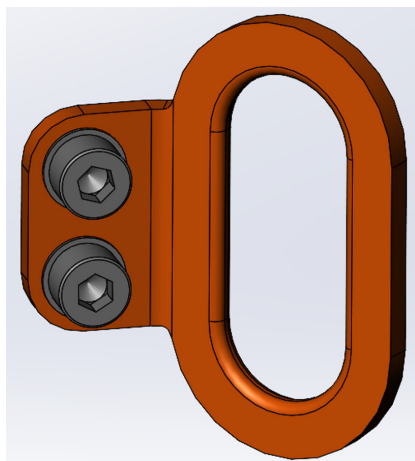


KIT 95725

Netti S


NETTI S - ROLLSTÜHLE

Am hinteren Ende des Unterrahmens des Netti S-Rollstuhls befinden sich 6 Löcher.


Platzieren Sie den Autobesfestigungssatz in den beiden oberen Löchern in horizontaler Ausrichtung, wie in der Abbildung gezeigt.

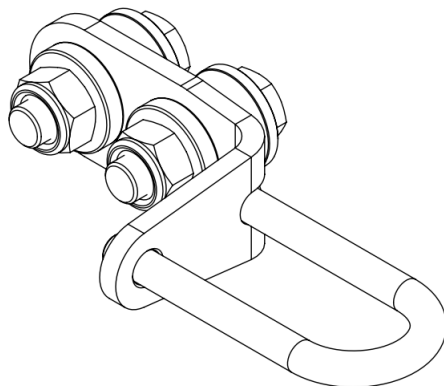

Für 22-Zoll-Räder installieren Sie den Autobesfestigungssatz mit einer Schraube, die im Satz enthaltenen ist und wiederverwenden Sie eine Schraube der Rahmenverlängerung.

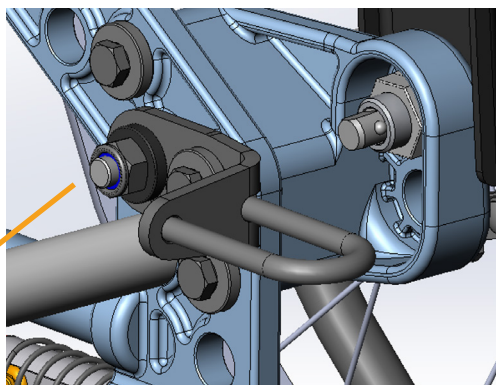

Für 16-Zoll-Räder installieren Sie den Autobesfestigungssatz auf die gleiche Weise, aber verwenden Sie beide Schrauben, die im Satz enthalten sind.

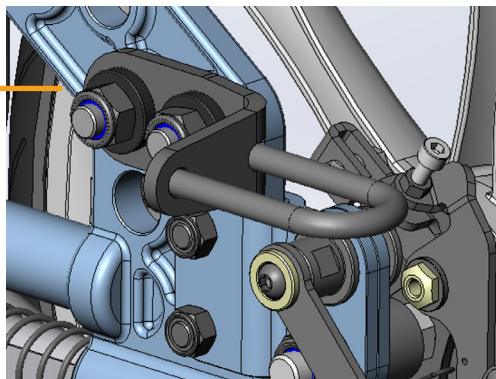

Manufacturer of Netti:



Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
N-4353 Klepp Stasjon
Norway



post.klepp@meyragroup.com
T: +47 51 78 62 20
my-netti.com

EU Distributor

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
Denmark

info.ry@meyragroup.com
T: +45 87 88 73 00
my-netti.com