



TILBEHØR



Bil innfestingssett

Netti 4U familien

Netti III familien

Netti V familien

Netti Adapt Pro


Netti S familien

Monteringsanvisning

*inspire
joy of life*

KIT 94610

Netti 4U familien

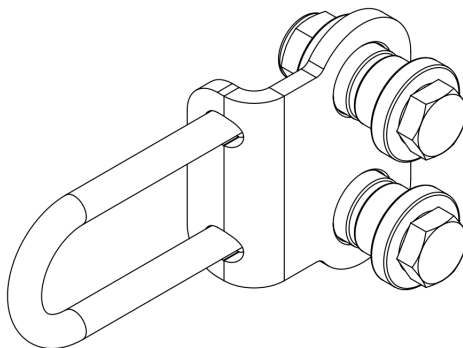

NETTI 4U – RULLESTOLER


I bakre ende av hver Netti 4U – Rullestol sideramme er det 4 hull.

Ett av hullene er blokkert av enten standard hjul eller hjul med trommelbrems.


Alltid monter bilinnfestingssettet i de to øverste hullene over tippesikkringen.

Hvis 12" eller 16" hjul skal brukes, monter bilinnfestingssettet som vist her.

Hvis 20"-26" hjul skal brukes, fjern en av M10 boltene og sett hjulet i dens posisjon.

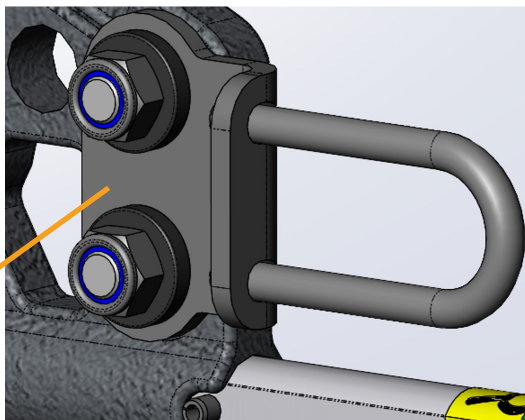

Når hjul med trommelbrems skal brukes; monter bilinnfestingssettet som vist her, posisjonen på rotasjonstopperen og hjulhylsen kan variere etter hvilken setehøyde hjulstørrelse og stolen skal ha. Ikke bruk noen av M10 skruene inkludert i settet.

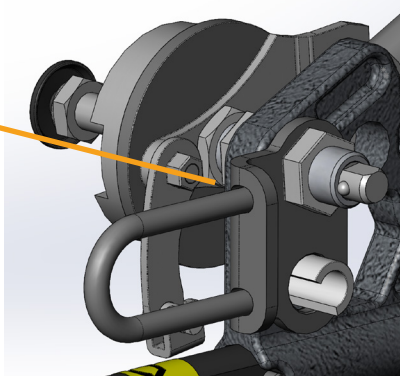


35Nm moment på M18x1 mutter.

KIT 94125

Netti V familien

NETTI V - RULLESTOLER


I bakre ende av hver Netti V – Rullestol-rammen er det 2 hull.

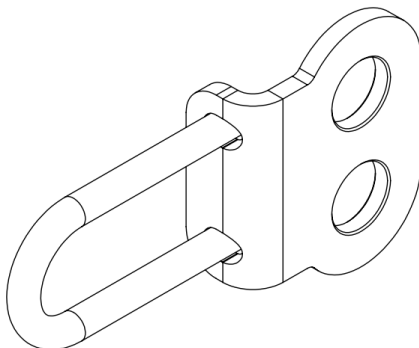

Ett av hullene er blokkert av enten standard hjul eller hjul med trommelbrems.

For standard hjul:


Monter bilinnfestingssettet som vist her, posisjonen på M8 skruen og hjulhylsen kan variere etter hvilken hjulstørrelse og setehøyde stolen skal ha.

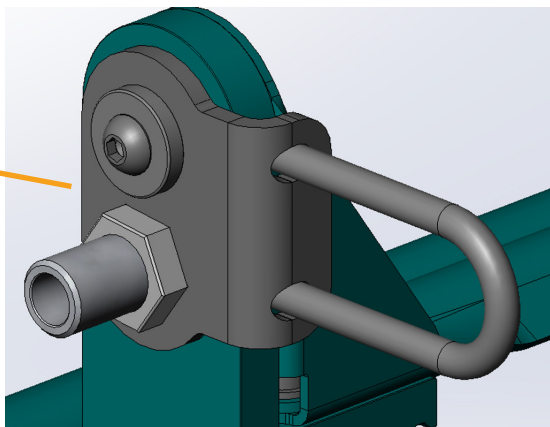

35Nm moment på M18x1 mutter.

For hjul med trommelbrems:

Monter bilinnfestingssettet som vist her, posisjonen på rotasjonstopperen og hjulhylsen kan variere etter hvilken setehøyde hjulstørrelse og stolen skal ha.

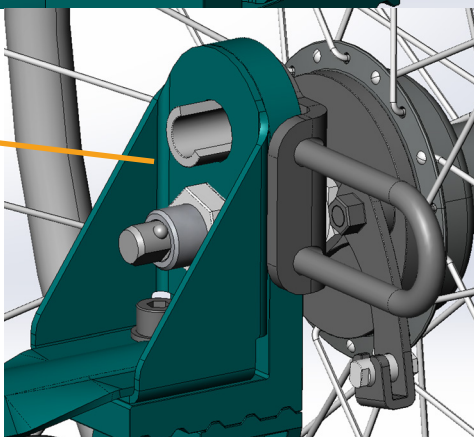


KIT 96306

Netti III familien

NETTI III - RULLESTOLER


I bakre ende av hver Netti III – Rullestol sideramme er det 6 hull.

Ett av hullene er blokkert av enten standard hjul eller hjul med trommelbrems.

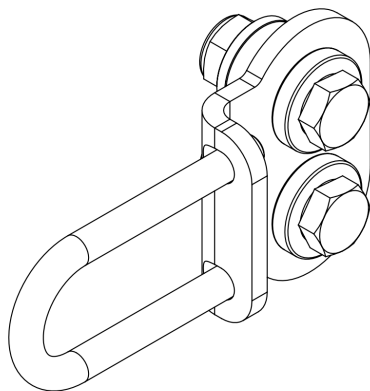

For standard hjul:


Monter bilinnfestingssettet som vist her, posisjonen på M8 skruen og hjulhylsen kan variere etter hvilken hjulstørrelse og setehøyde stolen skal ha.

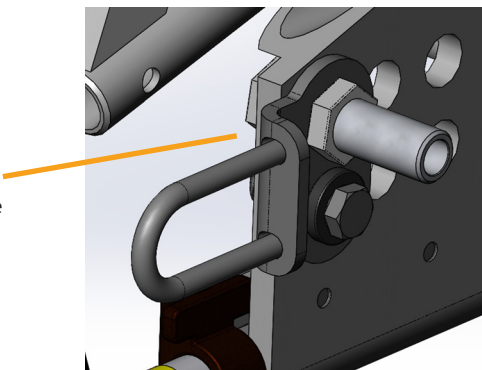

35Nm moment på M18x1 mutter.

For hjul med trommelbrems:

Monter bilinnfestingssettet som vist her, posisjonen på rotasjonstopperen og hjulhylsen kan variere etter hvilken hjulstørrelse og setehøyde stolen skal ha.

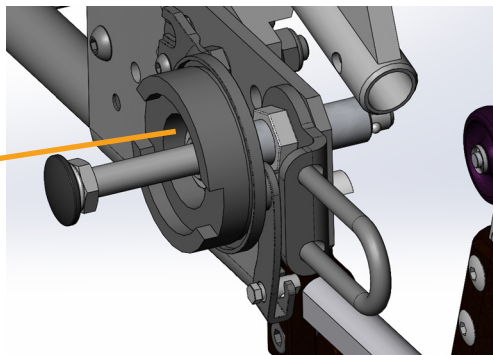



KIT 88203

Netti Adapt Pro

NETTI ADAPT PRO - RULLESTOLER

I brakre ende av Adapt Pro rullestol rammen er det et tverrstaget montert med 4stk M8 skruer.

Monter **bilinnfestingssettet** som vist her.

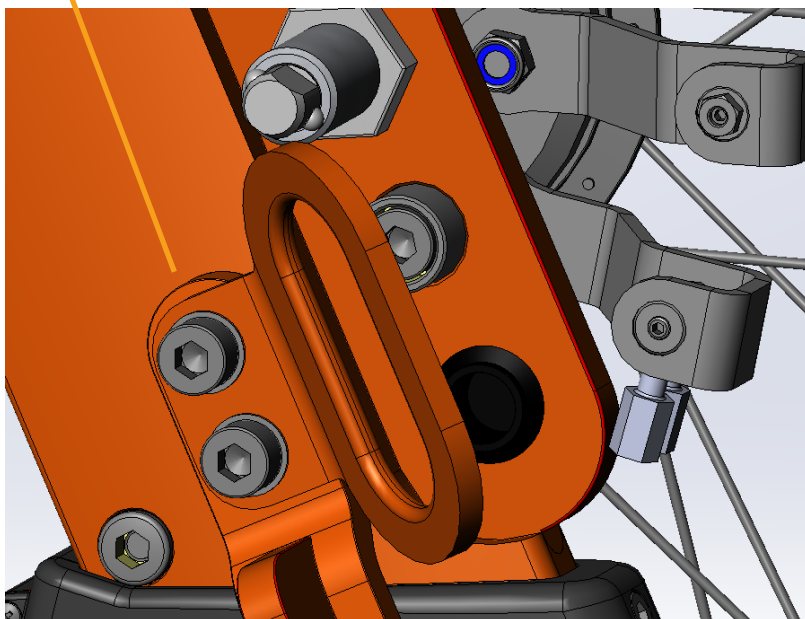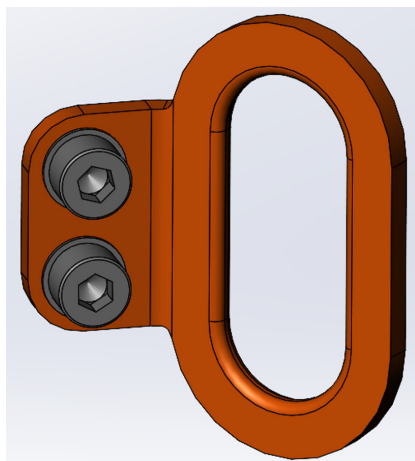


KIT 95725

Netti S


NETTI S - RULLESTOLER

I bakre ende av hver Netti V – Rullestolrammen er det 6 hull.


Bilinnfestingssettet skal alltid plasseres i de to øverste hullene plassert horisental fra hverander som vist på bildet.

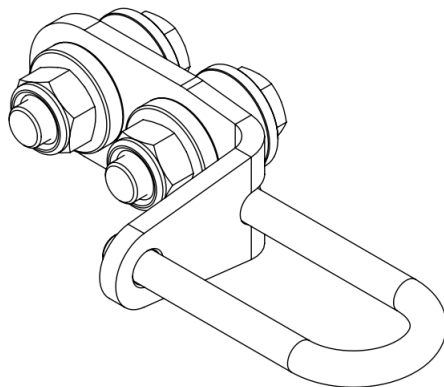

For 22" hjul, monter bilinnfestingssettet med en av skruene inkludert i bilinnfestingssettet og en av skruene til rammeforlengeren.

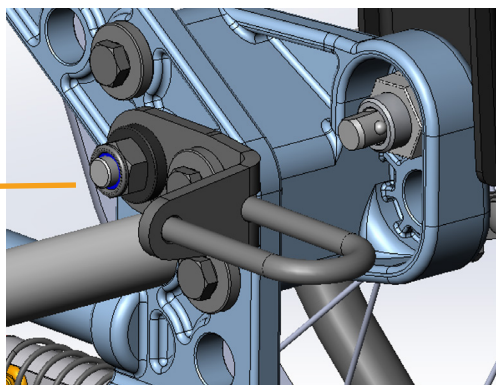

For 16" hjul, monter bilinnfestingssettet på samme måte, men bruk begge skruene inkludert i bilinnfestingssettet.

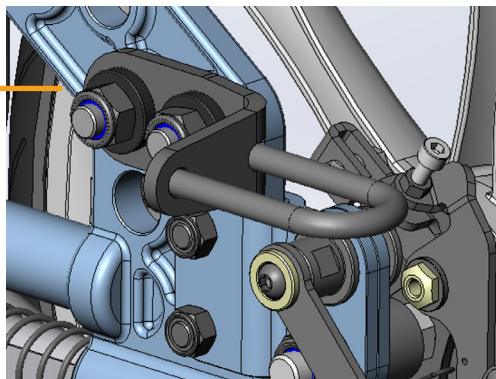

Produsert av Netti:



Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
N-4353 Klepp Stasjon
Norway



post.klepp@meyragroup.com
T: +47 51 78 62 20
my-netti.com

EU Distributør

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
Denmark

info.ry@meyragroup.com
T: +45 87 88 73 00
my-netti.com