



Montageanleitung - Brust-Schulter-Gurt

Die Montage eines Brust-Schulter-Gurtes kann auf 2 folgend beschriebenen Arten erfolgen:

1. Unter Verwendung eines H-Gurt-Stativs
2. Unter Verwendung des H-Gurt-Adapter Kits (Alu Rehab Empfehlung)

Das Brust-Schulter-Gurt (BSG)-Kit besteht aus:

- 1 Brust-Schulter-Gurt mit Schließen
- 2 Halterungsadapter, um den BSG an den Rückenteilhaltern des Rollstuhles zu montieren.
- 2 Schrauben/ 2 Unterlegscheiben/ 2 Muttern

Falls Sie das H-Gurt-Stativ zur Montage verwenden möchten, folgen Sie bitte den Anweisungen ab Seite 2:


- **Montage eines BSG unter Verwendung eines H-Gurt Stativs**

Mit dem Oberkörpergurt erhalten Sie 2 Halterungsadapter zur Befestigung der unteren Gurtbänder am Rollstuhl-Rahmen.

Obere Gurtbänder mit Gurtschloss



2 Halterungsadapter

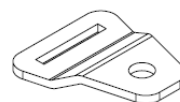

Untere Gurtbänder mit Gurtschloss

1	2	3
200 mm	120 mm	210 mm


Montage eines BSG unter Verwendung eines H-Gurt Stativs:

Lösen Sie zuerst die unteren und oberen Gurtbänder vom Oberkörpergurt indem Sie die Gurtbänder mit den Gurtschlössern vom Oberkörpergurt trennen.



2025-08 MD0135 DE

Führen Sie nun die beiden Gurtbänder durch die Befestigungsadapter wie unten im Bild 1 + 2 gezeigt und montieren Sie die Halterungsadapter links und rechts in einem 45°-Winkel am Rollstuhl-Rahmen wie in Bild 3 + 4 unten gezeigt.

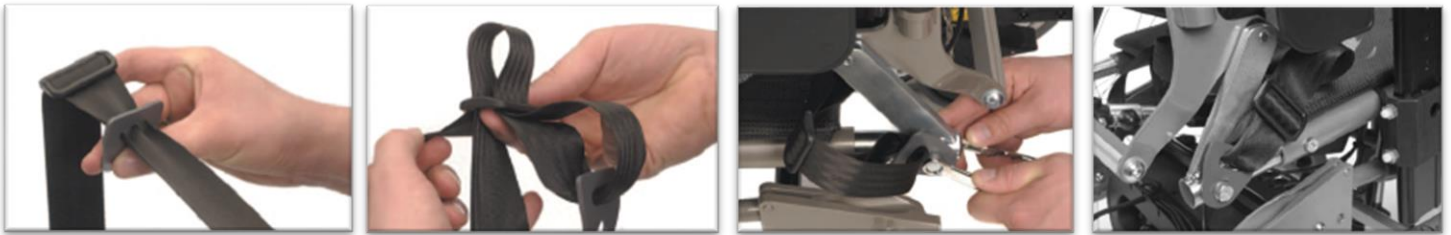

Als nächstes montieren Sie das H-Gurt-Stativ am Rollstuhl wie in der Bildfolge unten gezeigt.


Achtung: Die H-Gurtbefestigungsstangen können nur an Rollstühle montiert werden, die über Schiebegriffe oder einen Schiebebügel verfügen.



Sie haben die Möglichkeit die Höhe des H-Gurt-Stativs zu verändern, indem Sie:

- a. die Schiebegriffe/Schiebebügel in der Höhe verstellen oder
- b. das H-Gurt-Stativ auf dem Schiebegriff/Schiebebügel in der Höhe einstellen


Achtung: Die Höhe des H-Gurt-Stativs sollte so gewählt sein, dass der Verlauf der Gurtbänder maximal ca. 20° nach oben erfolgt.

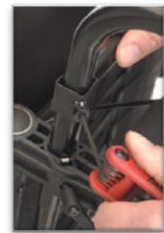

Verbinden Sie nun die 4 Gurtbänder mit dem Brust-Schulter-Gurt.

Die Distanz zwischen den oberen Gurtbändern können Sie über die auf der Befestigungsstange befindlichen Schellen einstellen.

Achtung: Bitte stellen Sie den Abstand so ein, dass die Gurtbänder einen genügenden Abstand zum Hals des Nutzers haben, um eventuelle Verletzungen zu vermeiden.

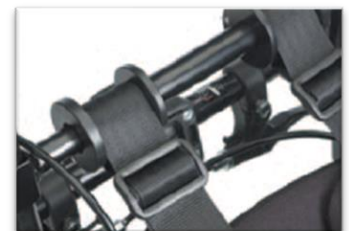

Die Anpassung des Oberkörpergurtes an den Nutzer erfolgt über eine Einstellung der unteren und oberen Gurtbänder.

Achtung: Bitte achten Sie auf einen für den Nutzer angenehmen Sitz des Oberkörpergurtes und ziehen Sie die Gurtbänder nicht zu fest an.

Achtung: Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den korrekten Sitz des Oberkörpergurtes sowie den korrekten Sitz der Gurtbänder in den Schnallen.

2025-08 MD0135 DE



Passen Sie nun den Gurt an den Nutzer an.

Die oberen Gurtenden sollten in einem ca. 20°-Winkel (von vorne nach hinten) mittig über den Schultern verlaufen. Zu tief eingestellte obere Gurtenden können den Nutzer nach unten vorne drücken.

Falls Sie die Gurtenden kürzen müssen, schneiden Sie diese ab und schließen Sie die Enden, indem Sie die Enden mit einem Feuerzeug schmelzen. Dies verhindert ein Aufribbeln der Enden.

Das H-Gurt Stativ und das H-Gurt Adapter Kit sind in verschiedenen Versionen verfügbar, zugehörige Artikelnummern finden Sie auf unserer Homepage.

Wir empfehlen den Gebrauch des H-Gurt Adapter Kits, um die Nutzung eines BSG unabhängig von den Schiebegriffen zu ermöglichen und um einen Gurt auch an einem Netti 4U CED montieren zu können.

Die Montageanleitung für das H-Gurt Adapter Kit finden Sie auf unserer Homepage als Download im Bereich Montageanleitungen für Kopf und Oberkörper: [My-netti.com](https://my-netti.com)

Haben Sie weitere Fragen zu diesem Produkt oder zu dieser Montageanleitung, dann wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

2025-08 MD0135 DE