

 **Netti**[®] *EL-kit:*

*betjening af ryg, tilt
og benstøtter*

Brugermanual til slutbrugeren



*inspire
joy of life*

INDHOLD

1.	INDLEDNING	3
2.	NETTI ELEKTRISK KIT ELEKTRISKE KOMPONENTER	4
2.1	SPECIFIKATION AF DE ELEKTRISKE KOMPONENTER	5
2.2	ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS OG ADVARSLER	6
3.	DAGLIG BRUG AF NETTI ELEKTRISK KIT	8
3.1	FJERNBETJENING	8
3.2	TASTERLÅS	8
3.3	OPLADER	9
3.4	OPLADNING	9
3.5	FØRSTE IBRUGTAGNING	9
3.6	OPVÆKNING AF BATTERI I SLUMRETIILSTAND:	9
4.	VEJLEDNING I BRUGEN	10
4.1	TRANSPORT I FLY	11
4.2	TRANSPORT I BIL	11
4.3	VEDLIGEHOELDELSE OG RENGØRING	12
4.4	RENGØRING OG VASK	12
4.5	LANGTIDSOPBEVARING	12
5.	EL-SÆT MONTERET	13
5.1	NETTI III	13
5.2	NETTI V	14
5.7	FEJLFINDING AF EL-FUNKTIONER	15

1. INDLEDNING

Netti elektrisk kit er et sæt til Netti multifunktionelle kørestole til transport på hjul til helt eller delvis ubevægelige personer med fysiske og/eller psykiske handicap.

Nettis manuelle kørestole kan udstyres med Netti elektrisk kit til betjening af rygvinkel, sædetilt og benstøtter, som gør disse funktioner nemmere.

Netti elektrisk kit og komponenter er kompatible med følgende kørestole: Netti III, Netti III HD, Netti V, Netti V All-round, Netti V EL. Netti III EL og Netti III HD EL maks. brugervægt er 160 kg, men for Netti V, Netti All-round og Netti V EL maks. brugervægt 135 kg. Stolene kan være udstyret med en eller flere elektriske funktioner. De elektriske funktioner betjenes med en håndbetjening. Hver enkelt komponent i det elektriske kit har sit eget serienummer. Kørestolens serienummer kan oplyse om, hvorvidt stolen er udstyret med en eller flere elektriske funktioner.

Denne manual indeholder en beskrivelse af de elektriske funktioner og monteringen af komponenterne.

 **Elektriske komponenter monteres af Alu Rehab eller certificeret personale.**

I denne manual er vigtige punkter angivet med de følgende symboler:

-  **Forbudssymbol.**
Det er ikke muligt at fremsætte krav om garantiydelse, hvis disse forbud ikke overholdes.
-  **Advarselssymbol.**
Dette symbol angiver, at det er nødvendigt at gå forsigtigt frem.
-  **Symbol for vigtige oplysninger.**
-  **Symbol for nyttige råd.**

 Symbol for værktøj.

 **Vær opmærksom på brugermanualen for den kørestol, hvor Nettis elektriske kit er monteret.**

 Bruger og hjælper skal instrueres og øves i brugen af Netti-kørestolen med elektrisk betjent ryghældning og benstøtter.

 **JUSTER KØRESTOLEN TIL BRUGEREN:**

Juster sædedybden og til sidst kørestolsbalancen, fodpladehøjde, armlænshøjde, hovedstøtkehøjde og dybde, stolens rygpudehøjde.

 **ANTI-TIP** korrekt monteret, vil anti-tip sikre stolen mod at tippe bagover. Vi anbefaler kraftigt brugen af anti-tipsikring

 Det elektriske kit er is crash-testet i overensstemmelse med ISO 7176-19 og godkendt med Netti kørestole, som er kompatible med sættet.




Yderligere oplysninger om tilpasning af kørestolen til brugeren kan findes på www.my-netti.dk viden og værktøjer.

 Illustrationerne kan afvige fra det leverede produkt.

 For synshandicappede kan manualer og kataloger hentes på www.my-netti.dk

2. NETTI ELEKTRISK KIT ELEKTRISKE KOMPONENTER

- Pos. 1 – 1 Komplet styreboks
 Pos. 2 – 1 Batterioplader
 Pos. 3 – 2 Aktuatorkontakter til benstøtte med beslag
 Pos. 4 – 1 Fjernbetjening
 Pos. 5 – 1 Opladningsstik
 Pos. 6 – 1 Aktuator til bagudhældning af ryglæng - skal bestilles separat - afhængigt af kørestolsmodellen
 Pos. 7 – 1 Aktuator til sædetilt - skal bestilles separat - afhængigt af kørestolsmodellen
 Pos. 8 – 1 Beslag til vippeaktuator - afhængig af kørestolsmodellen
 Pos. 9 – 2 Beslag til fastgøring af pos. 3 - aktuatorkontakter til benstøtte
 Pos. 10 Ledningsbånd

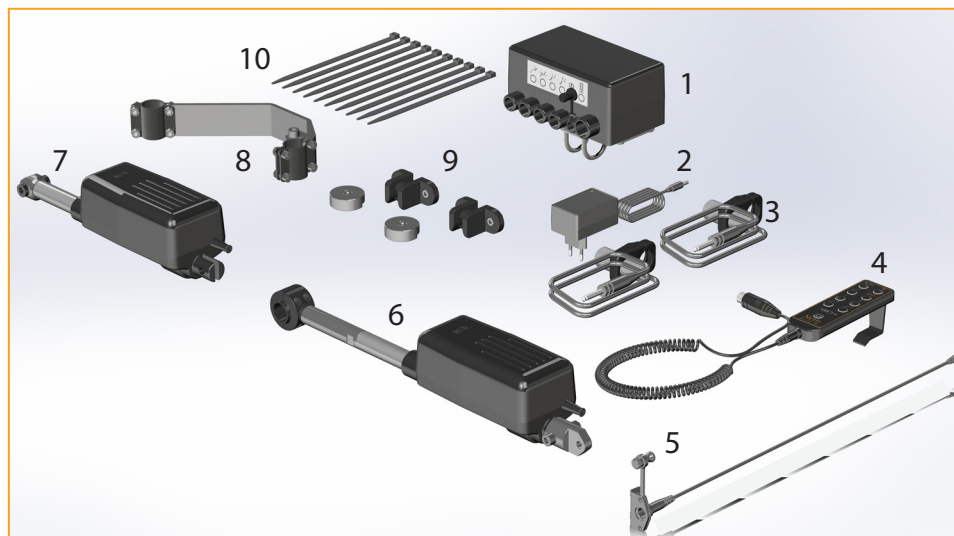


Produkterne er CE-mærkede og opfylder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet i standarden EMC 60601-1-2.

Vægt af komponenter:

Styreboks med batterier	750 gram
Aktuator sædetilt:	1470 gram
Aktuator rygvinkel:	1580 gram
Aktuator til bestøtte:	920 gram hver
Håndkontrol:	190 gram
Kabel til oplader:	20 gram
Samlet vægt alt inklusive:	5850 gram

Opladeren er fritstående og beregnes ikke som en del af kørestolens vægt.

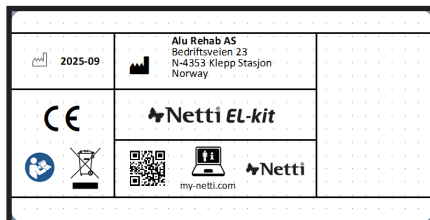

Typeskiltet på Netti EL-kit er placeret på styreboksen.

2.1 SPECIFIKATION AF DE ELEKTRISKE KOMPONENTER

Styreboks med 24 V 3,0 AH li-ion-batteri.

Sædetilt og rygvinkel aktuatorerne, fjernbetjeningen og aktuatorernes stikbeslag til benstøtterne sættes i styreboksen.

Se mærkningerne på styreboksen.



Styreboks



Aktuator til bagudhældning af ryglæn

Aktuator til funktionerne hældning og vipning R 3000

Maks. skubbekraft	2000N – 3000N
Maks. trækraft	2000N – 3000N
Maks. hastighed (fuld belastning)	2,3 - 9,6 mm/sek.
Maks. hastighed (uden belastning)	5,0 - 16,0 mm/sek.
IP-klasse I	PX4
Strømforbrug (fuld belastning) 1	,6 A - 6,0 A
Feedback og kontakter	motor 24 VDC som standard



Sædetilt aktuator

Aktuator til benstøtter RE1001


IP 41, 600N, 100MM, 24V, med specialkabel og endebeslag i stål.

Aktuatorens stikbeslag til benstøtterne

er fastgjort på hver side af den forreste tværstang ved sæderammen.



Benstøtter

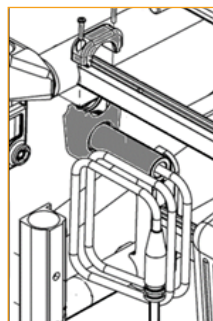

Stik til benstøtte

2.2 ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS OG ADVARSLER

Kørestole med elektriske funktioner kan være modtagelige for elektromagnetisk interferens (EMI), som er forstyrrende elektromagnetisk energi (EM), der udsendes fra kilder som radiostationer, tv-stationer, amatør radiosendere (HAM), tovejsradioer og mobiltelefoner. Interferensen (fra radiobølgekilder) kan utilsigtet starte de elektriske bevægelser. Det kan også skade det elektriske styresystem permanent. Intensiteten af den forstyrrende EM-energi kan måles i volt pr. meter (V/m). Hver elektrisk funktion kan modstå elektromagnetisk interferens op til en vis intensitet. Dette kaldes "immunitetsniveau". Jo højere immunitetsniveauet er, jo højere vil beskyttelsen være.

Der findes en række kilder til relativt intense elektromagnetiske felter i hverdagsmiljøet. Nogle af disse kilder er åbenlyse og nemme at undgå. Andre er ikke synlige, og eksponering er uundgåelig. Vi skønner, at hvis advarslerne nedenfor overholdes, vil risikoen for elektromagnetisk interferens være minimeret.

Kapslingsklasse for Netti EL elektriske funktioner: IPX4.

Netti EL's elektriske funktioner er EMC-godkendte.



Det er vigtigt, at du læser disse oplysninger om de mulige virkninger af elektromagnetisk interferens på din kørestol udstyret med elektriske funktioner.

KILDERNE TIL UDSTRÅLET ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS KAN OVERORDNET KLASSIFICERES I TRE TYPER:

A Håndholdt bærbart radioudstyr (sendere og modtagere) med antennen monteret direkte på sendeenheden.
Dette kan for eksempel være (CB)-radioer, walkie talkier, sikkerheds-, brand- og politisendere/-modtagere, mobiltelefoner og andet personligt kommunikationsudstyr.



Nogle mobiltelefoner og lignende apparater udsender signaler, når de er tændt, også selvom de ikke er i brug.

B Mobile sender-modtagere med mellemlang rækkevidde, for eksempel dem, der bruges i politibiler, brandbiler, ambulancer og taxier. Disse har normalt antennen monteret udvendigt på køretøjet.

C Langtrækkende sendere og sender-modtagere som for eksempel kommercielle radiosendere (radio- og tv-antennetårne) og amatør radioer (HAM).



Andre typer håndholdt udstyr som for eksempel trådløse telefoner, bærbare computere, AM/FM-radioer, tv-apparater, cd-afspillere og medieafspillere, samt små apparater, såsom elektriske barbermaskiner og hårtørre, vil ifølge vores viden sandsynligvis ikke forårsage problemer med elektromagnetisk interferens med din kørestols elektriske funktioner.

De nævnte apparater og sender-modtagere og elektromagnetisk interferens fra kilder som radio- og tv-stationer, amatør radiosendere (HAM), tovejsradioer og mobiltelefoner kan påvirke kørestolens elektriske funktioner og bevægelser. Derfor bør nedenstående advarsler overholdes for at forhindre mulig interferens med styresystemet i Netti III EL-kit elektriske funktioner.

Hvis advarslerne herunder overholdes, mindskes risikoen for utilsigtet bevægelse af kørestolen, hvilket kan resultere i alvorlig personskaade.



Brug ikke håndholdte transceivere (sendere og modtagere) som for eksempel CB-radioer, og tænd ikke for personlige kommunikationsenheder som mobiltelefoner, mens el-stolen er tændt.



Vær opmærksom på sendere i nærheden, f.eks. radio- eller tv-stationer, og hold så vidt muligt afstand til dem.



Ved utilsigtede bevægelser skal stolen slukkes, så snart det er sikkert.



Vær opmærksom på, at montering af tilbehør eller komponenter, eller ændring af de elektriske funktioner på kørestolen, kan gøre den mere modtagelig for elektromagnetisk interferens.



Indberet alle hændelser med utilsigtet bevægelse til distributøren af produktet. Kontrollér, om en kilde til elektromagnetisk interferens findes i nærheden.



Kørestolen kan forstyrre driften af apparater i omgivelserne, der udsender elektromagnetiske felter (f.eks. alarmsystemer i butikker, automatiske døre osv.).



3. DAGLIG BRUG AF NETTI ELEKTRISK KIT

3.1 FJERNBETJENING

Fjernbetjeningen er tilsluttet styreboksen, der er fastgjort til kørestolens stel.

i En holder til fjernbetjeningen kan monteres som tilbehør.

På fjernbetjeningen beskriver ikonerne de forskellige funktioner:

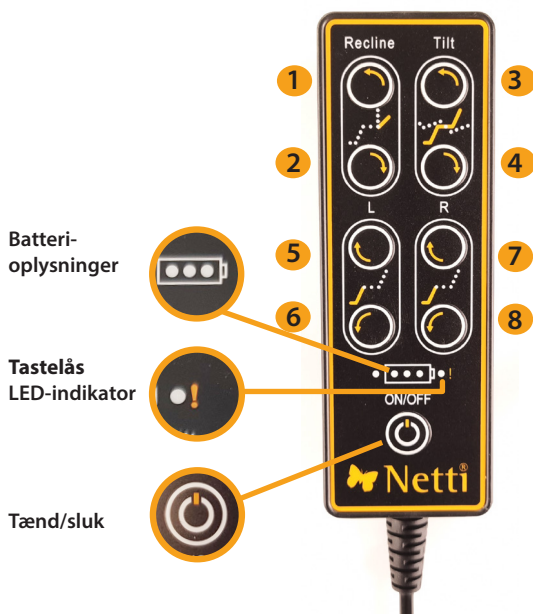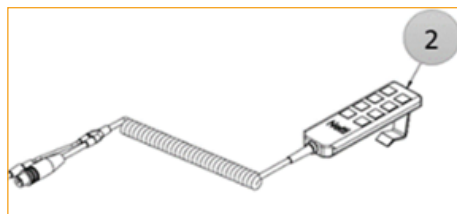

Batteri-
oplysninger

Tastelås
LED-indikator

Tænd/sluk

Håndkontrol funktioner:

1. Læne fremover
2. Læne bagover
3. Vippe fremover
4. Vippe bagover
5. Venstre fodstøtte op
6. Venstre fodstøtte ned
7. Højre fodstøtte op
8. Højre fodstøtte ned

3.2 TASTERLÅS

Ved hjælp af en tastelås er det muligt at låse en eller flere kanaler/funktioner.

- Låsning af en kanal: Tryk samtidigt på begge knapper for den pågældende kanal i 3 sekunder, indtil alarmindikatoren tænder. Kanalen er låst.

i Ved slukning med tænd/sluk-knappen og følgende genstart vil den røde LED lyse i et kort øjeblik for at angive, at en tastelås er aktiv.

- Oplåsning: Tryk samtidigt på begge kanaltaster i 3 sekunder, indtil alarm-LED-indikatoren slukker.



3.3 OPLADER

MBL's oplader til Li-ion-batterier er fremstillet af Dongguan GeoFanDe Technology Co., Ltd. i Kina med 100-240 V, 50/60 Hz, maks. 1,0 A, IP20 og isoleringsklasse 2. En separat brugermanual til batteriopladeren kan downloades fra my-netti.dk under elektrisk kit.

3.4 OPLADNING

Det elektriske kit oplades ved at tilslutte opladeren til opladerstikket på højre side af kørestolens stel.

-  På den håndholdte fjernbetjening viser lysdioderne for batterioplysningerne, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.
-  Batterierne skal genoplades, når LED'en på håndbetjeningen viser lavt batteriniveau. Oplad hver dag efter brug.
-  Når den grønne lampe på opladeren lyser, er batterierne fuldt opladet.
-  Sæt gummipropen tilbage i opladerstikket, når opladningen er afsluttet.
-  Maksimal opladningstid: 24 timer.
-  Stolen kan ikke bruges under opladning.

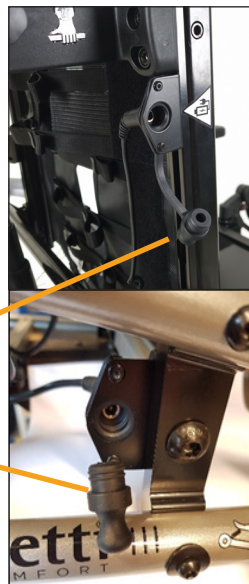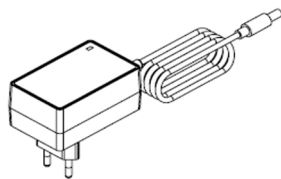

3.5 FØRSTE IBRUGTAGNING

Tilslut batteriet:

Sæt Mascot 24 V-standardopladeren, der følger med styreboksen, i opladerstikket på kørestolen. Tilslut opladeren til en stikkontakt. Vent 5 sekunder, og træk opladeren ud af stikkontakten. Batteriet er nu tilsluttet.

-  Oplad batterierne før første brug.

-  **Automatisk frakobling af batteriet:** For at forhindre dyb afladning og beskytte batterierne går batteriet automatisk i slumretilstanden DEEP SLEEP, hvis det ikke bruges inden for 30 minutter efter, at det er tændt.

3.6 OPVÆKNING AF BATTERI I SLUMREILSSTAND:

-  Tryk på tænd/sluk-knappen på håndbetjeningen for at vække systemet.

Oplad batteriet hvis nødvendigt.

4. VEJLEDNING I BRUGEN

Netti med EL-funktioner vælges ofte til:

- Brugere med behov for hyppig genpositionering.
- Brugere, der selv kan ændre siddestillingen ved hjælp af de elektriske funktioner.

 Læs opmærksomt brugermanualen for den kørestol med Nettis elektriske kit monteret.

 Kør altid forsigtigt.
Sørg for, at sædepositionen er vippet og tilbagelænet på en måde, så du har godt udsyn, når du kører.

 Pas på ikke at køre ned af for høje trin.
Du kan miste kontrollen over kørestolen, hvis benstøtterne rammer jorden, og benstøtterne kan også bremse.

 Sluk altid for stolen, når du sætter dig i den eller tager den af, eller når stolen står stille i længere tid.

 Undgå at bære tasker på skubbehåndtagene. Det kan gøre kørestolen ustabil.

 Oplad altid batterierne dagligt for at sikre, at de elektriske funktioner fungerer, når du har brug for dem.
Frakobl opladeren, når batteriet er fuldt opladet, og den grønne lampe på opladeren blinker.

 Brug kun den oplader, der følger med kørestolen, og følg brugervejledningen til denne oplader.

 Oplad altid batterierne i indendørs, tørre og veltempererede omgivelser.
Hold børn, dyr og andre ukyndige personer væk fra opladeren.



Maks. hældning bagover og tilbagelæning. Løft af benstøtter.

4.1 TRANSPORT I FLY

Netti kørestol med Netti EL-komponenter kan transporteres i fly. Kontakt dit flyselskab for komplette instruktioner til passagerer. Det kan være nødvendigt med forudgående aftaler og ekstra check-in-tid.

Netti kørestole med Netti EL-komponenter er udstyret med 4 aktuatorer og styresystem samt styreboks med 24 V 3,0 A (72 watt-timer) li-ion-batteri. Af hensyn til li-ion-batteriets sikkerhed under transport har batteriet certificeret UN38.3 med tilhørende sikkerhedsdatablad (MSDS). Hvis du har sådanne transportbehov, vil Netti støtte dig og levere disse sikkerhedsinspektionsrapporter til dig. Hvis Netti-kørestolen med EL-komponenter ikke er konfigureret med et komplet elektrisk sæt (sædetilt, hældning og EL-benstøtter), aktiveres den ikke-elektriske funktion med gasfjeder(e). I modsætning til den generelle vejledning om vejtransport af farligt gods UN3164, tillader IATA's regler om transport af farligt gods (GDR A114), at gods, der indeholder gas og er bestemt til at fungere som støddæmpere (inklusive energiabsorberende enheder eller pneumatiske fjedre) IKKE er omfattet af transportinstruktionerne, dvs. de er ikke underlagt transportbegrænsninger:

- a) hver artikel har et gasvolumen, der ikke overstiger 1,6 l og et ladetryk på ikke over 250 bar, hvor produktet af kapaciteten udtrykt i liter og ladetrykket udtrykt i stænger ikke overstiger 80.
- b) hver artikel har et minimum sprængtryk på 4 gange ladetrykket ved +20 grader Celsius for produkter, der ikke overstiger 0,5 l gasrumskapacitet.
- c) Hvert godsstykke er fremstillet af materiale, der ikke vil fragmentere.
- d) Hvert godsstykke er fremstillet i overensstemmelse med kvalitetsstandarden, som er godkendt af den ansvarlige nationale myndighed.
- e) Det er bevist, at varen aflaster sit tryk ved hjælp af en brandnedbrydelig forsegling eller anden trykaflastningsanordning, således at artiklen ikke fragmenteres eller eksploderer.

4.2 TRANSPORT I BIL

Netti III, Netti III HD og Netti V er alle kollisionstestede i henhold til ISO 7176-19 og godkendt til brug som bilsæde. Netti EL-sættet er testet og godkendt på en Netti-kørestol og godkendt til brug som bilsæde.

En separat brugervejledning

UM 0131 Brug af Netti kørestol som bilsæde indeholder detaljerede oplysninger om håndtering, placering og sikring af kørestolen ved brug som bilsæde.



Følg instruktionerne i UM0131-manualen omhyggeligt.

Manualen kan downloades fra my-netti.dk

4.3 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

i Som bruger af kørestolen er du (og dine hjælpere og familie) ansvarlig for den daglige vedligeholdelse af kørestolen. Gør kørestolen rent med jævne mellemrum, og udfør vedligeholdelse for at garantere sikker og lang tids driftssikker funktion og hygiejnisk udseende.

Vedligeholdelsesintervaller	Ugentlig	Månedsvi
Kontrol for fejl / skader f. eks. brud / manglende dele	X	
Vask af kørestolen		X
Vask af puder		X
Kontrol af antivætningsfunktionen		X
Kontrol af bremsernes justering		X
Kontrol af dækslitage		X
Smøring af lejer og glideprofiler med cykelolie eller vaseline		X
Opladning af batterier - dagligt	XX	

4.4 RENGØRING OG VASK

1. Fjern puderne, før du vasker kørestolen.
2. Tør alle elektriske komponenter af med en fugtig klud. De må ikke blive våde.
3. Gør rammen rent med vand og en klud.
4. Brug et flydende rengøringsmiddel.
5. Skyl kørestolen godt med rent vand for at fjerne al sæbe. Undgå, at de elektriske komponenter bliver våde.
6. Brug sprit til at fjerne eventuelle rester af snavs.
7. Rengør puder og betræk som anvist på puderne.

RENGØRING af elektriske komponenter

Aktuatorer

Aktuatorerne rengøres for støv og snavs efter behov og skal kontrolleres visuelt for mekaniske skader og defekter med regelmæssige mellemrum. Aktuatorerne skal tørres af med en fugtig klud.

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen bør tørres af med en fugtig klud efter behov.

Styreboks

Styreboksen skal tørres af med en fugtig klud efter behov. Stikkontakterne må kun aftørres på indersiden med en tør klud.

Oplader

Oplader skal tørres af med en fugtig klud.

Desinfektion: Tør hele stolen af med en blød klud fugtet i brintoverilte eller isopropanol.



Rengør aldrig en kørestol med elektriske komponenter i en vaskemaskine eller med højtryksrensere.



Kontroller/genjuster skruer og møtrikker med jævne mellemrum.



Sand og havvand (salt anvendt til strøelse om vinteren) kan skade lejer på forhjul og hovedhjul. Rengør kørestolen grundigt efter brugen.

* Som en grundregel skal alle bevægelige dele og alle lejer smøres med olie. Alu Rehab anbefaler brug af almindelig cykelolie.

4.5 LANGTIDSOPBEVARING

Hvis kørestolen skal opbevares i længere tid (mere end 4 måneder), skal batteriet oplades hver tredje måned.

Vi anbefaler, at kørestolen rengøres inden opbevaring.


Følg de ovenstående vedligeholdelsesinstruktioner, før kørestolen tages i brug igen.




Er du i tvivl om noget? Kontakt din forhandler!

5. EL-KIT MONTERET

5.1 NETTI III

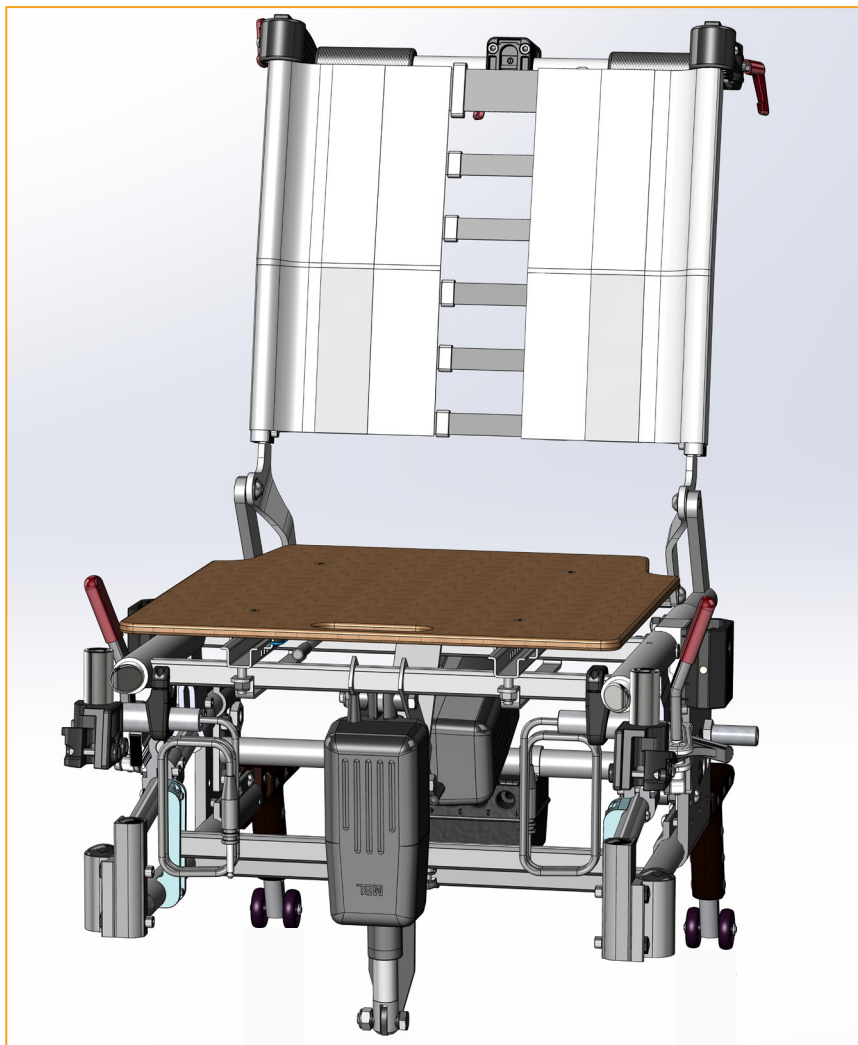

5.2 NETTIV

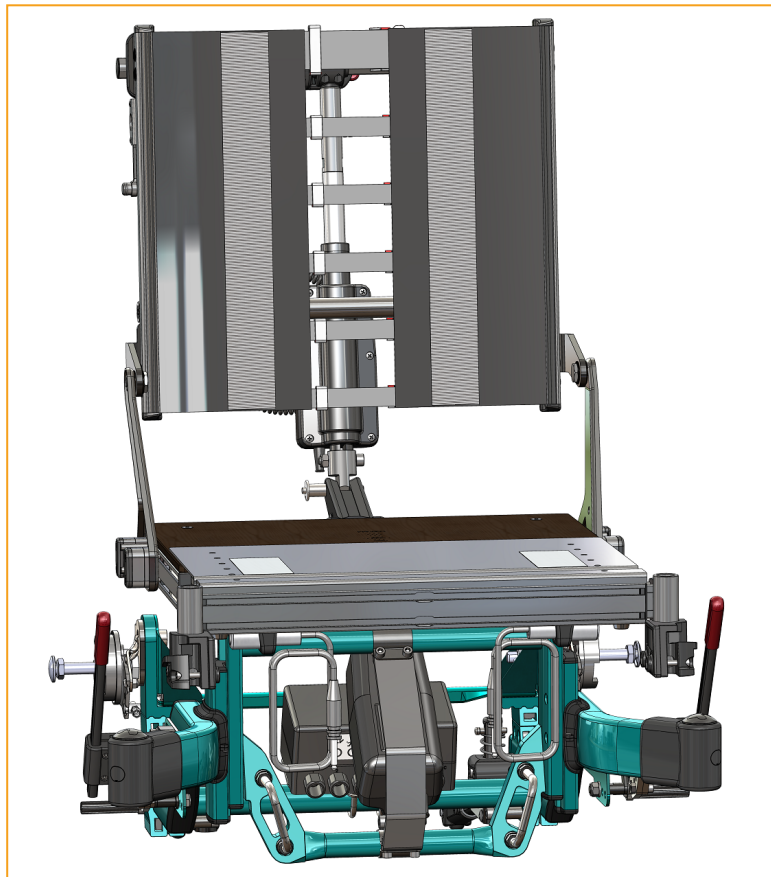

NETTI V MED EL-SÆT MONTERET SET FORFRA

Benstøtter ikke monteret.

5.7 FEJLFINDING AF EL-FUNKTIONER

Generelt skal nedenstående procedure følges for alle aktuatorer.

Hvis en aktuator ikke reagerer ved tryk på fjernbetjeningen:

Kontrollér BATTERI og BATTERIOPLADER:

- Kontrollér batteriets ladetilstand på fjernbetjeningspanelet.
- Oplad kørestolen. Det vil øge aktuatorens ydeevne, hvis styreboksen er ved at være afladet.
- Kontrollér, at batteriopladeren oplader: Grønt lys ved tilslutning til strøm. Skifter til rødt under opladning og derefter tilbage til grønt, når batteriet er fuldt opladet.

Hvis ingen indikatorlampe er tændt på batteriopladeren ved tilslutning til strømforsyningen, er opladeren defekt og skal udskiftes.

- Kontrollér på fjernbetjeningen, at batteriet oplader. Dette vises ved løbende LED-indikatorer.
- Tilslut opladeren direkte til styreboksen (1), hvis den ikke oplader. Hvis den ikke oplader, når den er tilsluttet direkte til styreboksen, er fjernbetjeningskablet (5) defekt.
- Hvis den stadig ikke oplader, når opladeren er tilsluttet styreboksen, er batteriet sandsynligvis defekt. Åbn styreboksen, og kontrollér batterispændingen. Hvis batterispændingen er for lav (under 18 V), skal batteriet udskiftes.
- Hvis batterispændingen er i orden, er styreboksen defekt. (Batterispænding ved fuldt opladet batteri er 24,6 V).

AKTUATORERNE FUNGERER IKKE:

- Kontrollér, at tastelåsen ikke er aktiv. Den røde LED-indikator ud for batteri-LED-indikatoren på fjernbetjeningen er tændt, når tastelåsen er aktiv. **Oplåsning:** Tryk samtidigt på begge kanaltaster i 3 sekunder, indtil alarm-LED-indikatoren slukker.
- Kontrollér, at alle kontakter til aktuatorerne sidder godt fast.
- Hvis en aktuator har været overbelastet, stopper den. Sluk, og tænd igen for strømmen på fjernbetjeningen for at aktivere aktuatoren.
- Tilslut den til en anden udgang på styreboksen, hvis den stadig ikke fungerer. Hvis aktuatoren stadig ikke fungerer, skal den udskiftes.
- Ved brug af forlængerledning (3) med Y-adapter, skal aktuatoren tilsluttes direkte til styreboksen for at udelukke eventuelle afbrydelser i forlængerledningen/Y-adapteren, som skal udskiftes, hvis den er defekt.
- Byt om på benstøtterne, hvis en benstøtteaktuator ikke fungerer. Hvis aktuatoren stadig ikke fungerer, skal den udskiftes. Hvis den anden benstøtte nu ikke fungerer skal Y-adapteren/forlængerledningen kontrolleres ved at tilslutte benstøtten direkte til styreboksen. Hvis den virker, skal Y-adapteren udskiftes.
- Prøv med en anden fjernbetjening, hvis den stadig ikke virker. Hvis en ny fjernbetjening heller ikke virker, skal styreboksen udskiftes.

Fejlfinding på elektrisk udstyr fra Netti:

Symptom	Mulig årsag	Handlinger skal træffes
Fjernbetjeningen reagerer ikke	Dårlig forbindelse Lavt batteriniveau Defekt fjernbetjening	Kontrollér ledninger og forbindelser Kontrollér batteriet Prøv en anden fjernbetjening / udskift eventuelt
Ingen opladning	Defekt oplader/ingen tændte lamper Dårlig forbindelse/defekt kabel Batteriet modtager ikke strøm	Udskift opladeren Kontrollér forbindelser og ledninger, tilslut opladeren direkte til styreboksen. Udskift batteriet (batterispænding 18-24,6 V)
Batteriet aflades for hurtigt	Ældet batteri	Udskift batteriet
Aktuatorerne bevæger sig ikke	Lavt batteriniveau Dårlige forbindelser Defekt udgang Defekt aktuator Defekt fjernbetjening	Oplad batteriet Kontrollér ledninger og forbindelser Prøv en anden udgang, udskift aktuatoren Udskift aktuatoren Udskift fjernbetjeningen
Aktuatoren bevæger sig kun i én retning	Aktuator overbelastet	Sluk og tænd for strømmen på fjernbetjeningen
Aktuatoren klikker/bevæger sig ujævnt	Lav batteriladning	Kontrollér batteriindikatoren, oplad batteriet

Producent af Netti:

 Alu Rehab AS
Bedriftsvejen 23
N-4353 Klepp Stasjon
Norge

 post.klepp@meyragroup.com
Tlf.: +47 51 78 62 20
my-netti.com

Distributør EU

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
Danmark

info.ry@meyragroup.com
Tlf.: +45 87 88 73 00
my-netti.com