

Netti[®] KNÄ- OCH LÅRSTÖD

Monteringsanvisning



*inspire
joy of life*


Netti®

KNÄ- OCH LÅRSTÖD

ARTIKELNUMMER 20830

Artikeln består av:

Nummer i ritningen	Namn	Antal
1	Knä- och lårstöd fäste	1
2	Knä- och lårstöd	1
3	Skrubar M6x25	2
4	M6 bricka	4
5	M6 Mutter	2

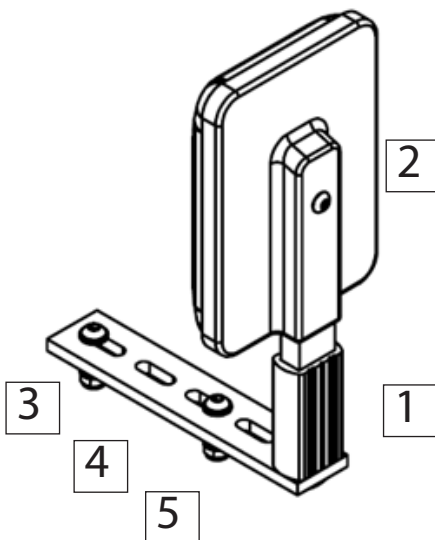

Till monteringen behöver du:

Syl, bormaskin med 6mm borr,
insexnyckel 4, M10 fast nyckel.

På nästa sida finns monteringsanvisningen.

Vid montering av knä- och lårstöd, vänligen använd följande procedur:

1. Placera sittdynan i rullstolen.
2. Låt användaren sitta i stolen.
3. Tryck in knä- och lårstödet från sidan mellan sittplattan och sittdynan.
4. Justera knä- och lårstödet tills det att en optimal position för användaren uppnås, enligt råd från legitimerad personal.
5. När den riktiga positionen har bestämts, markera hålen på sittplattan.
6. Förflytta användaren ur stolen.
7. Borra sedan 6,5 mm hål i sittplattan med samma avstånd som i hålen på fästet.
8. De avlånga hålen i fästet gör det möjligt att justera knä- och lårstödet i sidled. Vid stora justeringar, bör nya hål borraras i sittplattan.
9. Montera skruvarna uppifrån och fäst dem med muttrarna från undersidan. Bricka ska användas både ovan och nedan sittplatta. För att undvika onödigt slitage på sittdynan bör skruvarna täckas med plasttejp.
10. När användaren förflyttas i sidled, kan knä- och lårstödet enkelt plockas bort genom att det dras rakt upp. Återställ sedan genom att det fästes i samma hål.

! Undvik att placera knä- och lårstödet så att trycket blir för högt på låren.



Om rullstolen används som säte i bilen måste knä- och benstöden tas bort och förvaras någon annanstans i bilen.

Denna monteringsanvisning finns även på vår hemsida::

www.My-Netti.com

Produsent av Netti:

Alu Rehab AS
📍 Bedriftsvegen 23
N-4353 Klepp Stasjon
Norway

✉ post.klepp@meyragroup.com
T: +47 51 78 62 20
my-netti.com

EU Distributor

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
Denmark

info.ry@meyragroup.com
T: +45 87 88 73 00
F: +45 87 88 73 19
my-netti.dk

