




Monteringsanvisning – Grandis Amputationsbenstöd

1. Montering av amputationsbenstödet

- Montera amputationsbenstödet i benstödsfästet. Håll den i en vinkel på ca. 20 ° till sidan och låt benstöds fäste glida ned i rullstolens fäste. Vrid in benstödet mot mitten och tryck ner så att benstödet klickar i lås.

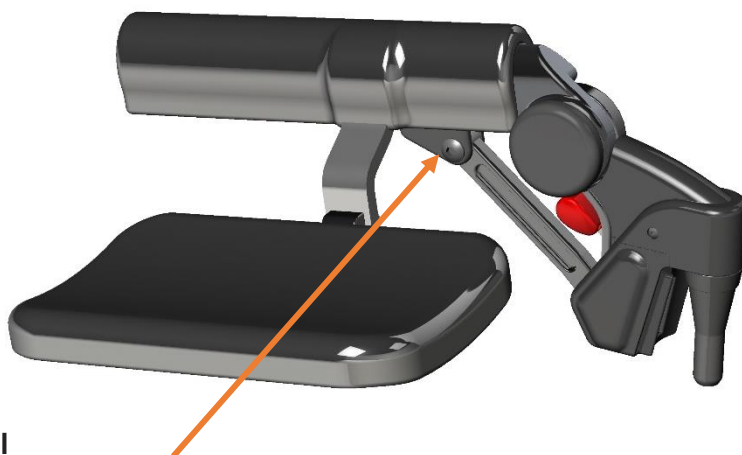

2. Justering av amputationsbenstöds vinkel

- Benstöds vinkel kan justeras • Genom att lossa på skruven som håller på justeringsstaget fäst på huvudprofilen, kan du justera benstödet till den önskade vinkeln.
- Fixera vinkeln genom att dra åt skruven.

3. Justering av amputationsbenstöds platta

- Plattan kan justeras
- Släpp på skruven för plattans fäste och justera den till önskat position. Fixera skruven ordentligt

4. Justering av plattans djup

- Skruva ur plattan ur sitt fäste.
- Montera plattan i önskad position och fixera skruven ordentligt.

5. Ta bort amputationsbenstöden

- Ta bort benstödet genom att lyfta den röda knappen och svänga benstödet ut och sedan dra det upp.

Denna monteringsanvisning tillsammans med övriga finns även på vår hemsida:

<http://www.my-netti.com/downloads/manuals>