



## Quick-guide Netti V EL

**Multifunksjonsrullestol med elektrisk drevet funksjoner: elektrisk tilt, elektrisk ryggene og elektriske benstøtter.**

*Les brukermanual  
UM0145 Netti El kit for  
fullstendig instruksjon.*

Netti V El er en multifunksjons rullestol med mulighet for å kunne variere sittestillingen ved å bruke de elektriske tilt- og lene-funksjoner.

 Kjør alltid forsiktig. Kontroller at sittestillingen ikke er vippet og tilbakeleant slik at du ikke har oversikten når du kjører.

 Slå alltid stolen AV når du overfører til eller fra, eller når stolen står stille i lengre perioder.




## Håndbetjening og funksjoner

### Batteri info

Led-indikator for taste-LÅS funksjon

1. Ryggene fremover
2. Ryggene bakover
3. Tiltet sitteenhet fremover
4. Tiltet sitteenhet bakover
5. Venstre benstøtte opp
6. Venstre benstøtte ned
7. Høyre benstøtte opp
8. Høyre benstøtte ned

**Strøm AV / PÅ**

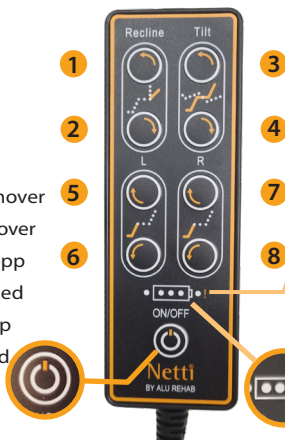

### Taste-LÅS:

For å låse en eller flere funksjoner:

- Trykk på begge knappene for funksjonen samtidig – i 3 sekunder, til varselindikatorlampen lyser.

Når systemet starter på nytt, lyser den røde LED-lampen en kort stund for å indikere at en tastelås er aktiv.

For å låse opp:

- Trykk på begge funksjonsknappene samtidig i 3 sekunder til varselindikatoren er slått av.



## Batteri og lading



**Elektriske funksjoner lades daglig!**  
Plugg ladekabelen i ladepunktet på høyre side av rullestolen og støpselet i stikkontakt på vegg. Lad alltid i tørt rom.


Max lading 24 t.



Funksjonene er fulladet når det grønne LED lyset på laderen lyser.  
På håndkontrollen vises batteriets ladestatus.



Stolen kan ikke brukes under lading.

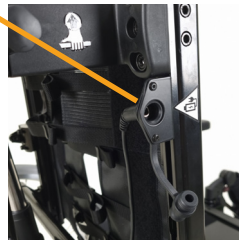

## Vekke batteriet fra "Dyp søvn"



Når stolen har vært ute av bruk i lengre tid (ca 14 dager) går systemet i "dyp søvn" for å beskytte batteriet.

**VEKKE OPP** prosedyre:

1. Plugg inn ladekabelstøpselet i en stikkontakt og slå PÅ håndkontrollen.
2. Trekk ut støpselet og slå AV håndkontrollen.
3. Slå PÅ håndkontrollen.  
Et rødt LED lys blinker mens batteriestatus sjekkes. *Dette kan ta flere minutter.*
4. Det grønne lyset på håndkontrollen går på og stolens elektriske funksjoner er klar til bruk. Sett stolen til lading hvis batteriet trenger det.

## Rengjøring og vedlikehold

1. Fjern putene før du vasker stolen. Rengjør puter og trekk i henhold til instruksjonene som er trykt på putetrekket.
2. Tørk av alle elektriske komponenter med en fuktig klut og ikke la de bli våte.
3. Rengjør rammen med vann og klut. Vi anbefaler å bruke grønnsåpe.
4. Skyll rullestolen godt med rent vann for å fjerne all såpen – uten å fukte de elektriske komponentene.
5. Bruk isopropanol for å fjerne gjenstridig smuss.  
**Desinfeksjon:** Bruk en myk klut fuktet med hydrogenperoksid eller teknisk alkohol (isopropanol) og tørk over hele stolen.



**Vask aldri en stol med elektriske komponenter i maskin eller med høytrykkspyler**

Alu Rehab AS | Bedriftsvegen 23 | N-4353 Klepp Stasjon | Norway

T: +47 51 78 62 20 | post.klepp@meyragroup.com | my-netti.no | my-netti.com