

Netti[®] *Enhåndsbrems på øvre
rammerør*

Monteringsanvisning



*inspire
joy of life*

INNHold

1.	ENHÅNDSBREMS PÅ ØVRE RAMMERØR NETTI III	3
2.	ENHÅNDSBREMSE PÅ NETTI V	4-5
3.	MONTERINGSBESKRIVELSE: INNFESTING AV WIREN TIL TROMMELBREMSER PÅ DRIVHJULET	6

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye, og vær også oppmerksom på bruksanvisningen for rullestolen der sidesstøttene er montert.

Viktige punkter er merket med følgende symboler:



Symbol for forbudte handlinger.
Ingen garanti kan kreves dersom disse handlingene utføres



Symbol for advarsel.
Når dette symbolet brukes, må det utvises forsiktighet.



Symbol for viktig informasjon.



Symbol for nyttige tips.



Symbol for verktøy.

MONTERINGSANVISNING

1. ENHÅNDSBREMS PÅ ØVRE RAMMERØR

Hvert tilbehørs-sett 27282 + 27283 inneholder:


- 1 Bremsenhet til å feste på rammerøret
 - 1 Festebeslag for innfesting av bremsenheten til rammerøret
 - 2 wire-hetter
 - 2 wire med hver sin bremsewirestrømpe og strømpe endebeslag.
 - 1 Wireholder
- Løsne bremsewiren som er montert på trommelbremse-ankerplaten - på høyre og venstre side.
 - Monter festebeslaget og bremsenheten til øvre rammerør - som vist på bildet.
 - Pass på at festebeslaget og bremsen står parallelt med rammerøret og at bremsehendelen ikke kolliderer med innfestningsbeslaget for benstøttene- når bremsen er aktivert (skyv bremsehåndtaket fremover)
 - Pass på å ikke stramme festebeslaget for hardt siden det kan blokkere glidemekanismen i bremsenheten.

 Pass på at det ikke er konflikt mellom festebeslaget, bremsehendelen og drivhjulet når bremsen er montert.

Festebeslag

Bremse-enhet

Messingskrue med sett-skrue

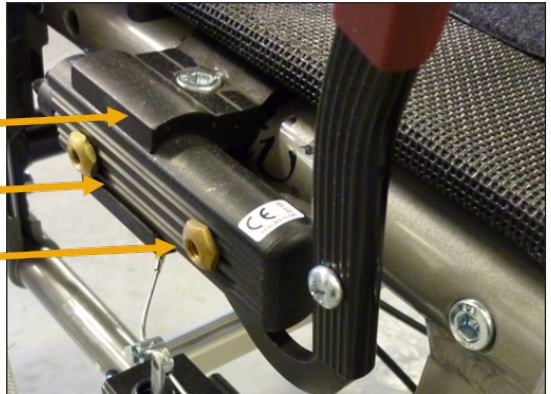

 Bremsen må stå i aktiv stilling
Skyv bremsehåndtaket fremover

Bildet nedenfor viser montering i wireholderen:



- Før wren inn i wireholderen og messingskruen.
- Trekk wren ca 1 mm bakover.
- Stram sett-skruen fast samtidig som du holder messingskruen fast med en fastnøkkel

sett-skrue

messingskrue

wire


wireholder

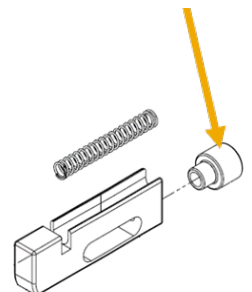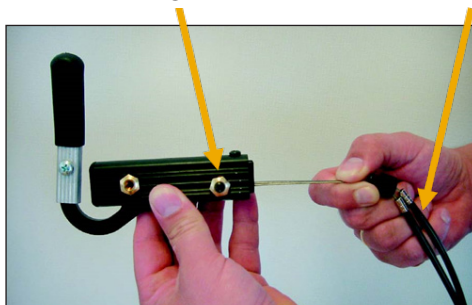

2. ENHÅNDSBREMSE PÅ NETTI V

Hvert tilbehørssett 96974 og 96975 inkluderer:

- 4 stk M6x45 sekskantskrue med innvendig sekskant
- 2 stk M6x12 knappeskruer med innvendig sekskant
- 1 stk Monteringsbrakett for enhåndsbremse
- 1 stk Enhåndsbremse
- 2 stk Vaierklemmer
- 4 stk M5x19 vaierhylse skruer
- 2 stk Vaierfester
- 2 stk Endehylser for vaier
- 2 stk Endehylser
- 2 stk Vaier 1400/1550 mm

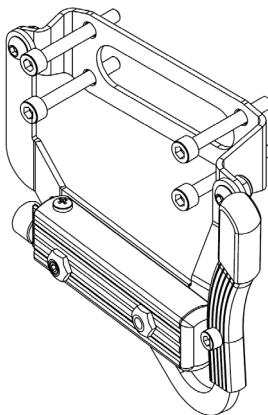

Montering av enhåndsbremse

Fjern dekselet:

Skrut de to stjerneskrue (Phillips-skrue).
Trekk topplokket oppover og bunnlokket nedover.




Plassering av enhåndsbremsen:

Skrut ut alle fire M6 sekskantskrue med innvendig sekskant.



Plasser enhåndsbremsen mellom armlenes støttebrakett og bakplaten, som vist på bildet, med M6x45 sekskantskrue som følger med.

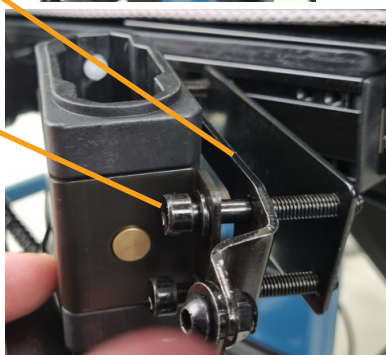

3. For å plassere avstandsstykkene for armlenes støttebrakett, følg disse trinnene:

Bestem ønsket setebredde.

Plasser avstandsstykkene deretter.

Stram de fire M6-skrueene for å feste avstandsstykkene.

Vennligst merk: Plastdekselet vil ikke passe etter montering av enhåndsbremsen.



MONTERINGSBESKRIVELSE: INNFESTING AV WIREN TIL TROMMELBREMSEN PÅ DRIVHJULET

For å korte inn strømpen - trekk wiren ut av strømpen.
Wirene blir kortet inn etter montering.

- Begynn med å korte inn strømpen til 550 mm på siden hvor bremsen skal monteres
 - Kort inn strømpen til andre side i en lengde som angitt i tabellen til høyre.
 - Eksempel: For setebredde 450 mm, kort strømpen inn til 850 mm.
-
- Etter innkorting av strømpen, før strømpheatter over wirestrømpen.
 - Bruk en tang til å klemme strømpheatten slik at den sitter på strømpen.

 Ikke klem strømpheatten for hard; den kan skade strømpewirens innside.

- Klipp av wire-endene med en tang. Bildet ved siden viser wire-enden.
- Før bremsewiren inn i strømpen igjen.




Bildet nedenfor viser hvordan wiren blir montert i trommelbremsen.

 Begynn alltid med montering av wiren på den siden som bremse-enheten er montert.

Wire ende-hette

Wireklemme

Justeringskrue

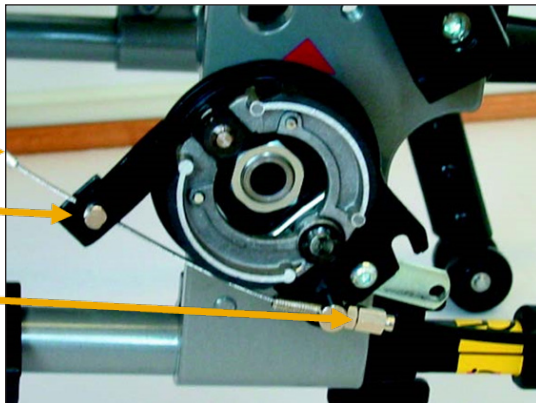

- Skyv wiren gjennom justeringskruen og wire-klemmen som sitter på trommelen.
- Trekk i wiren og skru den fast med wireklemmen.

 Bremsen må ikke være satt på / aktivert når du strammer wireklemmen!

- Monter drivhjulet på trommelbremsen og juster wirene med justeringskruen.
- Kutt wiren til ca 40 - 50 mm fra wireklemmen.
- Monter wire-endeheatten på wiren og klem den fast med en tang.

Produsent:



Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
N-4353 Klepp Stasjon
Norway



post.klepp@meyragroup.com
T: +47 51 78 62 20
my-netti.com

Distributør

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
Denmark

info.ry@meyragroup.com
T: +45 87 88 73 00
my-netti.com