



Børnekørestol

Model: 1.135 Flash

Betjeningsvejledning



MEYRA®

Indhold

De anvendte mærkninger betydning	5
Indledning	5
Modeller	5
Indikationer / kontraindikationer	5
Modtagelse	6
Brug i overensstemmelse med formålet	7
Anvendelse	7
Sammenklapning/udklapning/manuel transport af kørestol	8
Tilpasning	8
Kombination med produkter fra andre producenter	9
Ibrugtagning efter opbevaring	9
Levetid	9
Oversigt	10
Bremse	11
Trykbremse - bruger	11
Aktivering af bremsen	11
Deaktivering af bremsen	11
Driftsbremse	11
Bremsearmsforlænger	12
Omlægning af bremsearmsforlænger	12
Tromlebremse - ledsager	13
Funktion som driftsbremse	13
Benstøtter	14
Benstøtteunderdel	14
Fodbræt	14
Frakkeskåner	15
Frakkeskåner med armlæn	15
Ryglæn	16
Variabel ryg	16
Afmontering af rygpåstræk	16
Montering af rygpåstræk	16
Vinkelindstilleligt ryglæn	17
Skubbehåndtag	17

Stabiliseringsstang	18
Aftagning/isætning af stabiliseringsstang	18
Hjul	19
Drivhjul	19
Hånd- og egebeskytteren	20
Drivringe	20
Støtteruller	21
Drejning af støttehjul	21
Hovedstøtte	22
Højdeindstilling/aftagning	22
Hovedstøttebetræk	22
Terapiplade	23
Sikkerhedssele	23
Grundlæggende sikkerhedsanvisninger	24
Ledsager	24
Udstigning fra kørestolen	25
Opsamling af genstande	25
Kørsel på skråninger, stigninger eller skrånende kørebane	25
Forcering af forhindringer	26
Læsning af kørestolen	26
Transport i køretøjer	27
Transportsikring af kørestol uden passager	27
Persontransport i motorkøretøjer	27
Befordring i offentlige transportmidler	27
Kørsel i offentlig trafik	28
Rengøring	28
Behandlet overflade	29
Desinficering	29
Reparation	29
Istandsættelse	29
Service	29
Reservedele	29
Anvisninger vedrørende længere brugspausen	30

Bortskaffelse	30
Vedligeholdelse	30
Servicearbejde	30
Tekniske data	33
Dæktryk ved luftfyldte dæk	33
Anvendte standarder	33
Specifikationer i overensstemmelse med ISO for model 1.135 Flash	34
Yderligere tekniske data for model 1.135 Flash	35
Symbolforklaring til vaskeanvisningerne	36
Betydningen af mærkaterne på kørestolen	37
Forklaring til symbolerne på typeskiltet	38
Kontrolokumentation	39
Ansvar/garanti	40
Ansvar- / garantikupon	41
Kontrolokumentation ved overdragelse	41
Notater	42

DE ANVENDTE MÆRKNINGERS BETYDNING

Sikkerhedsanvisninger på farvet baggrund skal altid følges!

-  Dette symbol står for anvisninger og anbefalinger.
- [] Henvisning til et billednummer.
- () Henvisning til et funktionselement i et billede.

INDLEDNING

Læs dette dokument før første ibrugtagning, og ret dig efter det.

Børn og unge bør eventuelt læse dette dokument før første køretur sammen med forældre eller en tilsynsførende eller ledsager.

Desuden bør din autoriserede forhandler instruere dig i brugen af din kørestol.

Denne betjeningsvejledning skal gøre dig fortrolig med håndteringen af kørestolen samt forebygge uheld.

-  De illustrerede udstyrsvarianter kan afvige fra din model.

Der findes derfor kapitler med ekstraudstyr, der muligvis ikke er relevante for dit køretøj. I bestillingsformularen til din kørestol finder du en liste over ekstraudstyr og tilbehørsdele, som kan leveres.

Synshandicappede brugere finder PDF-filerne med udvidede oplysninger om vores produkter på vores website under:

< www.meyra.com >.

-  Kontakt din forhandler, hvis du har spørgsmål.

Alternativt kan brugere med synshandicap få en hjælper til at læse teksten i dokumentationsmaterialet højt.

Hold dig løbende opdateret vedrørende produktsikkerheden, mulige tilbagekaldelseskampanjer og generelle brugsanvisninger for vores produkter i < [infocenter](#) > på vores hjemmeside:

< www.meyra.com >.

Vi har udviklet et produkt, som opfylder de tekniske og lovmæssige krav til medicinsk udstyr. Hvis der på trods af dette alligevel skulle opstå en alvorlig hændelse, bedes du skrive til os på vores e-mail-adresse < info@meyra.de > og kontakte den kompetente myndighed i dit medlemsland.

MODELLER

Denne betjeningsvejledning gælder for følgende modeller:

Model 1.135

INDIKATIONER / KONTRAINDIKATIONER

I tilfælde af allergiske reaktioner, hudrødmen og/eller tryksteder ved anvendelse af kørestolen skal der straks søges læge.

For at undgå kontaktallergier anbefaler vi kun at benytte kørestolen med tøj på.

Kørestolen fungerer som støtte ved delvise eller fuldstændige hhv. fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, som brugeren fik eller som er medfødt, og ved stærkt udpræget ganghandicap eller manglende evne til at gå, f.eks. pga.:

- Lammelser,
 - Para-, tetraplegi, para-, tetraparese
 - Medfødte fejdannelser af det centrale nervesystem (myelomeningocele)
 - Infantil cerebralparese
 - Spina bifida
 - Progressive muskeldystrofier

- Defekte lemmer eller deformationer af lemmer.
 - Skoliose
 - Glasknoglesygdom (osteogenesis imperfecta)
 - Dysmeli
- Tab af lemmer.
 - Amputationer af et ben eller en arm
 - Lårbensamputationer (på en eller begge sider)
 - Hofteekstraktion
- Skader eller kontrakturer af lemmer.
 - Kronisk polyarthritis
 - Polyartrose
 - Reumatiske sygdomme
 - Arthrogryposis multiplex congenita
- Andre sygdomme (stærkt til fuldt ud præget begrænsning af mobiliteten/ evnen til at gå ved strukturelle og/eller funktionelle skader ved de nedre ekstremiteter (bl.a. amputation, følger af kvæstelser, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletalt betingede bevægelsesforstyrrelser, hjerte-kredsløbsinsufficiens).
- Sikring af mobiliteten indendørs og udendørs og deltagelse i fællesskabet (integration i en gruppe af jævnaldrende børn og unge / inklusion).

Forsyningen med en adaptiv foldbar kørestol er nødvendig, hvis de tilpasnings- og justeringsmuligheder, som standard-gribehjulskørestole eller letvægts-standard-gribehjulskørestole giver, ikke er tilstrækkelige.

Ved den individuelle forsyning af den ordinerede kørestol skal der ligeledes tages hensyn til den handicappede persons fysiske og psykiske egnethed samt de personlige boligforhold og den private kontekst.

Enhver forsyning bør i det enkelte tilfælde kontrolleres, afprøves og indstilles af en fag-

uddannet person (medicinproduktrådgiver, genoptræningsrådgiver m.m.) passende til den individuelle funktionsnedsættelse, som er opstået af det definerede sygdomsbillede. Hertil hører også, at personer med de i kontraindikationerne angivne problemer i det enkelte tilfælde kan dokumentere den kognitive, personlighedsmæssige og fysiske evne til at betjene den angivne kørestol.

Kørestolen må ikke anvendes ved:

- manglende siddeevne.

Kørestolen må ikke benyttes uden ledsager ved:

- ukontrollerede balanceforstyrrelser,
 - sensoriske forstyrrelser,
 - store tab af lemmer på begge arme,
 - kontrakturer / skader på leddene på begge arme,
 - ikke tilstrækkelig eller ingen synsevne.
-  Spørg din læge, terapeut eller forhandler vedrørende disse og yderligere risici ved produktet.

MODTAGELSE

Alle produkter underkastes kvalitetskontrol på fabrikken og emballeres i særlige papkasser.

-  Du bedes alligevel kontrollere kørestolen for eventuelle transportskader umiddelbart efter modtagelsen – helst mens overbringeren er til stede.
-  Gem emballagen til kørestolen med henblik på evt. senere behov for transport.

BRUG I OVERENSSTEMMELSE MED FORMÅLET

Kørestolen tjener til selvstændig transport af en person eller transport ved hjælp af en ledsager.

Kørestolen er udviklet til børn og unge.

ANVENDELSE

Ved fysiske begrænsninger som f.eks. blindhed kræves der en køreevneattest til selvstændig styring af en kørestol.

Stik ikke hånden ind i egerne, og tag ikke fat i slidbanerne på de roterende hjul. – Risiko for tilskadekomst!

Stik ikke hånden ind mellem trykbremsen og dækkene under fremdrift af kørestolen. – Risiko for tilskadekomst!

Undgå rykvis fremdrift af kørestolen. – Risiko for at vælte!

Benyt ikke kørestolen uden benstøtter eller armstøtter!

Kørestolen kan i visse udførelser overskride de maksimale dimensioner for flugtveje. Du skal altid sikre dig, at eventuelle flugtveje er brede nok til din kørestol.

Kørestolen kan anvendes på et plant, fast underlag og til følgende formål:

- indendørs (f.eks. i boliger, daginstitutioner)
- anvendelse i det fri (f.eks. stier med fast underlag i parker)
- som rejseledsager (f.eks. i busser og tog)
 - ☞ I bestemte mål (samlet højde, samlet bredde, samlet længde, vendradius) er din kørestol ikke egnet til transport i toget.
 - ☞ Informér dig inden transporten om mulige begrænsninger.

- en transport med fly bør kun ske med PU-dæk.
 - ☞ Informér dig inden transporten om mulige begrænsninger hos dit flyselskab.
- Udsæt aldrig kørestolen for ekstreme temperaturer og skadevoldende miljøforhold som f.eks. stærkt sollys, ekstrem kulde og saltvand.
- Sand og andre smudspartikler kan sætte sig fast i de bevægelige dele og bewirke, at de ikke fungerer.
- Kørestolen må kun drives frem via drivringene på drivhjulene.

Lad dig ikke bære i din kørestol ved, at den løftes fri af gulvet. Komponenter, der ikke er fastmonteret, f.eks. sidedele eller benstøtter, kan løsne sig og derved forårsage et styrt.

☞ Kørestolen er et køretøj og ikke en bæreanordning.

Benyt kun kørestolen i overensstemmelse med den specifikation og de grænseværdier, der er angivet i kapitel *Tekniske data* på side 33.

SAMMENKLAPNING/ UDKLAPNING/MANU- EL TRANSPORT AF KØRESTOL

Din kørestol kan foldes uden værktøj.

- ☞ Pas på, at hænderne ikke kommer i klemme i området omkring rammen og de to sidderør!
- 1. Eventuel sædepudding tages af.
- 2. Tag benstøtterne af eller klap begge fodplader op.
- 3. Tag fat i sædebåndet foran og bagved i midten, og træk op.
- 4. Tag evt. forbindelsesstangen til den dobbelte drivring eller skydestangen af.

Din kørestol kan bæres i sammenklappet tilstand.

Skub en underarm forfra ind under sikkerhedsselen, som er foldet opad. Tag fat med den anden hånd under den bageste fold på sædeselen for at støtte.

Løft kørestolen op i vandret position.

Vip kørestolen en smule til den ene side for at klappe den ud. På den side af kørestolen, der står solidt på jorden, trykkes sæderøret nedad, indtil endestoppet nås.

- ☞ Det kan være nødvendigt at trykke begge sæderør efter med hånden.
- ☞ Kontrollér, at sæderøret flugter korrekt med underlaget.

TILPASNING

Få principielt tilpasnings-, indstillings- eller reparationsarbejde udført af en autoriseret forhandler.

Kørestolen giver mulighed for tilpasning til individuelle kropsmål. Inden første brug bør din autoriserede forhandler bør foretage en tilpasning af kørestolen og instruere dig i kørestolens funktionaliteter. I den forbindelse tages der hensyn til brugerens fysiske begrænsninger samt til i hvilke omgivelser kørestolen hovedsagligt skal anvendes. Kontrollér inden første brug, at din kørestol fungerer upåklageligt.

- ☞ Vi anbefaler regelmæssig kontrol af kørestolens tilpasning for også på længere sigt at sikre optimal hjælp, også ved ændring af brugerens sygdom/handicap. Specielt hos børn og unge anbefales det at foretage en tilpasning hver 6. måned.

KOMBINATION MED PRO- DUKTER FRA ANDRE PRODUCENTER

Enhver kombination af din kørestol med komponenter, som ikke er leveret af os, udgør generelt en forandring af din kørestol. Kontakt os for at høre, om vi har godkendt kombinationen.

Hjælpemotorer og frontmotorer

Monteringen af hjælpemotorer og frontmotorer udgør en væsentlig forandring af din kørestol. Med denne forandring ophører overensstemmelseserklæringen for kørestolen.

- ☞ Det påhviler leverandøren af hhv. hjælpemotoren og frontmotoren at dokumentere for kombinationens overensstemmelse med det gyldige direktiv/forordning for medicinsk udstyr. Leverandøren er også ansvarlig for den dokumentation, der følger med kombinationen af det medicinske udstyr.

IBRUGTAGNING EFTER OPBEVARING

Kørestolen er egnet til ibrugtagning efter opbevaring. Ved hjælp af modulsystemet kan kørestolen tilpasses forskellige handicap og kropsmål. Før kørestolen tages i brug igen, skal der altid foretages et komplet eftersyn.

- ☞ De hygiejniske foranstaltninger, der er nødvendige for genanvendelse, skal gennemføres efter en valideret hygiejneplan og skal omfatte desinficering.

Servicevejledningen, som er bestemt til den autoriserede forhandler, informerer om din kørestols genbrug og genbrugshyppighed.


LEVETID

Vi går ud fra, at din kørestol har en forventet gennemsnitlig produktlevetid på 5 år, for så vidt kørestolen anvendes i henhold til bestemmelsesmæssig brug og samtlige vedligeholdelses- og servicespecifikationer overholdes. Kørestolens levetid afhænger både af brugshyppighed, brugsomgivelser og pleje. Kørestolens levetid kan forlænges via brug af reservedele. Reservedele fås som regel i op til 5 år, efter at produktionen er ophørt.

- ☞ Den oplyste levetid udgør ikke nogen yderligere garanti.

OVERSIGT

Oversigten viser som repræsentant for alle modeller kørestolens vigtige komponenter.

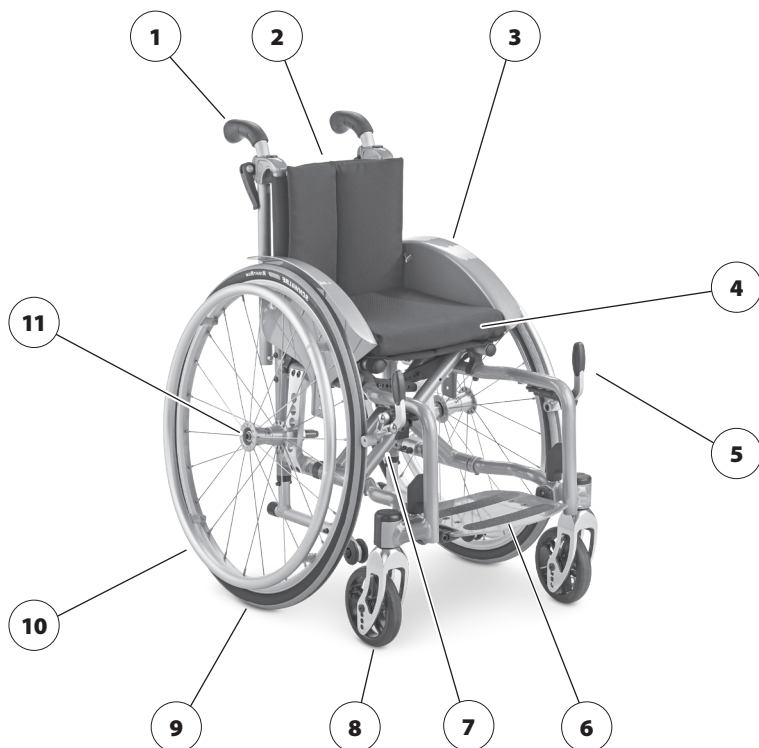

Pos. Betegnelse

(1) Skubbehåndtag

(2) Ryglæn

(3) Armlæn/frakkeskåner

(4) Sæderem/siddepude

(5) Bremsearm – trykbremse

(6) Fodbræt

(7) Typeskilt

(8) Svinghjul

(9) Drivhjul

(10) Drivringe

(11) Spærreknop – stikaksel

BREMSE

Hvis kørestolens bremses bliver slappe, skal de straks repareres af et sagkyndigt værksted.

Kørestole med PU-dæk bør stilles sikkert til side uden trukne trykbremser i længere tid, idet der evt. kan ske en vedvarende deformation af løbefladen.

Ved aktivering af bremsene via bremsearmen (1) er kørestolen sikret mod at rulle utilsigtet (parkeringsbremse).

Kørestolen kan alt efter udførelse være udstyret med trykbremser [2] eller med tromlebremser [3].

Trykbremse - bruger

Aktivering af bremsen

For at sikre kørestolen, så den ikke triller ved et uheld, skal begge bremsearme vippes helt frem [4].

- ⚠ Pas på, at du ikke kommer i klemme mellem bremsearmen og rammerøret!
- ⚠ Ved fastlåste bremses må det ikke være muligt at skubbe kørestolen.



Deaktivering af bremsen

Sving begge bremsearme bagud, indtil endestopet [2] er nået.

Driftsbremse

Kørestolen bremses via drivringene.

- ⚠ Når kørestolen skal bremses, kan man evt. benytte egnede handsker.

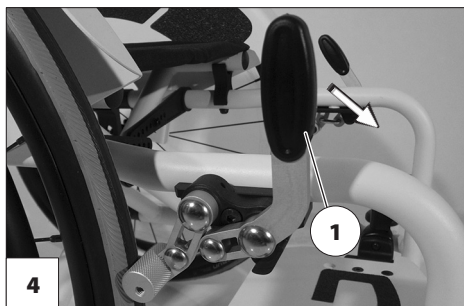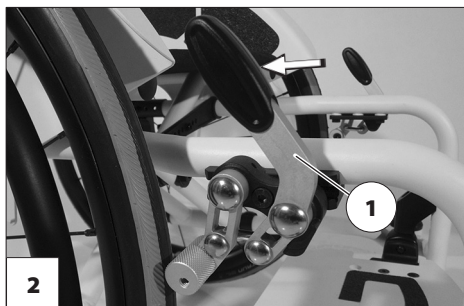

Bremsearmsforlænger

Hvil ikke på bremsearmene!



Bremsearmsforlængerer må ikke trækkes ned under kørsel. – Der er fare for uheld, hvis bremsearmsforlængerer er trukket for langt ned!

Den nedklappelige bremsearm (1) virker som bremsekraftforstærker og reducerer den nødvendige kraftanstrengelse ved aktivering af bremserne.

Omlægning af bremsearmsforlænger

☞ Denne funktion er kun beregnet ved flytning til og fra kørestolen.

For omlægning skal bremsearmsforlænger løftes helt op, og derefter lægges fremad (2) eller løftes og skubbes ned på bremsearmen.

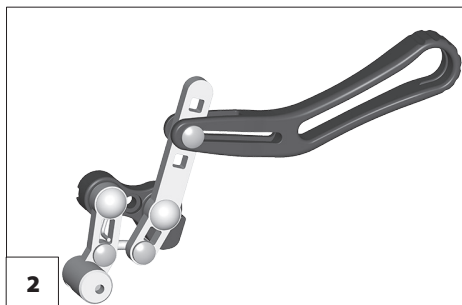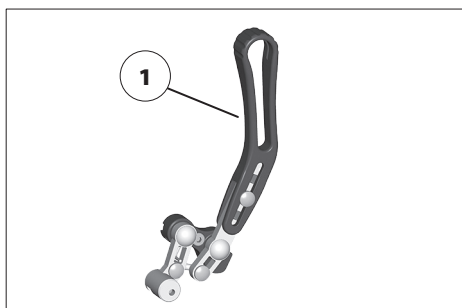

Tromlebremse - ledsager

Tromlebremsen betjenes af ledsageren ved hjælp af bremsearmen [1].

Funktion som driftsbremse

Aktivér kun begge bremsearme let for at bremse kørestolen.

Aktivering af tromlebremsene

Træk i begge bremsehåndtag [1], og skub låsepalen (2) fremad.




Slip bremsehåndtaget. – Afhængigt af indstillingen falder låsepalen i hak i første (A) eller anden (B) position og aktiverer bremsen.

- ☞ Når det er nødvendigt at anvende den tredje låseposition (C) til at aktivere bremsen, skal bremsen efterjusteres på et specialværksted.

Deaktivering af tromlebremseser

Træk i begge bremsehåndtag [1], indtil låsepalerne (2) automatisk går ud af indgreb.

Slip begge bremsehåndtag. – Parkeringsbremsene er løsnet, og kørestolen igen parat til at køre.

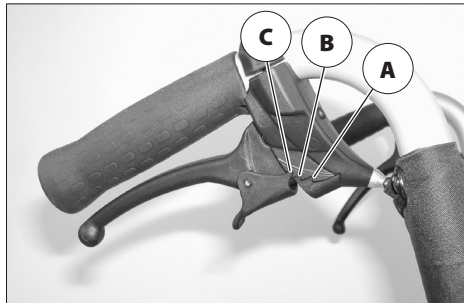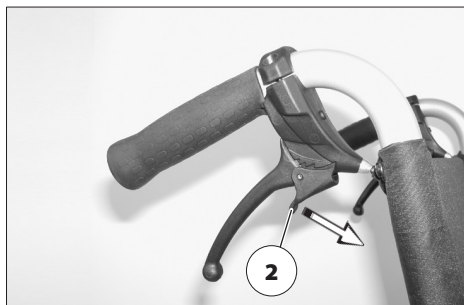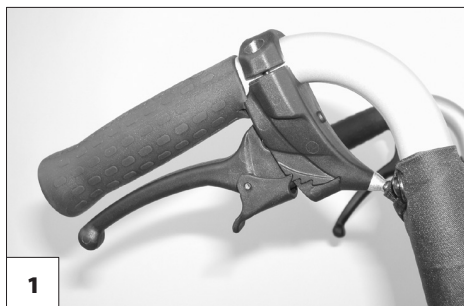

BENSTØTTER

Inden aktivitet på benstøtterne skal kørestolen sikres, så den ikke triller utilsigtet.
– Følg anvisningerne i kapitlet *Bremse* på side 11.

Benstøtteunderdel

Ved ind- eller udstigning skal fodbrættet klappes op.

🔧 Pas på, at du ikke kommer i klemme mellem fodpladen og rammerøret!

– Begge fødder fjernes fra fodpladerne.

Inden kørsel skal fodbrættet klappes ned igen.




Fodbræt

Opklapning af fodbræt

For at klappe fodbrættet op skal den løse side af fodbrættet klappes helt op og forbi modstandspunktet [2] el. [5].

Nedklapning af fodbræt

For at klappe fodbrættet ned skal den løse side af fodbrættet klappes helt ned på fodbrætholderen, indtil den falder i hak [1] el. [5].

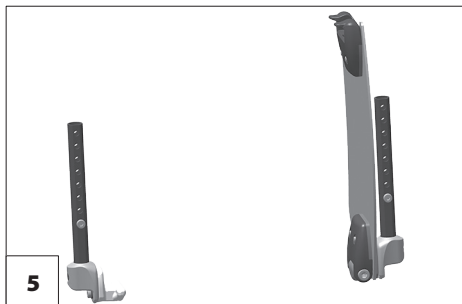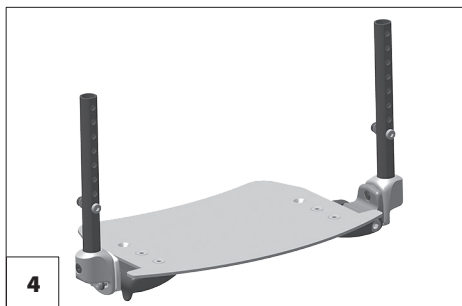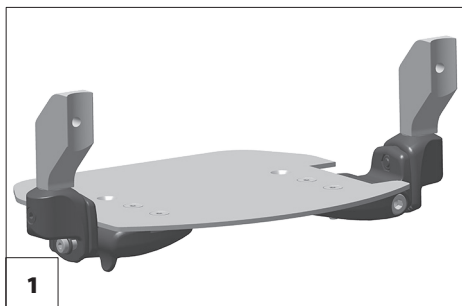

FRAKKESKÅNER

Inden en handling ved frakkeskåneren skal kørestolen sikres mod at rulle utilsigtet væk.– Følg anvisningerne i kapitlet *Bremse* på side 11.

Anvend ikke frakkeskåneren [1] + [2] til at løfte eller bære kørestolen i.

Kør ikke uden frakkeskåner!

Stik ikke hænderne ind imellem stellet og frakkeskåneren. – Risiko for at komme i klemme!

Når kørestolen skubbes af en ledsager, skal brugeren lægge hænderne på armlænet eller i skødet og ikke mellem kroppen og frakkeskåneren. – Risiko for at klemme fingrene!

Frakkeskåner med armlæn

Frakkeskåneren med armlæn [2] kan justeres i højden og tjener både som armstøtte, frakkeskåner og beskyttelse mod vind.




RYGLÆN

Inden der foretages ændringer på ryglænnet, skal kørestolen sikres, så den ikke triller utilsigtet. – Følg anvisningerne i kapitlet *Bremse* på side 11.

Variabel ryg

Rygsele kan justeres ved hjælp af velcrolukning på spændebåndene (2).

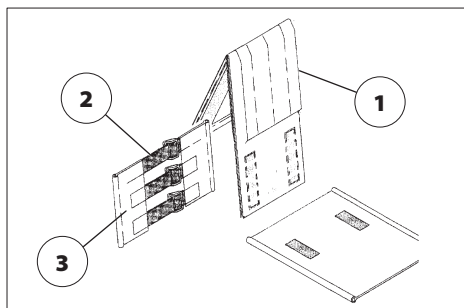

Afmontering af rygpolstring

For at tage rygpolstringen af skal den bageste del (1) først trækkes af, slås om foran og trækkes af den justerbare rygsele (3).

Montering af rygpolstring

For at montere rygpolstringen skal den (1) lægges midt på de øverste velcrobånd (2), og fastgøres ved hjælp af velcrolukningen på den justerbare rygsele (3).

- ☞ For at få en blød overkant skal der være en smule afstand mellem det øverste spændebånd (2) og rygpolstringen (1), som er vippet om.
- ☞ Vær opmærksom på følgende, når brugeren atter læner sig mod rygpolstringen (1):
- ☞ Trykket mod ryggen skal være jævnt fordelt på rygpolstringen.

De forlængede dele af ryggen samles afhængigt af den indstillede ryghøjde på eller under siddefladen.

Vinkelindstilleligt ryglæn

Hver gang ryglænet indstilles, skal det kontrolleres, at ryglænet og forskruingen sidder godt fast!

Ryglænets vinkel kan indstilles med maks. $\pm 15^\circ$ i tre trin på 5° .




SKUBBEHÅNDTAG

De højdeindstillelige skubbehåndtag kan indstilles trinløst i højden med ca. 30 cm og sikres mod at blive trukket ud [2].

Højdeindstillelige skubbehåndtag med klemmeanordning

- ✎ Hold til dette formål fast i det skubbehåndtag, der skal indstilles, med den ene hånd.
- ✎ Efter enhver indstilling skal spændearmen straks aktiveres igen, så skubbehåndtaget ikke længere kan drejes.

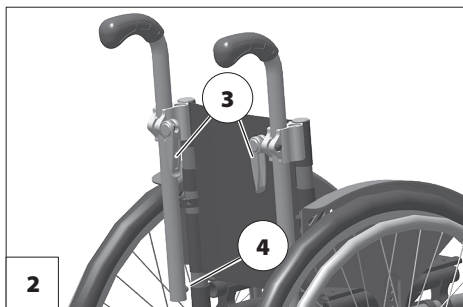

Højdeindstilling:

Løsn spændearmen (3) så meget, at det tilhørende skubbehåndtag kan flyttes til den ønskede position.

Vinkelindstilling:

Løsn spændearmen (3) så meget, at det tilhørende skubbehåndtag kan drejes til den ønskede position.

Udtrækning/indstikning:

1. Tryk på den tilhørende fjederknap (4) for at trække skubbehåndtagene ud eller stikke dem i.
2. Stram så spændearmen (3) igen.

STABILISERINGSSTANG

Inden en handling ved stabiliseringsstangen skal kørestolen sikres mod at rulle utilsigtet væk. – Følg anvisningerne i kapitlet *Bremse* på side 11.

Stabiliseringsstangen (1) strammer rygselen i det øverste område, tjener til fastgøring af hovedstøtten og er sikret mod udtrækning.


- ☞ Kun i forbindelse med højdejusterbare skubbehåndtag.

For sammenklapning af kørestolen kan stabiliseringsstangen tages af.

Aftagning/isætning af stabiliseringsstang

1. Tryk spærreknapperne (2) til stikakslerne ind i begge sider.
2. Tag stabiliseringsstangen af [3] eller sæt den i [4].

- ☞ Efter hver isætning skal der gennemføres en trækprøve!
- ☞ Efter isætning af stabiliseringsstangen skal spærreknappen rage nogle millimeter ud af den pågældende stikaksel. – Stabiliseringsstangen er sikret.
- ☞ Stikakslens låsebolt skal holdes ren. Hvis den bliver snavset af sand eller jord, eller hvis den fryser til pga. kulde kan der forekomme funktionsfejl.

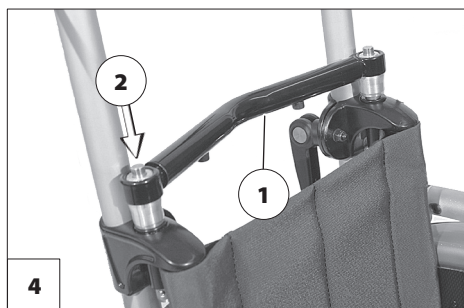

HJUL

Dækkene består af gen gummiblanding og kan på visse underlag efterlade spor, der er vanskelige eller umulige at fjerne (f.eks. kunststof-, træ- eller parketgulve, tæpper, gulvbelægning).

Drivhjul

Brug ikke kørestolen uden monterede drivhjul.

Når drivhjulet er sat på, skal spærreknappen (2) ruge nogle millimeter ud af hjulmøtrikken.

Ved vanskeliggjort kontrol af lufttrykket kan man evt. benytte de valgfrie PU-dæk.

Drivhjulene er monteret på en quick release-aksel [1] og kan tage af eller sættes på uden værktøj.

Tryk først stikakslens spærreknapp (2) i midten af hjulnavet ind.

Derefter trækkes drivhjulet af eller sættes på.

- ☞ Lufttryksværdien på kørestolens hjul fremgår af oplysningerne på begge sider af karkassen eller af kapitel *Dæktryk ved luftfyldte dæk* på side 33.
- ☞ Hvis drivhjulet har for meget spillerum til siden eller hvis stikakslen ikke låses fast, skal forhandleren straks kontaktes med henblik på istandsættelse.
- ☞ Der må ikke sidde en person i kørestolen under af- og påmontering. Kørestolen skal stå på et plant og fast underlag. Inden afmontering af hjulet skal kørestellet støttes, så det ikke kan vælte og kørestolen ikke kan rulle.



Hånd- og egebeskytteren

Ændring eller udskiftning af hånd- og egebeskytteren bør foretages af forhandleren.

Hånd- og egebeskytteren forhindrer, at man kommer til skade med hænderne ved at stikke dem ind i hjulegerne, mens hjulene drejer rundt, og samtidig forhindrer den, at egerne ødelægges.

Egebeskytteren fastgøres med tre clips (1) på egerne.

- ☞ På < www.blueprince.de > kan der vælges andre designmotiver for skift af hånd- og egebeskytteren.

DRIVRINGE

Vejrligsbetinget fare for, at hænderne glider på fugtige, glatte gribehjul (2).

- ☞ Brug evt. et gribehjulsovertræk (ekstratilbehør).



STØTTERULLER

Støttehjulene giver i visse situationer ikke tilstrækkelig sikkerhed mod, at kørestolen vælter.

Undgå at gøre følgende:

- At læne overkroppen kraftigt tilbage.
- Pludselig acceleration, særligt ved kørsel op ad bakke.

Undgå at vippe bagud – køр aldrig uden at støttehjulet er drejet tilbage.

Støttehjulene [1] skal forøge antitip-stabiliteten og kan svinges ind under sædet [2].

- ☞ Støttehjulene forefindes alt efter udførelse enkeltvis eller parvis.

Drejning af støttehjul

Tryk støttehjulene med foden nedad ud af låsemekanismen, herefter indad under sædet [1] eller sving dem bagud [2], indtil den pågældende låsemekanisme automatisk går i hak.



HØVEDSTØTTE

Hovedstøttens overkant skal altid indstilles tæt på baghovedet, cirka i øjenhøjde.

Undlad at placere hovedstøtten i nakkehøjde.

Træk kun maksimalt hovedstøtten ud af holderen indtil markeringen.

Hovedstøtten tjener kun som en hjælp til hovedholderen i regulær drift, den kan dog ikke erstatte en fast bil-hovedstøtte ved personbefordring i motorkøretøjer.

Kontrollér regelmæssigt, at hovedstøtten sidder godt fast og fungerer.

Hovedstøtten [1] er sikret mod fordrejning, højdejusterbar og aftagelig.

Højdeindstilling/aftagning

Ved højdeindstilling og aftagning af hovedstøtten skal klemskruen (2) løsnes.

- 🔧 Hovedstøtten kan efter behov også fjernes ved aftagning af stabiliseringsstangen [3].
- 🔧 Følg anvisningerne i kapitlet *Stabiliseringsstang* på side 18.

Hovedstøttebetræk

Hovedstøttebetrækket kan tages af ved hjælp af lynlåsen og vaskes.

- 🔧 Følg anvisningerne i kapitlet *Symbolforklaring til vaskeanvisningerne* på side 36.



TERAPIPLADE

Fare for at komme i klemme, når terapipladen skubbes på!

Skarpkantede genstande (f.eks. ure, ringe, knive eller bæltespænder) samt grovkornet støv kan efterlade furer og ridser på terapipladens overflade.

Undlad at stille varme genstande på terapipladen.

Kør ikke med terapipladen på, hvis der står løse genstande eller væskefyldte beholdere på den.

Undlad at bruge aggressive eller kornede rengøringsmidler til rengøring af terapipladen.

Terapipladen må ikke anvendes til at løfte køretøjet i.



Terapipladen skubbes hen over armlænets polstring forfra [1].

- ☛ Sørg for, at terapipladen hviler sikkert på armlænenes puder.



SIKKERHEDSSELE

Sørg for, at der ikke kommer nogen genstande i klemme under seleremmen!

Sikkerhedsselen er ikke en del af sikkerhedsselesystemet til kørestolen og/eller passageren ved transport i bil.

Sikkerhedsselen [1] skrues på det pågældende ryglænsrør bagfra.

Sikkerhedsselen er beregnet til at stabilisere siddestillingen og forhindrer, at man vælter forlæns ud af kørestolen.

Når sikkerhedsselen skal spændes, trækkes begge selens dele fremefter, og låsen skal gå hørligt i indgreb.

Tryk på aktiveringsknappen og træk seleen-derne fra hinanden for at åbne sikkerhedsselen.

- ☛ Sikkerhedsselen kan forlænges og må ikke sidde for stramt.

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

De nærværende sikkerhedsanvisninger er et udtræk af *Sikkerhedsanvisninger og generelle betjeningsanvisninger*, som kan findes på vores internetside: < www.meyra.com >.

Kørestolen tjener udelukkende til transport af en siddende person.

 Den er ikke beregnet til andre former for træk- eller transportbelastninger.

Stik ikke fingrene ind i åbne stelrør (f.eks. efter afmontering af armlæn, benstøtter eller støttehjul). – Risiko for tilskadekomst!

Fare for at komme i klemme på grund af bevægelige dele af stiveren.

Det er kun tilladt at trippe (få kørestolen til at køre ved hjælp af fødderne) med lav hastighed på vandrette, jævne overflader indendørs.

Pas på, at fødderne ikke kommer i klemme, når du tripper.

I den forbindelse må siddepositionen ikke flyttes til den forreste tredjedel af sædet.

Under anvendelse af kørestolen, også ved stilstand og især på stigninger/skråninger, skal man indtage en sikker siddestilling. – Fare for uheld!

For at opnå en sikker siddeposition skal brugerens ryg flugte med rygpolstringen og brugerens bækken sidde helt tilbage på sædet.

Fare for kvæstelser, f.eks. på grund af hud-afskrabninger, ved utilsigtet aktivering af bremsearmen.

En forflytning fra kørestolen på stigninger/skråninger må kun i nødstilfælde ske med hjælp fra en ledsager og/eller hjælper! – Fare for uheld!

Justér kun sædehældningen, når kørestolen står på en vandret, plan flade. På stigninger er der risiko for, at kørestolen vælter!

Øget risiko for væltning ved anvendelse af det vinkelindstillede ryglæn.

Før kørsel skal det sikres, at der ikke er indstillet en negativ sædehældning, og at sædehældningen garanterer en sikker siddestilling.

Du bør ikke ryge under brugen af kørestolen.

Ved direkte sollys, kan sædebetræk/puder, armlænsputer, benstøtter og håndtag opnå temperaturer på over 41 °C. – Der er fare for tilskadekomst ved kontakt med ubeskyttet hud! Undgå en sådan opvarmning af kørestolen ved altid at parkere den i skyggen.

Der er ikke beregnet specielle holdepunkter til fastgørelse af objekter, som skal medtages.

Ledsager

Ledsageren skal gøres opmærksom på alle evt. faresituationer, før han/hun begynder at hjælpe. De komponenter på din kørestol, som ledsageren skal tage fat i, skal sidde forsvarelig fast.

Udstigning fra kørestolen

Kør kørestolen så tæt som muligt på det sted, hvor du vil stige ud af kørestolen.

- ☞ Bemærk desuden kapitel *Bremse* på side 11.
- ☞ Vi anbefaler, at udstigningen af kørestolen sker med en person til assistance.

Opsamling af genstande

Undgå at hælde overkroppen langt fremad, til siden eller bagud, især ved opsamling eller aflægning af tunge genstande. – Risiko for, at kørestolen vælter, især ved lille sædebredde og stor sædehøjde (siddepude)!

Kørsel på skråninger, stigninger eller skrånende kørebane

Fra en bestemt kørebanehældning er væltessikkerheden og bremse- og styrefunktion betydeligt nedsat på grund af reduceret vejgreb.

- ☞ Se kapitlet *Tekniske data* på side 33.

For din egen sikkerheds skyld anbefaler vi, at du sikrer dig hjælp og støtte fra en ledsager til hældninger fra 1 %.

- ☞ Denne stigning gælder for personer, der ikke er i stand til at foretage selv helt små tyngdepunktsændringer ved at bevæge overkroppen.

Ledsageren skal være opmærksom på, at det kræver flere kræfter at føre en kørestol på skrånende end på plane områder, og at risikoen for at glide ud er større.

Læn dig aldrig til den lave side af skråninger og køreunderlag med sidehældning.

Undgå rykvisе ændringer af køretilstanden (især ved kritisk indstillede køreparametre, som f.eks. aktiv hjulposition).

Kør aldrig hurtigere end fodgængerhastighed.

Når der køres nedad, stiger risikoen for at vælte.

Der er fare for at vælte ved kørsel i sving og ved vending på stigninger og nedkørsler.

Den bremsekraft, der kan overføres til kørebanen, er væsentligt mindre ved kørsel ned ad bakke end på lige vej og forringes yderligere ved dårligere vejforhold (f.eks. vådt føre, sne, grus, tilsmudsning). En farlig udskridning af de bremsede hjul og en dermed forbundet uønsket kursafvigelse skal udelukkes ved at bremse forsigtigt og kontrolleret.

For enden af bakken skal du passe på, at fodpladerne ikke berører jorden og dermed skaber en faresituation som følge af pludselig opbremsning.

Køreunderlag med sidehældning (f.eks. fortov med sidehældning) bevirker, at din kørestol vil dreje mod den lave side. Dette skal du selv eller en ledsager udligne ved at styre modsat.

Forcering af forhindringer

Når trin er forceret, skal evt. afmonterede støttehjul monteres igen eller støttehjul, som er svunget ud, svinges tilbage igen.

Enhver forcering af en forhindring udgør en risiko! Der er også risiko for at vælte ved flade forhindringer (f.eks. dørtærskler, tæppekanter, afsatser o.l.).

Forcering af en forhindring er en særlig risikosituation, hvor der bl.a. skal tages hensyn til en kombination af sikkerhedsanvisninger vedrørende skråninger og køreunderlag med sidehældning.

Du bør for din egen sikkerheds skyld kun køre over forhindringer med en ledsager. Hver gang, kørestolen vipper, skal træderør bruges som støtte.

Kun, hvis kørestolen beherskes tilstrækkelig sikkert, er det uden risiko at køre over mindre forhindringer (< 4 cm).

Kør altid langsomt og i en ret vinkel (90°) hen mod mindre forhindringer, indtil svinghjule- ne berører forhindringen. Stands kørestolen kortvarigt og kør så over forhindringen.

Kør altid forlæns over en forhindring med begge for-/baghjul samtidig for at undgå, at kørestolen tipper til siden.

Hold så stor en sikkerhedsafstand til afgrunde, trapper, skråninger, bredder osv., at der er tilstrækkelig plads til at reagere, bremse og vende.

Hvis det er muligt, skal du få en eller flere hjælpere til at løfte dig ud af kørestolen og bære dig hen til det ønskede sted.

Kørsel på trapper må kun ske ledsaget af to hjælpere, som er fortrolige med den risikofyldte situation og fører kørestolen med fast hånd.

 Hjælperne må kun tage fat i skubbe- håndtagene og siderammen uden at løfte kørestolen.

Eventuelle støttehjul skal fjernes, da de under visse omstændigheder kan betyde en farlig situation for hjælperen.

Læsning af kørestolen

Tag ikke fat i benstøtter, armlæn eller tilbehørsdele for at løfte op i kørestolen!

Før der løftes op i kørestolen, skal den sikres mod utilsigtede kørebævegelser!

 Følg anvisningerne i kapitlet *Bremse* på side 11.

De dele, som er blevet afmonteret med henblik på læsning, skal opbevares sikkert og anbringes igen omhyggeligt inden kørsel.

Kørestolens vægt reduceres, når du tager aftagelige komponenter af.

Kørestolen kan også læsses ved hjælp af ramper eller løfteplatforme.

 Følg brugsanvisningerne, og tag hensyn til rampens eller løfteplatformens bæreevne.

Transport i køretøjer

De afmonterede dele skal opbevares sikkert og anbringes omhyggeligt igen, før kørestolen tages i brug.

For at bære de aftagelige dele kræves ingen specielle bærepunkter.

Følgende foranstaltninger kan af pladshensyn være nødvendige ved transport i køretøjer:

- Tag benstøtten af.
- Tag armlænen af.
- Slå ryglænet ned, eller tag det af.
- Tag drivhjulene af.

Transportsikring af kørestol uden pasager

Den aktuelle transportvirksomheds forskrifter og anvisninger skal følges. – Forhør dig om dem før transporten.

Kørestolen skal opbevares og sikres sådan, at den hverken udgør nogen fare for dig eller andre.

Persontransport i motorkøretøjer

Om netop din kørestol er godkendt til transport i motorkøretøj, fremgår af kapitlet *Betydningen af mærkaterne på kørestolen* på side 37.

- ☞ Se vejledningen < *Sikkerhed med Meyra-kørestole, også ved transport i bil* >!
 - Dette dokument og yderligere information findes i < *Information center* > på vores website < www.meyra.com >.

Transportsikring

Den aktuelle transportvirksomheds forskrifter og anvisninger skal følges. – Forhør dig om dem før transporten.

Kørestolen skal nu sikres ved hjælp af forankringspunkterne.

- ☞ De fire forankringspunkter er markeret med et "flueben"-symbol.

Befordring i offentlige transportmidler

Din kørestol er ikke beregnet til personbefordring i offentlige transportmidler. Det kan medføre begrænsninger. Vi anbefaler, at der benyttes et sæde, der er indbygget i befordringsmidlet.

Hvis siddende befordring i kørestolen alligevel skulle være uomgængeligt nødvendig, skal følgende overholdes:

- Benyt den plads, som trafikselskabet har bestemt til fræsætning.
- Overhold trafikselskabets forskrifter, før du parkerer kørestolen.
- Parkér din kørestol mod kørselsretningen på den afsete plads.
- Kørestolen skal placeres således, at ryglænet kan støtte mod begrænsningen af den afsete plads.
- Den ene side af kørestolen skal desuden flugte med en ekstra begrænsning af den afsete plads, så kørestolen ikke kan skride under et uheld eller en pludselig bremsemanøvre.
- Aktivér desuden parkeringsbremsen.

Kørsel i offentlig trafik

Overhold de nationale gældende forskrifter vedrørende kørsel på offentlige veje og spørg i givet fald din autoriserede forhandler efter det nødvendige tilbehør.

Kørestolen kan leveres med et lysanlæg som ekstraudstyr. Anlægget består af:

- Katteøjne i ryggen
- Katteøjne på drivhjulene.

Ved dårlig sigtbarhed og især efter mørkets frembrud anbefales det, at der monteres og tændes et aktivt belysningsanlæg, så din sigtbarhed øges og du selv nemmere kan blive set.

- ☞ Ved færdsel i den offentlige trafik er det føreren, der er ansvarlig for den funktions- og driftssikre tilstand af kørestolen.
- ☞ Ved kørsel i offentlig trafik skal de gældende færdselsregler overholdes.
- ☞ Hvis du kører i mørke, anbefaler vi, at du bærer lyst og iøjnefaldende tøj, så det er lettere at se dig.
- ☞ Undgå ved kørsel i mørke at anvende kørebaner og cykelstier.
- ☞ Sørg for, at lysanlægget ikke tildækkes af beklædnings- eller andre genstande, der er fastgjort til kørestolen.
- ☞ Ved fysiske begrænsninger som f.eks. blindhed er det kun tilladt at benytte din kørestol sammen med en ledsager.

Rengøring

Syntetiske afdækninger angribes af nonion-naktive detergenter, opløsningsmiddel og især af alkohol.

Polstringer og betræk er som regel forsynet med plejeanvisninger (plejeskilt).

- ☞ Bemærk kapitel *Symbolforklaring til vaskEANvisningerne* på side 36.

Ellers gælder følgende anvisninger:

- ☞ Rengør puderne med varmt vand og opvaskemiddel.
- ☞ Pletter kan fjernes med en svamp eller en blød børste.
- ☞ Vask genstridige pletter ved at anvende et almindeligt vaskemiddel.
- ☞ Må ikke vaskes! Undlad vask i vaskemaskine!

Skyl med rent vand, og lad det tørre.

Fugtig rengøring af understel, lysanlæg og hjul kan foretages med et mildt rengøringsmiddel. Derefter tørres omhyggeligt.

- ☞ Kontrollér stellet for korrosionsskader samt andre skader.
- ☞ De syntetiske materialer må kun rengøres med varmt vand og neutralt rengøringsmiddel eller brun sæbe.

Yderligere oplysninger om rengøring og pleje finder du i < *Information center* > på vores website:

< www.meyra.com >.

Behandlet overflade

Der er bedst mulig beskyttelse imod korrosion på grund af en speciel overfladebehandling.

- ☞ Hvis lakken er ridset eller beskadiget på lignende måde, kan stederne udbedres med en lakstift, der kan fås hos os gennem forhandleren.

Hvis de bevægelige dele af og til smøres med lidt olie, forlænges deres funktion.

Desinficering

Hvis produktet benyttes af flere personer (f.eks. på plejehjem), skal der anvendes et almindeligt desinficeringsmiddel.

- ☞ Før desinficeringen skal polstringer og håndtag rengøres.
- ☞ Det er tilladt at spraye eller aftørre med godkendte og anerkendte desinfektionsmidler.

Oplysninger om kontrollerede og anerkendte desinfektionsmidler og -procedurer kan fås af din nationale myndighed for sundhedsbeskyttelse.

- ☞ Ved anvendelse af desinfektionsmidler kan der forekomme skader på overflader, hvilket kan forringe komponenternes funktion på længere sigt.
- ☞ Følg producentens anvisninger for produktet.

Reparation

Reparationer må principielt kun gennemføres af autoriserede forhandlere.

Istandsættelse

Ved udførelse af reparationsarbejde kan du have fuld tillid til din forhandler. Han/hun er blevet instrueret i udførelsen af dette arbejde.

Service

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, bedes du henvende dig til din forhandler, der kan rådgive dig samt udføre service og reparation.

Reservedele

Reservedele kan udelukkende fås hos forhandleren. I tilfælde af reparation må der kun anvendes originale reservedele!

- ☞ Komponenter fra andre firmaer kan forårsage fejl.

En reservedelsliste med de tilhørende artikelnumre og tegninger ligger hos forhandleren.

For at få leveret de rigtige reservedele er det altid nødvendigt også at angive kørestolens serie-nr. (SN)! Nummeret står på typeskiltet.

Ved enhver ændring/modificering af kørestolen foretaget af den autoriserede forhandler skal kørestolens betjeningsvejledning vedlægges supplerende information, såsom monterings-/betjeningsanvisninger. Dato for ændringer skal registreres og anføres ved reservedelsbestillinger.


På denne måde forebygges fejlbestillinger ved senere reservedelsbestillinger.

Anvisninger vedrørende længere brugspauser

Der kræves ingen særlige forholdsregler ved længere brugspauser. Opbevaringstemperaturerne skal dog overholdes.

- ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Tekniske data* på side 33.

BORTSKAFFELSE

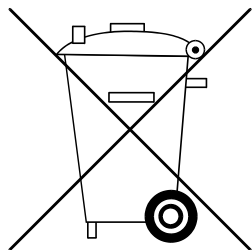

Bortskaffelse skal ske i henhold til nationalt gældende lovbestemmelser.

Kontakt kommunen for oplysninger om den lokale miljøstation.

VEDLIGEHOLDELSE

Mangelfuld eller forsømt pleje og service af kørestolen fører til en begrænsning af garantien fra producenten.

Servicearbejde

Følgende serviceplan indeholder retningslinjer for udførelse af servicearbejde.

- ☞ Vedligeholdelsesplanen giver ingen oplysninger om det faktisk nødvendige arbejdsomfang, som er konstateret ved kørestolen.

HVORNÅR	HVAD	BEMÆRKNING
Inden kørsel	Generelt Kontrollér for fejlfri funktion.	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper.
Inden kørsel	Kontrollér, at bremseanlægget fungerer korrekt Tryk bremsearmen helt i bund.	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper. De bremsede hjul må ikke længere kunne drejes. Hvis de alligevel drejer, skal bremsen repareres på et sagkyndigt værksted.
Inden kørsel	Kontrollér trykbremsen for slid Bevæg bremsearmen til siderne.	Udfør dette selv eller få en hjælper til det. Hvis bremsearmens slør øges, skal du henvende dig til et sagkyndigt værksted for at få det repareret. – Fare for uheld!
Inden kørsel (hvis sådanne findes)	Kontrollér dækkenes lufttryk Dæktryk:  Se Dæktryk ved luftfyldte dæk på side 33.	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper. Anvend en dæktryksmåler til dette formål.
Inden kørsel	Kontrollér dækkenes profil	Foretag selv visuel kontrol. Ved nedslidt profil eller i tilfælde af, at et dæk er beskadiget, skal du henvende dig til et sagkyndigt værksted for at få fejlen rettet.

HVORNÅR	HVAD	BEMÆRKNING
Inden kørsel	Kontrollér rygrør og stelrør for skader	Udfør kontrollen selv, eller få en hjælper til det. Hvis der forekommer deformation eller revner i området omkring svejse-sømmen, skal du straks kontakte et sagkyndigt værksted med henblik på istandsættelse. – Fare for uheld!
Især inden kørsel i mørke (hvis sådanne findes)	Kontrollér belysning Kontrollér, at lys og blink-lys samt reflekser fungerer fejlfrit.	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper.
Hver 8. uge (alt efter, hvor ofte kørestolen bruges)	Følgende komponenter forsynes med et par dråber olie – Låsemekanismens bevægelige dele. – Bremsearmsleje.	Udfør dette alene eller sammen med en hjælper. Før smøring skal gammel olie fjernes fra komponenterne. Sørg for, at overskydende olie ikke forurener omgivelserne (f.eks. dit tøj).
Hver 8. uge (alt efter, hvor ofte kørestolen bruges)	Kontrollér, om alle skrueforbindelser sidder fast	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper.
Hver 6. måned (alt efter, hvor ofte kørestolen bruges)	Kontrollér – Renhed. – Generel tilstand.	Se Pleje. Se Istandsættelse.
Producentens anbefalinger: Hver 12. måned (alt efter, hvor ofte kørestolen bruges)	Sikkerhedseftersyn – Kørestol.	Foretages af forhandleren.

TEKNISKE DATA

Alle angivelser under < Tekniske data > gælder standardmodellen.

Totallængden er afhængig af drivhjulenes position og størrelse.

Såfremt der ikke er oplyst andet, er målene beregnet med drivhjul på $\varnothing$ 610 mm (24").

Bredden er beregnet med en afstand mellem drivringe og drivhjul på 15 mm.

Måletolerance ± 15 mm, $\pm 2^\circ$.

Forkortelser for kørestolens mål:

SH = Sædehøjde

SHB = Sædehøjde bag

SB = Sædebredde

SD = Sædedybde

RH = Ryghøjde

Beregning af den maks. brugervægt:

Den tilladte totalvægt beregnes på grundlag af kørestolens egenvægt og den maksimale bruger-(person)vægt.

Yderligere vægt pga. senere påmonterede dele eller bagage reducerer den maks. brugervægt.

Eksempel:

En bruger vil tage bagage på 5 kg med. Dermed reduceres den maks. brugervægt med 5 kg.

Dæktryk ved luftfyldte dæk

Det maks. dæktryk står på begge sider af dækket.

Dæktryk – styrehjul

Standard:

2,5 - 3,5 bar = 36 - 50 psi

Dæktryk - drivhjul

Standard:

3,0 - 4,0 bar = 44 - 58 psi

Ultraletløb:

6 bar = 87 psi

Højtryksdæk:

8 bar = 116 psi

Anvendte standarder

Kørestolen er i overensstemmelse med standarden:

- EN 12183: 2014
- ISO 7176-8: 2014
- ISO 7176 -19: 2008
-  Evalueringen af crash-testen, hvor kørestolen fastgøres ved køretøjets stopsystem, er udført i henhold til kontrolmetoderne i tillæg D.

Vores anvendte moduler og komponenter opfylder EN 1021-2 for bestandighed over for antændelse.

Specifikationer i overensstemmelse med ISO for model 1.135 Flash

	min.	maks.
Total længde med benstøtter	720 mm	940 mm
Total bredde	SB +180 mm	SB + 240 mm
Totalmasse	– kg	85 kg
Brugermasse (inkl. nyttelast)	– kg	75 kg
Den tungeste dels masse	1,7 kg	10 kg
Faktisk sædedybde	240 mm	400 mm
Faktisk sædebredde	240 mm	400 mm
Længde sammenklappet	720 mm	940 mm
Bredde sammenklappet	290 mm	350 mm
Højde sammenklappet	680 mm	780 mm
Sædefladens højde ved forkanten (uden sædepude)	390 mm	480 mm
Sædevinkel	0°	10°
Ryglænsvinkel	75°	100°
Rygstroppens højde	250 mm	400 mm
Benstøtter til sæde (underbenets længde)	220 mm	440 mm
Statisk stabilitet nedkørsel	–°	6° (10%)
Statisk stabilitet opkørsel	–°	6° (10%)
Statisk stabilitet sidelæns	–°	6° (10%)
Dynamisk stabilitet opkørsel	–°	6° (10%)
Vinkel benstøtter/sædeflade	90°	90°
Armlæns højde fra siddeflade	170 mm	260 mm
Ryglæn til forkant af armlæn	200 mm	250 mm
Drivringens diameter	465 mm	520 mm
Aksel, horisontalposition	24,5 mm	69,5 mm
Overvindelse af forhindringer	0 mm	100 mm
Min. venderadius (normativ anbefaling iht. ISO 1000 mm)	950 mm	– mm
Svingradius	– mm	1100 mm
Testdukkens vægt (ISO 7176-8)	– kg	75 kg

Yderligere tekniske data for model 1.135 Flash

	min.	maks.
Total højde	– mm	SHB + RH +60 mm
Sædehøjde bag (SHB)	360 mm	470 mm
Siddepudens tykkelse	30 mm	30 mm
Længde (uden drivhjul) (Støttehjulene er taget af og svinget ind under sædet)	600 mm	810 mm
Nyttelast	– kg	10 kg
Egenvægt	10 kg	15 kg
Transportvægt (uden puder, drivhjul)	6,6 kg	– kg
Vægt sædepude	0,9 kg	– kg
Vægt drivhjul (1 stk.)	1,9 kg	– kg
<u>Svinghjul</u>		
ø 100 mm		Massiv gummi
ø 125 mm		Massiv gummi
ø 142 mm		Soft-helgummi
<u>Drivhjul</u>		
ø 560 mm (22")		luftfyldte dæk, PU-dæk
ø 610 mm (24 x 1 3/8")		luftfyldte dæk, PU-dæk
<u>Klimatekniske oplysninger</u>		
Omgivelsestemperatur		-20 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur		-30 °C til +60 °C

Symbolforklaring til vaskeanvisningerne

(symbolerne er i overensstemmelse med europæisk standard)



Finvaskeprogram ved den angivne maksimale vasketemperatur i °C



Normalvaskeprogram ved den angivne maksimale vasketemperatur i °C



Håndvask



Må ikke udsættes for blegemidler



Ikke egnet til tørretumbler




Må ikke stryges




Må ikke kemisk renses

Betydningen af mærkaterne på kørestolen

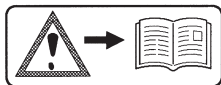

OBS!

Læs betjeningsvejledninger og vedlagt dokumentation.

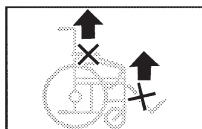

Kørestolen må ikke løftes i armlæn eller benstøtter.

Kørestolen må ikke løftes i dele, der kan afmonteres.

Achtung

Bremse nachstellen.

Ident.-Nr. 8390658

OBS

Efterjuster bremse.

Achtung

Erhöhte Kippgefahr auf Steigung / Gefälle besonders in Verbindung mit kurzem Radstand.

Ident.-Nr. 205674400

OBS

Øget risiko for væltning på stigning/hældning især i forbindelse med kort hjulafstand.



Produktet er **ikke** godkendt som sæde i bil.



Advarsel mod risiko for klemning. – Stik ikke hænder/arme ind imellem komponenterne.



Forankringspunkt ved handicaptransport

Forklaring til symbolerne på typeskiltet



Producent



Bestillingsnummer



Serienummer



Produktionsdato



Till. brugervægt



Till. totalvægt



Till. akseltryk



Till. stigning



Till. fald

max. ... km/h

Till. maks. hastighed



Produktet er godkendt som sæde i bil.



Maks. tilladt brugervægt, når produktet er godkendt som sæde i et motorkøretøj.



Produktet er **ikke** godkendt som sæde i bil.



Medicinsk udstyr

KONTROLDOKUMENTATION

Køretøjets data:

Model:

Følgeseddel-nr.:

Serie-nr. (SN):

Anbefalet sikkerhedskontrol 1. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedskontrol 2. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedskontrol 3. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedskontrol 4. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedskontrol 5. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

ANSVAR/GARANTI

Manglende overholdelse af betjeningsvejledningen samt uprofessionel udførelse af vedligeholdelsesarbejde og især af tekniske ændringer og udvidelser (påmonterede dele) uden vores samtykke medfører bortfald af såvel ansvars- og garantikrav som af almindeligt produktansvar.

Nationale ansvars- / garantibetingelser mellem dig og din fagforhandler kan afvige fra de i kapitlet angivne betingelser.

For dette produkt påtager vi os det lovpligtige ansvar som en del af vores generelle forretningsbetingelser samt evt. øvrige udspecificerede/aftalte garantier. I forbindelse med krav om ansvar og garanti bedes du kontakte din forhandler medbringende følgende ANSVARS-/GARANTIKUPON samt de nødvendige oplysninger om model, følgeseddel-nr. med leveringsdato og serienummer (SN).

Serienummeret (SN) kan aflæses på typeskiltet.

Anerkendelse af ansvars- og garantikrav forudsætter altid en korrekt anvendelse af produktet, anvendelse af originale reservedele fra forhandlere samt regelmæssig udførelse af vedligeholdelse og kontrol.

Garantien dækker ikke skader på overfladen, hjulenes slanger og dæk, beskadigelser som følge af løsnede skruer eller møtrikker, ødelagte fastgøringshuller som følge af hyppigt monteringsarbejde.

Garantien dækker heller ikke skader på drev og elektronik som følge af usagkyndig rengøring med dampstråleudstyr eller som følge af, at komponenterne forsætligt eller uforsætligt er blevet udsat for vand.

Fejl på grund af strålingskilder som f.eks. mobiltelefoner med stor sendeeffekt, Hi-Fi-anlæg og andre kraftige støjkilder uden for normspecifikationerne kan ikke gøres gældende som ansvars- eller garantikrav.

Denne betjeningsvejledning skal som en integreret del af produktet medgives ved bruger- eller ejerskifte.

Evalueringen af vore produkter kan ske ved hjælp af vores < *Information center* > (information center) Område < *PMS* > på vores hjemmeside < www.meyra.com >.

Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med fremskridt for øje.



Dette produkt stemmer overens med EF-direktiv 93/42/EØF og opfylder pr. 25.05.2021 kravene i forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

Ansvar- / garantikupon

Bedes udfyldt! Kan efter behov kopieres, og kopien sendes til forhandleren.

Ansvar/garanti

Modelbetegnelse:

Følgeseddel-nr.:

SN (se typeskiltet):

Leveringsdato:

Forhandlerens stempel:

Kontroldokumentation ved overdragelse

Køretøjets data:

Serie-nr. (SN):

Model:

Følgeseddel-nr.:

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Din forhandler

MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2



32689 Kalletal-Kalldorf

TYSKLAND



Tlf. +49 5733 922 - 311

Fax +49 5733 922 - 9311



info@meyra.de

www.meyra.de
