

Netti[®] ***precision 1 and 2***

Brugsanvisning



CE Dette produkt er i overensstemmelse med regulativ (EU) 2017/745 for medicinske produkter.

*inspire
joy of life*

INDHOLD

1.	OM DENNE BRUGSANVISNING	3
2.	FORMÅL MED PRODUKTET	3
3.	ANVENDELSESOMRÅDE	3
4.	TEKNISKE SPECIFIKATIONER	4
5.	RISIKOFAKTORER	4
6.	MONTERINGSVEJLEDNING	5-6
7.	LØBENDE KONTROL OF EFTERSYN	7
8.	VEDLIGEHOLDELSE	8
	•8.1 Rengøring og vask	8
	•8.2 Genbrug	
9.	TESTS & GARANTI	9
	•9.1 Tests	9
	•9.2 Garanti	9
	•9.3 Reklamation	10
	•9.4 Kombination med andre produkter	10
	•9.5 Miljø og bortskaffelse af affald	10



1. Om denne brugsanvisning

For at undgå skader ved brug af Netti Precision 1 og 2 siddepuder, anbefales det at læse denne brugervejledning grundigt før du tager puden i brug.



Advarselsikon. Når dette symbol vises, skal der udvises forsigtighed.



Symbol for vigtige oplysninger.



Symbol for værktøj.

MD Medicinsk udstyr



På produkter solgt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) indikerer dette, at producenten har sikret, at produktet opfylder EU's krav til sikkerhed, sundhed og miljø.



Producent – navn og adresse.



Fremstillingsdato.



Læs brugsanvisningen.



Maksimal belastning for sædepuden

Bemærk venligst, at denne manual opdateres i henhold til årstal og dato angivet på hver side. Brugsanvisning kan downloades på www.my-netti.com

For bedre læsbarhed (særligt for brugere med nedsat syn) findes vores brugermanual på vores hjemmeside www.my-netti.com opdateringer af manualen, sikkerhedsnoter, adresser og anden produktinformation såsom tilbagekaldelser offentliggøres på vores hjemmeside.

2. Produktets formål

Netti Precision 1 og 2 er siddepuder designet til at passe til alle typer kørestole. De er fremstillet med Ergomise™-teknologi, som forbedrer trykfordelingen, giver ekstra siddekomfort og støtte, og beskytter huden. Den isotrope struktur sikrer optimal trykfordeling for både 100 % passive og 100 % aktive kørestolsbrugere. Kombinationen af et friktionsstof og velcro på undersiden af puden gør den kompatibel med hele udvalget af kørestole på markedet.

Kontraindikationer

Trykskade, der forhindrer brugeren i at sidde i kortere eller længere perioder, eller helt udelukker at sidde.

Produktet overholder kravene i MDR (EU) 2017/745) og kørestolsstandarden EN 12183:2022.

Netti Precision-materialet, konstruktionen, geometrien og ergonomen opfylder kravene til teknisk hjælpemiddel i henhold til MDR.

Samspelet mellem produktet og brugeren bliver nøje vurderet i risikoenalysen. Alle nødvendige og påkrævede forholdsregler er taget for at forhindre uacceptable resterende risici.

3. Anvendelsesområde

Vores siddepecialister har forfinet alle aspekter af puderne – fra trykfordeling og aflastning af udsatte områder til minimering af højt tryk samme sted og materialevalg. Resultatet er topmoderne puder med flere hårdheder, som med Ergomise™-teknologi giver enestående komfort, stabilitet og avanceret hudbeskyttelse: Netti Precision 1 og Netti Precision 2.

Vi har skabt den optimale tredimensionelle balance mellem bløde og faste støttezoner og lag, hvilket sikrer god kropsholdning og beskyttelse af huden.

Puderne er udviklet til langvarig brug og til personer med følsom hud eller øget risiko for trykskader. Netti Precision™ siddepuder er klar til brug, hygiejniske og designet til at holde længe.

NETTI PRECISION 1



- Til brugere med risiko for hud- og trykskader.
- Fordeler trykket og giver aflastning.
- Beskytter udsatte knogleområder.
- Støtte til bækkenet sikrer en ergonomisk siddestilling.
- Optimal nedsynkning reducerer risikoen for at glide fremad.

NETTI PRECISION 2




- Til brugere med følsom hud, øget risiko for hudskader eller allerede opståede hudskader.
- Effektiv trykfordeling og aflastning.
- Forstærket trykaflastning af haleben og bækkenbund.
- Bækkenstøtte sikrer ergonomisk siddeposition.
- Optimal nedsynkning reducerer risikoen for at glide fremad.

UDVIKLET MED ERGOMISE™-TEKNOLOGI

Med Ergomise™-teknologi garanterer vi, at vores siddepuder leverer dokumenterede resultater. Netti Precision™-sædepuderne og den bagvedliggende teknologi er testet mod konkurrerende produkter – ikke kun af Netti, men også af testinstituttet ved University of Pittsburgh (ISO 16840-2, -6, -12-13) – og resultaterne viser enestående ydeevne.


TEMPERATURREGULERING

Høje temperaturer kan øge fugtigheden og skabe risiko for hudskader. Netti Precision™-materialet holder temperaturen nede og mindsker dermed risikoen for skader. Ifølge testinstituttet ved University of Pittsburgh er temperaturen mellem brugeren og Netti Precision™-materialet kun 32,7 °C efter 3 timer. Tilsvarende puder måler mellem 33,7 °C og 35,7 °C.

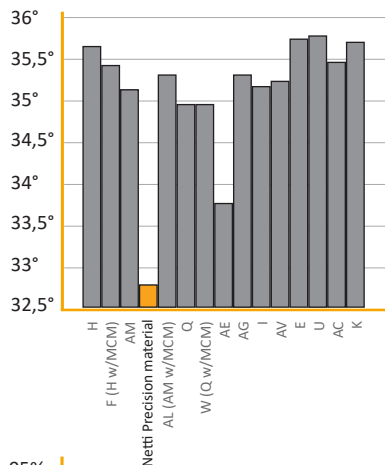


REGULERING AF FUGT

Fugtighed over 60 % kan gøre huden mere sårbar og give øget friktion mellem hud og tekstil, hvilket kan føre til trykskader. Derfor bestræber vi os på at holde fugtigheden lav. Test fra University of Pittsburgh viser, at puden med Netti Precision™-materiale har en fugtighed på 62 % efter 3 timer, sammenlignet med et gennemsnit på 81,2 % for de 14 tilsvarende puder.

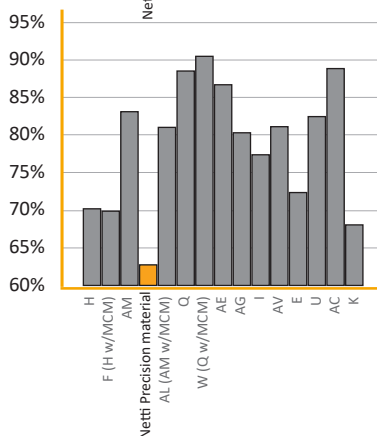

EFFEKTIV TRYKAFLASTNING

Når et tryksår først er opstået, kan kørestolsbrugere risikere smertefulde behandlinger, langvarig sengeleje og hospitalsindlæggelse. Netti Precision™ sikrer en effektiv trykfordeling hvilket er afgørende for at forebygge tryksår. Trykmålinger har vist, at Netti Precision™ overgår andre trykaflastende puder, når det gælder reduktion af maksimalt tryk.

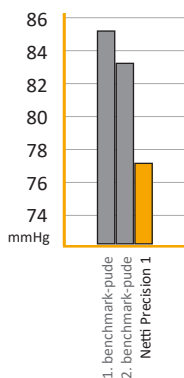

4. Tekniske specifikationer

KRENE

Kernen er fremstillet af biokompatibel termoplastisk polyurethan (TPU). Materialet indeholder ingen tilsatte ftalater.

YDRE BETRÆK

Du kan vælge mellem to forskellige betræk:

- Åndbar og elastisk Stella+ med integreret skumindlæg
- Åndbar, elastisk og let at rengøre EasyCare+ med integreret skumindlæg

SAMLET VÆGT:

Sædebredde 350 mm – 0,7 kg

Sædebredde 600 mm – 1,9 kg



Det er terapeutens ansvar at vælge den rigtige pude til kørestolsbrugeren. Hvis vores almindelige løsninger ikke passer til dine behov, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice for en specialtilpasset løsning.



TEMPERATUROMRÅDE:

Precision puder kan trygt anvendes i temperaturer fra -10 °C og op efter. Puden bør ikke bruges ved temperaturer under -10 °C, da materialet bliver hårdt. Vi anbefaler, at siddepuden altid opbevares under 65 °C.

5. Risikofaktorer

Puderne er "forudtilpassede" og kræver ingen yderligere tilpasning, så længe monterings- og vaskeanvisningerne overholdes. Har brugeren tryksår, anbefaler vi at kontakte egen læge for rådgivning. For dette produkt er der ingen urimelig samlet risiko tilbage efter risikovurdering af produktet, udført i henhold til ISO 14971. Risikovurderingen viser en overvejende fordel for brugeren.

6. Monteringsvejledning

Siddepuden tages ud af emballagen og placeres i kørestolens sæde. Placerpuden i henhold til anvisningerne på mærkaterne, der sidder på undersiden af yderbetrækket. Tjek at velcrobånd og det skridsikre stof vender mod sædepladen. Sædepladen skal have modsatte velcrobånd sikkert fastgjort. Sørg for, at velcroen fra sædepladen og bunden af Precision-puden sidder direkte oven på hinanden, så puden ligger sikkert fast.




Forreste kant af siddepuden skal flugte præcist med forkanten af sædepladen.

7. Løbende kontrol og eftersyn

 Før brugeren sætter sig, skal du kontrollere, at puden er placeret korrekt i henhold til instruktionen på mærkatet under puden. Tjek jævnligt, at kernen og betrækket sidder rigtigt. Inden du sidder i længere tid, start med korte perioder – for eksempel fem minutter første gang, hvis du har problemer med tryksår. Efter hver session skal du undersøge de hudområder, der har været i kontakt med puden. Hvis du bemærker rødme, skal den forsvinde inden for 10 til 30 minutter. Hvis rødmen varer længere end 30 minutter, skal du kontakte din læge eller terapeut.

Hvis hudtjek ikke viser vedvarende rødme, kan du gradvist øge den tid, du sidder, med 5-30 minutter op til én time om dagen – afhængigt af dine tryksårproblemer. Fortsæt med at kontrollere huden efter hver forlængelse. Som tommelfingerregel anbefales det ikke at sidde mere end 2 til 4 timer ad gangen. Selv når huden har vænnet sig til puden, bør du stadig tjekke den mindst én gang om dagen. Husk at aflaste trykket jævnligt ved at løfte dig selv eller benytte elektrisk tilt, som din sundhedsfaglige visitator har anbefalet.

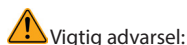 **Vigtig advarsel:**

Hvis du oplever rødme efter brug af Precision-siddepuden, og den ikke forsvinder inden for 30 minutter, skal du straks stoppe med at bruge puden og kontakte din sundhedsfaglige visitator.

 **Løbende kontrol og justeringer**

Med tiden kan puden blive trykket sammen, eller din vægt kan ændre sig. Det er vigtigt at tjekke regelmæssigt, at der er tilstrækkelig plads under dine siddekogler (sædeben). Hvis du ikke gør dette, kan det føre til skader.


 **Opfølgende pleje**

Det anbefales, at din siddestilling og hudtilstand vurderes af en sundhedsprofessionel mindst én gang om året, eller tidligere hvis du oplever ændringer i vægt, kropsholdning eller generel helbredstilstand, som kan påvirke din siddekomfort og sikkerhed.

Behovet for at vaske kerne og betræk varierer fra bruger til bruger afhængigt af eksempelvis graden af inkontinens. Som tommelfingerregel kan man tage kernen ud af betrækket én gang om ugen, stille den på højkant for at lufte ud og samtidig vaske betrækket.

Det anbefales at bestille et ekstra betræk, så siddepuden kan bruges, mens betrækket vaskes.

8. Vedligeholdelse

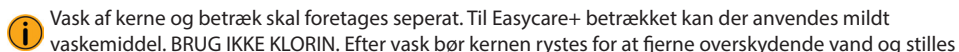 Vask af kerne og betræk skal foretages separat. Til Easycare+ betrækket kan der anvendes mildt vaskemiddel. BRUG IKKE KLORIN. Efter vask bør kernen rystes for at fjerne overskydende vand og stilles til lufttørring. Undgå skrappe rengøringsmidler som skuresvampe, kraftige affedtningsmidler eller opløsningsmidler som acetone. Til pletter og snavs kan almindelige husholdningsrengøringsmidler og en blød klud anvendes. Ved genstridige, indtørrede pletter kan det være nødvendigt først at opløse området, og dette løses ofte bedst ved maskinvask.

8.1 Rengøring og vask

Det eneste vedligehold, som puden kræver, er rengøring:

1. Åbn lynlåsen bagpå og fjern betrækket.
2. Tag kernen ud og lad den luften, mens betrækket vaskes. Den indvendige kerne kan også skylles under hanen eller i bruseren ved 65 grader, eller vaskes på et skånsomt program i vaskemaskinen ved maks. 65 grader i op til 30 minutter. Ryst kernen et par gange for at fjerne vandet, og lad den lufttørre kort, hvis nødvendigt.
3. Følg vaskeanvisningen, som står på mærket i bunden af betrækket.
4. Kernen lægges i betrækket med mærkaten nedad. For at sikre korrekt placering af for- og bagside, tjek venligst mærkaten.
5. Sæt yderbetrækket på igen. Sørg for at lynlåsen vender bagud, og etiketten peger nedad.



Følg altid vaskeanvisningen på pudens og betrækkets etiket.



Brug vaskepose til betrækket – velcrolukningen kan give ekstra slid under vask.



Den "han-delen" af velcroen kan renses med en stålborste.

Kerne:	Precision 1 + 2
Vask	Skyl i hånden under koldt vand i bruseren, eller maskinvask ved maks. 65 °C i op til 30 minutter uden centrifugering
Regelmæssig sterilisation*	Alkoholbad (isopropylalkohol eller ethanol med en koncentration på 70% eller mere) i 15-30 minutter.
Sjælden sterilisation*	Dampsterilisering ved 121 °C i 20 minutter.
Betræk	
Vask	Maks. maskinvask 70 °C
Tørring	Tørretumbling maks. 80 °C

*Læs instruktionerne på kernen, på puden og på emballagen.

8.2 Genbrug.



Alu Rehab betragter siddepuder som et intimt og meget personligt medicinsk tilbehørsprodukt. Ved genbrug anbefaler det mindst at udskifte betrækket eller hele puden.



Det er påkrævet at udskifte puden, hvis den tidligere bruger har haft infektion – især med multiresistente bakterier.

9. Tests & garanti

9.1 Tests

Netti siddepuder er testet og godkendt til både indendørs og udendørs brug. Netti siddepuder er CE-mærkede og produceret i overensstemmelse med kravene i Medical Device Regulation(EU) 2017/745.

Maksimal brugervægt for Netti Precision 1 og 2.

Siddepude med sædebredde < 500 mm = 160 kg

Siddepude med sædebredde over 500 mm = 200 kg.



Netti kørestole med Netti puder er testet af et akkrediteret tysk testlaboratorium i henhold til EN 12183.

Netti kørestole med Netti puder er desuden crashtestet hos TASS International AS i Holland og vurderet af et akkrediteret tysk testlaboratorium i henhold til ISO 7176-19.

Begge er godkendt til brug som sæde i bil.

Netti Precision siddepuder er testet efter følgende øvrige standarder:

Brandmodstand: EN 1021-1 og 2.

Hudkontakt og cellekontakt: Cytotoksicitet i henhold til ISO 10993-5.

TPU-materialet indeholder hverken bisphenol eller ftalater.

9.2 Garanti

Holdbarheden og levetiden for Netti Precision siddepuder afhænger af designet, den valgte hårdhed og den belastning, produktet udsættes for.

Sammenlignet med skumpuder af tilsvarende hårdhed (PU og PUR) er Netti Precision siddepuder exceptionelle. Derfor gives der 2 års garanti på alle Netti-mærkede precision siddepuder.



Alu Rehab kan ikke drages til ansvar for skader, der skyldes forkert eller uautoriseret installation, reparationer, slitage, vedligeholdelse eller vask, samt forsætlig skade, der ikke er godkendt af Alu Rehab eller er forårsaget af tredjepart. I sådanne tilfælde bortfalder garantien.



Denne garanti gælder kun, hvis brugeren anvender, vedligeholder og håndterer siddepuden som beskrevet i denne brugervejledning.



Garantien gælder kun, hvis brugeren har fulgt vores anbefalinger som beskrevet under "Løbende kontrol og eftersyn".

9.3 Reklamation

Hvis der opstår en fejl på produktet i garantiperioden, som skyldes en fejl i design eller produktion, kan du indsende en reklamation.

- Reklamationer skal indsendes straks efter, at fejlen er opdaget, og senest 2 uger efter fejlen er konstateret.
- Reklamationen skal rettes til den forhandler, hvor kørestolen er købt. Bemærk, at købsdokumentationen skal udfyldes og underskrives korrekt med serienummer, fakturanummer og eventuelt NeC-nummer for at dokumentere tid og sted for købet.
- Forhandleren og Alu Rehab vurderer, om fejlen er dækket af garantien. Du vil få besked om afgørelsen hurtigst muligt.
- Hvis reklamationen godkendes, afgør forhandleren og Alu Rehab, om produktet skal repareres, ombyttes eller om du får en prisreduktion.
- Bliver reklamationen afvist – efter grundig undersøgelse af fejlen (fejl som skyldes forkert brug og/eller manglende vedligeholdelse) – kan du frit vælge, om du vil have produktet repareret for egen regning (hvis muligt), eller om du ønsker at købe et nyt produkt.



Almindelig slitage, forkert brug eller ukorrekt håndtering giver ikke ret til reklamation.

9.4 Kombination med andre produkter

Kombinationer af Netti og andre produkter, som ikke er fremstillet af Alu Rehab:

Generelt er CE-mærkningen for alle involverede produkter ikke gyldig i disse tilfælde. Dog har Alu Rehab indgået aftaler med visse producenter om specifikke kombinationer, hvor CE-mærkning og garantier stadig er gældende. For yderligere information, kontakt venligst din forhandler eller Alu Rehab Norge direkte.

PRODUKTANSVAR

Netti siddepuder Precision 1 og 2 er testet og risikovurderet af Alu Rehab.

Udskiftning eller ændring af Netti siddepuder fra tredjepartsleverandører kræver risikovurdering samt accept af produktansvar og sikkerhed for brugen af kørestolen fra den producent, der foretager udskiftningen eller ændringen.



Information om produktsikkerhed og tilbagekaldelser findes på www.my-netti.com

9.5 Miljø og affaldshåndtering



Alu Rehab og deres leverandører ønsker at passe på miljøet. Det indebærer:

- Vi undgår brug af miljøskadelige stoffer og processer, så vidt det overhovedet er muligt.
- Alu Rehab sikrer, at produkterne har lang levetid og stor fleksibilitet – til gavn for både miljø og økonomi.
- Alt emballage kan genanvendes.
- Siddepuden er designet, så den er nem at genbruge.
- Kontakt din lokale genbrugsstation for opdateret information om, hvilke dele og materialer der kan genanvendes, samt hvordan de skal sorteres.



En genbrugsguide for Netti-kørestole kan downloades på my-netti.com



For personer med synsnedsettelse kan manualer og kataloger downloades på www.my-netti.com



Producent



Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
N-4353 Klepp Stasjon
Norway



post.klepp@meyragroup.com
T: +47 51 78 62 20
my-netti.com

Distributør

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
Denmark

netti@meyragroup.com
T: +45 87 88 73 00
my-netti.com