

Netti[®] UNO + SIT

Brugsanvisning



CE Dette produkt er i overensstemmelse med regulativ (EU) 2017/745 for medicinske produkter.

*inspire
joy of life*

Netti® Uno Seat



Netti® Sit



INDHOLD

1. Formål med produktet
2. Brugsområde
3. Tekniske data
4. Risikofaktorer
5. Monteringsvejledning
6. Vedligeholdelse
7. Rutiner ved eftersyn
8. Vaskeanvisning/
recirkulation
9. Test & Garanti

1. Formål med produktet

Netti Uno Seat og Netti Sit er siddepuder designet til alle typer kørestole. De er bygget op omkring principperne om enkelthed i brug, kombineret med gode tryksårsforebyggende egenskaber. De tryksårsforebyggende egenskaber omfatter både trykfordeling og mikroklima. Puderne har en et skridsikkert betræk kombineret med velcro på undersiden, som gør den kompatibel med alle eksisterende kørestolsmodeller på markedet.

Kontraindikationer:

Tryksskade, der forhindrer brugeren i at sidde ned i kort eller lang tid eller i det hele taget.

2. Brugsområde

Netti Uno Seat er en enkel tryksårsforebyggende siddepude, bygget op af flere lag af polyuretan skum

beregnet til langvarig trykfordeling. Puden har integreret støtte i forkant af sædekuderne. Puden kan leveres med enten 3D eller Easy Care betræk. Puden egner sig godt til forebyggelse af tryksår for brugere der sidder i kørestol i mange timer.

Netti Sit er en tryksårsforebyggende siddepude bygget op af flere lag polyuretan skum, som giver langvarig trykfordeling. Puden har sidestøtte for øget stabilitet og trykfordelingsflade. En integreret abduktionskile medvirker til den rette holdning på overkroppen. En snittet overflade i det øverste lag skum reducerer overfladespændingen og tillader hurtig nedsynkning. Puden har integreret støtte i forkant af siddekuderne. Puden egner sig godt til forebyggelse af tryksår for brugere, der sidder mange timer i kørestolen, hvor man i tillæg øger stabiliteten for brugeren.

3. Tekniske data

Netti Uno Seat

KERNEN

4 lag polyuretanskum. Puden er opbygget af polyuretan skum med forskellige vægtbærende egenskaber. To af lagene ligger horisontalt ved siden af hinanden i midterlaget. I bagkant er der lagt et blødere lag skum, mens der i forrest ligger et noget fastere lag. Dette stabiliserer bækkenet i forkanten af siddekuderne.

Netti Sit

KERNEN

4 lag polyuretanskum. Pudene er opbygget af polyuretan skum med forskellige vægtbærende egenskaber. To af lagene ligger horisontalt ved siden af hinanden i midterlaget. I bagkant er der lagt et blødere lag skum, mens der i forrest ligger et noget fastere lag. Dette stabiliserer bækkenet i forkanten af siddeknuderne.

Oven på det nederste bærende skumlag, er der indlagt et tekstil der binder skummets overflade. Dette giver mulighed for at reducere pudens vægt og øge dens vægtbærende egenskaber. Der er integreret sidestøtter i yderkanten af kernen. Dette øger sidestøtten og øger den totale kontaktflade.

YDERBETRÆK: NETTI SIT/NETTI UNO SEAT

Variant 1: 3D

100% strikket polyester med 3D-struktur. Betrækket er meget slidstærkt og strækbart, og er meget ventilerende. Kun Netti Sit med 3D yderbetræk har en mellombetræk ved navn Netti Protex. Her er kernen omgivet af et hvidt beskyttelsesbetræk, Protex, som beskytter kernen mod snavs. Protex er et semi-permeabelt polyuretan - materiale som "ånder".

Det vil sige at det lader vand-damp (vandmolekyler) slippe i gennem, mens væske i dråbeform forhindres i at trænge ind. Protex er meget elastisk.

Variant 2: Easycare (EC)

100% polyester, meget elastisk, nem at rengøre/tørre af og har en vis luftgennemtrængelighed.

På yderbetrækkets underside er der påsyet en friktionsdug med påsyet velcro, om sørger for at pudene ligger stabilt i kørestolen uafhængig af kørestolsmodel og typen af underlag.

Terapeuten er ansvarlig for valg af pude-model til kørestolsbrugeren.

4. Risikofaktorer

Pudene er kler til brug og behøver ingen videre tilpasning, så længe monterings- og vaskeanvisningen følges. Hvis brugeren har åbne sår, anbefales det at vedkommende ikke sidder på pudene.

For dette produkt er der ingen urimelig samlet risiko tilbage efter produktrisikoomanalysen udført i henhold til ISO 14971.

Risiko-fordel-forholdet viser en overvejende fordel for brugeren.

5. Monteringsvejledning

Puden tages ud af emballagen og placeres i kørestolens sæde. Placer puden i sædet, i henhold til den etiket der er syet fast på betrækkets underside. Pas på at friktionsdugen med etiket vender ned mod sædepladen. Siddepladen skal have den modsatte velcro fastgjort. Sørg for, at velcroen fra siddepladen og bunden af skumpuden sidder direkte mod hinanden for at sikre en sikker placering af puden.

6. Vedligeholdelse

Eneste vedligeholdelse for puderne er vask:

1. Åbn lynlåsen bagerst på puden og tag betrækket af.
2. Åbn lynlåsen på undersiden af mellembetrækket (gælder kun Netti Sit med 3D betræk.
3. Tag kernen ud og sæt den på højkant til luftning, mens betrækket vaskes.
4. Følg vaskeanvisningen som beskrevet på etiketten, som er syet fast på undersiden af henholdsvis mellem- og yderbetræk.
5. Kernen placeres i betrækkene med etiketten vendt nedad. For rigtig frem/bag placering, se etiket.
6. Påsæt mellembetrækket. Pas på at det placeres med lynlåsen i bagerst og med etiketten vendt nedad.
7. Påsæt yderbetræk. Pas på at det placeres med lynlåsen bagerst og med etiketten vendt nedad.

7. Rutiner ved eftersyn

Før du positionerer brugeren, skal du kontrollere, at puden er placeret korrekt i henhold til instruktionerne på etiketten under puden. Kontroller regelmæssigt, at kernen og betrækkene er placeret korrekt.

Før du sidder ned i længere perioder, skal du begynde med at bruge din pude til korte sessioner, 5 minutter første gang, hvis du har problemer med tryksår. Efter hver session skal du kontrollere de hudområder, der har været i kontakt med puden. Hvis du bemærker rødme, bør den forsvinde inden for 10 til 30 minutter. Hvis rødmen varer længere end 30 minutter, skal du kontakte din læge eller terapeut.

Hvis dine hudkontroller ikke viser nogen vedvarende rødme, kan du langsomt øge din siddetid med 5-30 minutter til 1 time hver dag, afhængigt af din huds følsomhed. Fortsæt med at kontrollere din hud efter hver øgning. Generelt er det at sidde i 2 til 4 timer ad gangen det anbefalede maksimum. Selv efter at din hud har vænnet sig til puden, skal du fortsætte med at kontrollere den mindst én gang om dagen.

Sørg for regelmæssigt at aflaste trykket ved at løfte dig selv eller bruge en tilt, som anbefalet af din sundhedsudbyder.

LØBENDE KONTROLLER OG JUSTERINGER

Med tiden kan din pude blive komprimeret, eller din vægt kan ændre sig. Regelmæssige kontroller er nødvendige for at sikre, at der er tilstrækkelig plads under dine siddeknogler (iskial tuberositeter). Hvis du ikke gør det, kan det føre til skade.

VIGTIG ADVARSEL

Hvis rødmen fra brugen af Precision-puden varer ved i mere end 30 minutter, skal du stoppe med at bruge puden og straks kontakte din læge.

OPFØLGENDE PLEJE

Det anbefales at få din kropsholdning og hudtilstand gennemgået af en sundhedsperson mindst én gang om året, eller tidligere, hvis du bemærker ændringer i din vægt, kropsholdning eller generelle helbred, der kan påvirke din siddekomfort og sikkerhed. Behovet for at vaske kerne og betræk vil variere fra bruger til bruger afhængigt af graden af inkontinens osv. En tommelfingerregel kan være at tage kernen ud af betrækene en gang om ugen og lade den stå på højkant mens betrækket vaskes.

Det anbefales at bestille et ekstra betræk, så siddepuden kan bruges under vask af for betrækket.

8. Vaskeanvisning/recirkulation

	Netti Uno Seat	Netti Sit
KERNE		
Vask	Håndvask 40 °C	Håndvask 40 °C
Desinficering	Virkon S*	Virkon S*
	Autoklaving 105 °C	Autoklaving 105 °C
Tørring	Tørretumbles	Tørretumbles
	Lufttørres stående	Lufttørres stående
MELLEMBETRÆK	Ikke standard	
Vask		Maskinvaskes 70 °C
Tørring		Tørretumbles maks. 80 °C
YDERBETRÆK		
Vask	Maskinvaskes 70 °C	Maskinvaskes 70 °C
Tørring	Tørretumbles maks. 80 °C	Tørretumbles maks. 80 °C

*Læs brugsanvisningen på pakningen.

Alu Rehab anser siddepuder for at være et intimt og personligt hjælpemiddel. Ved recirkulering anbefales det i det mindste at udskifte yderbetræk og evt. inderbetræk på puden.

9. Test & Garanti

TEST

Netti siddepuder er testet og godkendt til både indendørs og udendørs brug.

Netti siddepuder er CE-mærkede og produceret efter kravene i Medical Device Regulation (EU) 2017/745.

Maksimal brugervægt for Netti Sit og Netti Uno Seat

Siddepude med sædebredde < 500 mm = 160 kg

Siddepude med sædebredde over 500 mm = 200 kg.

Netti kørestole med Netti puder er testet af et akkrediteret tysk testlaboratorium i henhold til EN 12183. Netti kørestole med Netti puder er også blevet crashtestet hos TASS International AS, Holland, og vurderet af et akkrediteret tysk testlaboratorium efter ISO 7176-19. Begge er godkendt til brug som sæde i bil.

Netti Sit og Netti Uno Seat siddepuder er testet efter følgende øvrige standarder:

Brandmodstand: EN 1021-1 og 2.
Hudkontakt og cellekontakt:
Cytotoksicitet i henhold til ISO 10993-5.

GARANTI

Holdbarheden og levetiden for Netti Sit og Netti Uno Seat siddepuder afhænger af designet, de valgte hårdheder og den belastning, der påføres.

Nettis skumpuder (PU og PUR) er af meget høj kvalitet. Derfor ydes der 2 års garanti på alle Nettimærkede siddepuder fremstillet af skum.



Alu Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af forkert eller uautoriseret brug, reparation, slid, vedligeholdelse eller vask samt for sætlig skade, der ikke er godkendt af Alu Rehab eller som er forårsaget af tredjepart. I sådanne tilfælde bortfalder garantien.



Garantien gælder kun, når brugeren anvender, vedligeholder og håndterer siddepuden som beskrevet i denne brugermanual.



Garantien er kun gyldig, hvis brugeren har fulgt vores anbefalinger beskrevet under "Rutiner for inspektion".

REKLAMATION

Hvis der opstår en fejl på produktet i garantiperioden, som skyldes design- eller fabrikationsfejl, kan du indsende en garantireklamation.

- Reklamationer skal indsendes straks, når en fejl opdages, og senest 2 uger efter, at fejlen er konstateret.
- Reklamationer skal sendes til forhandleren af kørestolen. Bemærk, at salgsdokumentation skal udfyldes og underskrives korrekt med serienummer, fakturanummer og eventuelt NeC-nummer for at dokumentere tid og sted for købet af kørestolen.
- Forhandleren og Alu Rehab vurderer herefter, om fejlen er dækket af garantien. Du vil blive informeret om beslutningen så hurtigt som muligt.
- Hvis reklamationen godkendes, afgør forhandleren og en repræsentant fra Alu Rehab, om produktet skal repareres, udskiftes eller om kunden har ret til en prisreduktion.
- Hvis en garantireklamation vurderes som ugyldig – efter grundig undersøgelse af fejlen (fx fejl som følge af forkert brug og/eller manglende vedligeholdelse) – kan du frit vælge, om du vil have produktet repareret for egen regning (såfremt det er muligt), eller om du ønsker at købe et nyt produkt.



Almindelig slitage, forkert brug eller forkert håndtering berettiger ikke til reklamation.

KOMBINATION MED ANDRE PRODUKTER.

Kombinationer af Nettis sidde- og rygpuder med andre kørestole, der ikke er fremstillet af Alu Rehab, kan være tilladt.

Generelt forbliver CE-mærkningen og garantien gyldig, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

1. Alu Rehab har indgået kombinationsaftaler med relevante producenter om specifikke produktkombinationer.
2. Andre produkter overholder kravene i MDR (EU) 2017/745 samt andre relevante standarder og er dokumenteret sikre for brugeren.

PRODUKTANSVAR

Netti siddepuder Netti Sit und Netti Uno Seat er testet og risikovurderet af Alu Rehab.

Udskiftning eller ændring af Netti siddepuder fra tredjepartsleverandører kræver risikovurdering samt accept af produktansvar og sikkerhed for brugen af kørestolen fra den producent, der foretager udskiftningen eller ændringen.



Information om produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagemeldelser findes på www.my-netti.com

MILJØ OG AFFALDSHÅNDTERING



Alu Rehab og deres leverandører ønsker at tage vare på miljøet. Dette indebærer:

- At vi undgår at bruge miljøskadelige stoffer og processer så vidt muligt.
- At Alu Rehabs produkter har lang levetid og stor fleksibilitet – til gavn for både miljøet og økonomien.
- At al emballage kan genanvendes.
- At siddepuden er designet for at gøre genbrug nemmere.
- Kontakt din lokale genbrugsstation for opdateret information om, hvilke komponenter og materialer der kan genanvendes, og hvordan de skal sorteres.



En genbrugsmanual til Netti kørestole kan downloades på my-netti.com.



Manualer og brochurer til synshæmmede kan hentes på my-netti.com.

Producent

📍 Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
N-4353 Klepp Stasjon
Norway

✉ post.klepp@meyragroup.com
T: +47 51 78 62 20
my-netti.com

EU distributør

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
Denmark

netti@meyragroup.com
T: +45 87 88 73 00
my-netti.com